




WIDEX MOMENT SHEER

DIE PERFEKTION DES NATÜRLICHEN KLANGS.
KLINGT WIE DAS LEBEN SEIN SOLLTE: NATÜRLICH GUT.

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

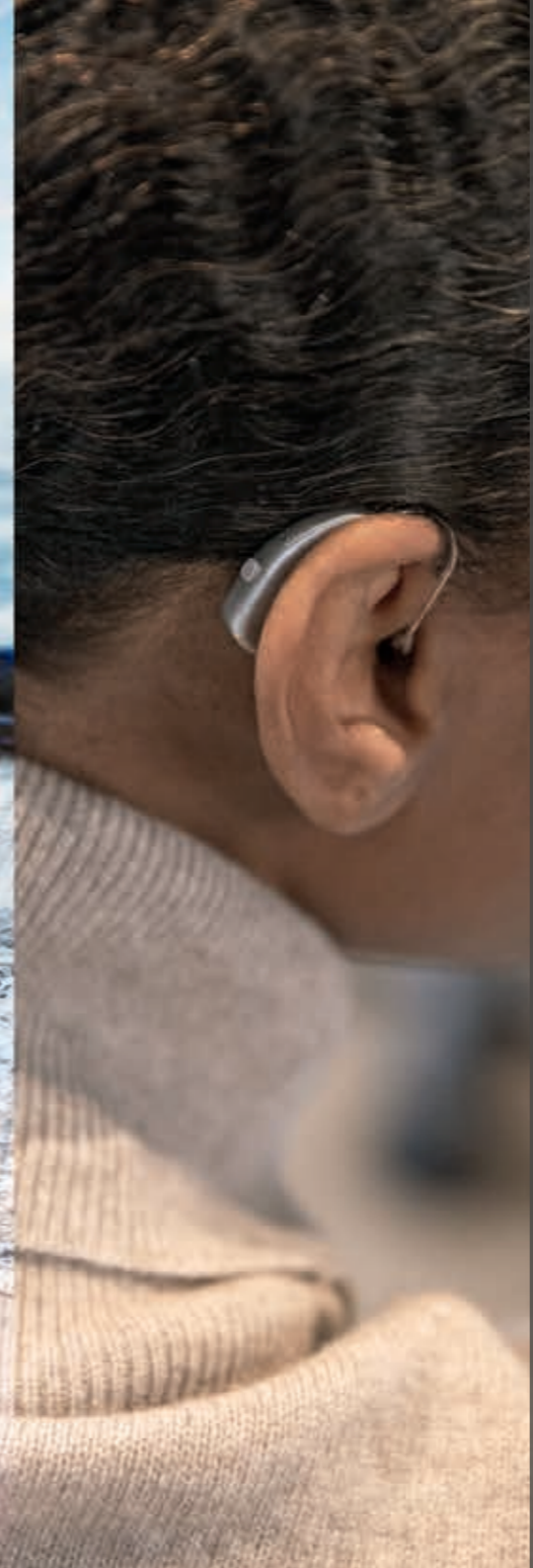

KLINGT WIE

SALZIGE LUFT UND NASSER
SAND UNTER DEN FÜSSEN.

Perfektes Hören ist ein Sinn, der so individuell ist wie wir selbst. Perfektes Hören klingt wie das Leben – augenblicklich, vielfältig, emotional. Es zeigt sich in den Momenten, in denen sich Leben und Erleben für Ihre Kunden wieder so anfühlt wie früher und Sie das zufriedene Lächeln in ihren Gesichtern sehen. Mit Widex Moment Sheer haben wir die nächste Evolutionsstufe erreicht: Wir sind noch näher an der Perfektion des natürlichen Klangs und wollen noch mehr Menschen diese Momente des Hörerlebens ermöglichen. Mit attraktiven Produktneuheiten, mit neuen Technologien und akustischer Präzision, mit mehr Flexibilität und einem selbstbewusst anspruchsvollen Design.

EINE NEUE ÄRA DES NATÜRLICHEN KLANGS.

Mit unserem neuen sRIC R D-Hörsystem und einer Reihe innovativer Technologien wie PureSound, MySound 2.0 und Widex SoundRelax eröffnen wir Hörsystem-Trägern eine neue Welt natürlicher Hörerlebnisse.

Denn Widex Moment Sheer bietet mehr Komfort und Individualität in einem hochwertigen und eleganten Design. Die neu angeordneten Mikrofonöffnungen unterstützen die Charakteristik der MEMS-Mikrofone und lassen das System schlanker und eleganter erscheinen.

Die neue Bauform sRIC R D ersetzt die Bauform mRIC R D.



sRIC R D

Akkulaufzeit
20 Stunden
(16 Stunden inklusive
8 Stunden Streaming)

ENERGIE IN IHRER SCHÖNSTEN FORM.

Mit der neuen Ladestation WPT103 werden auch das Einsetzen und Aufladen jetzt noch komfortabler. Denn die Station ist sowohl ästhetisch hochwertig gestaltetet als auch stabil und dank gummiertem Fuß äußerst standfest. Durch gute Sichtbarkeit und eine ergonomische Platzierung der Einlässe lassen sich die Hörgeräte besonders einfach einsetzen. Sie ersetzt die Ladestation WPT102 der Moment-Hörsystemserie.

Noch mehr Neuheiten, Details zu Technologien, Zubehör und Modellen finden Sie auf den nächsten Seiten.



Ladestation WPT103

Ladezeit 4 Stunden

Schnelllade-Funktion
30 Minuten für weitere
4 Stunden Laufzeit



NÄHER DRAN AN NATÜRLICHEM KLANG.

Mit Widex Moment Sheer sind wir noch näher an der Perfektion des natürlichen Klangs. Das ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Dank naturgetreuer Schallverarbeitung, adaptiver Reduzierung von Störgeräuschen und der Hervorhebung von Sprachanteilen ermöglicht Widex Moment Sheer Hörsystem-Trägern, ihren Alltag wieder in natürlicher Klangqualität zu erleben.

Warum die Perfektion des natürlichen Klangs für uns so wichtig ist? Weil die Klangqualität neben der Passform für Hörsystem-Träger entscheidend ist. Das bestätigt auch die aktuelle EuroTrak-Studie. Mit Widex Moment Sheer bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen, um die Wünsche Ihrer Kunden wahr werden zu lassen.

Faktoren, die die Zufriedenheit mit dem aktuellen Hörsystem beeinflussen: Klangqualität/Signalverarbeitung und Gesamtpassform sind am wichtigsten für die Gesamtzufriedenheit mit dem Hörsystem.

	Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit mit dem Hörsystem *	
Hörakustiker	Qualität des Service nach dem Kauf	0.61
	Qualität der Beratung durch den Hörakustiker	0.57
	Professionalität des Hörakustikers	0.54
	Qualität des Service während der Hörgeräteanpassung	0.49
Klangqualität Signal- verarbeitung	Klangfülle/Klangtreue	0.69
	Klarheit des Klangs	0.67
	Natürlichkeit des Klangs	0.67
	Komfort bei lauten Geräuschen	0.65
Produkt- funktionen	Gesamtpassform/Komfort	0.68
	Zuverlässigkeit	0.65
	Kein Pfeifen (Rückkopplungen)	0.62
	Unsichtbar	0.59
	Preis-Leistungs-Verhältnis	0.57
	Einfacher Batteriewechsel	0.52
Batterielebensdauer	0.50	

* Der Einfluss wurde mit einer Korrelation berechnet: 0 bedeutet keine Beziehung zwischen einem Kriterium und der Gesamtzufriedenheit, 1 bedeutet eine maximale Beziehung. Klangfülle/Klangtreue ist das wichtigste Kriterium für die Zufriedenheit.

© Anovum 2022 – EuroTrak Germany 2022

DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG: EINZIGARTIGE TECHNOLOGIEN.

Unser Anspruch ist es, mit Widex Moment Sheer in jeder Hörsituation das bestmögliche Klangerlebnis zu liefern und durch die Natürlichkeit des Klangs unsere Kunden ihr Hörsystem vergessen zu lassen. Das erreichen wir durch eine Reihe innovativer Schlüsseltechnologien.



18-bit-A/D-Wandler – Der 18-bit-A/D-Wandler ermöglicht die Erfassung und Übertragung der gesamten Hörwelt: von leiser oder entfernter Sprache bis zu sehr lauten Klängen.



TruAcoustics – TruAcoustics steht für Präzision bei der Klangabgabe und betrachtet dabei Parameter der akustischen Ankopplung und des individuellen Gehörgangs. In den Fällen, in denen keine individuelle Maßtoplastik verwendet werden kann, bieten die neuen Widex Sleeves eine hohe akustische Stabilität und Rückkopplungssicherheit.



PureSound – PureSound liefert unvergleichlichen Klang dank schneller Signalverarbeitung in unter 0,5 ms. Studien belegen die einzigartige Klangqualität im Vergleich zu anderen High-End-Hörsystemen.



Variable Speed Compression – Variable Speed Compression erlaubt höhere Klangqualität bei gleichzeitig verbesserter Hörbarkeit – unabhängig von der individuellen kognitiven Leistungsfähigkeit.



Soft-Level-Noise-Reduction – Soft-Level-Noise-Reduction reduziert ungewünschte Störgeräusche ohne dabei leise Sprachanteile zu beeinträchtigen.



Sound-Class-Technologie – Unsere Sound-Class-Technologie ermöglicht durch differenzierte Parametersteuerung anhand von 11 Kategorien eine maßgeschneiderte Schallabgabe in jeder Hörumgebung.



SmartWind Manager – Der SmartWind Manager unterdrückt durch seine patentierte Widex-Technologie gezielt Windgeräusche und sorgt für verbessertes Sprachverstehen.



MySound 2.0 – MySound 2.0 erlaubt Nutzern die präzise KI-basierte Individualisierung des Klangerlebnisses und reduziert den Zeitaufwand in der Feinanpassung. Endverwender können auf den Equalizer Einfluss nehmen. Zusätzlich wird nun auch die Kompression angepasst, um den Fokus auf nahe und ferne Geräusche zu beeinflussen.



MyGuide – Die App-Funktion bietet wichtige Anleitungen und Tipps für die Eingewöhnung sowie Informationen rund um das Hörsystem. MyGuide ist ein wertvolles Kundenbindungsinstrument, das Ihre hochwertige Anpassung unterstützt.



SmartSpeak – SmartSpeak gibt Hörsystem-Trägern Rückmeldung über den Status ihres Hörsystems – per Sprachansage direkt im Hörsystem und in einer von 46 Sprachen.



Mehr Entspannung und bessere Konzentration – Widex SoundRelax liefert Fraktal- und Naturklänge zur Entspannung und zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit – nicht nur für Menschen mit Tinnitus.



GLASKLARER KLANGVORTEIL.

PureSound

Mit der PureSound-Verarbeitung für leichte und mittelgradige Hörverluste gelingt es Widex, die durchschnittlichen Durchlaufzeiten in jedem Frequenzkanal auf unter 0,5 ms zu reduzieren und damit verzögerungsbedingte Artefakte zu eliminieren.

Ein Unterschied, den man hören kann. Sagen nicht nur wir, sondern auch Studien mit Hörsystem-Trägern^{1,2}. Ob im Straßenverkehr oder im Gespräch: Das Hören mit PureSound wird in vielen alltäglichen Situationen bevorzugt und als natürlicher, angenehmer und klarer empfunden.

Verglichen mit aktuellen High-End-Hörsystemen anderer Hersteller bewahrt PureSound zudem die neuronale Antwort, die anhand der Envelope Frequency Response (EFR) bestimmt wurde, signifikant besser². Da die neuronale Codierung der Grundfrequenz positiv mit dem Sprachverstehen sowie mit der Sprecherunterscheidung im Störgeräusch in Verbindung gebracht wird, lässt sich daraus schließen, dass PureSound das Sprachverstehen optimiert.

Neben der allgemeinen Klangqualität und dem Sprachverstehen wirkt sich PureSound auch positiv auf die räumliche Wahrnehmung aus³. Ein weiterer entscheidender Faktor für natürlich empfundenes Hören.


¹ Balling L. W., Townend O. & Helmink D. (2021). Sound Quality in Real Life – Not Just for Experts/Sound Quality For All – The Benefits of Ultra-Fast Signal Processing

² Slugocki C., Kuk F., Korhonen P. & Ruperto N. (2020). Neural Encoding of the Stimulus Envelope Facilitated by Widex ZeroDelay Technology.

³ Korhonen, P., Kuk, F., Slugocki, C., & Ellis, G. (2022). Low processing delay preserves natural cues and improves spatial perception

Bessere räumliche Wahrnehmung mit PureSound.

Eine neue Studie³ hat unsere PureSound-Verarbeitung mit der Signalverarbeitung von High-End-Hörsystemen anderer führender Hersteller mit durchschnittlichen Verzögerungen von 8 ms (Hersteller 1) und 6 ms (Hersteller 2) verglichen. Das Ergebnis: Mit PureSound waren die Teilnehmer signifikant besser in der Lage, die Positionen von Geräuschquellen wahrzunehmen.

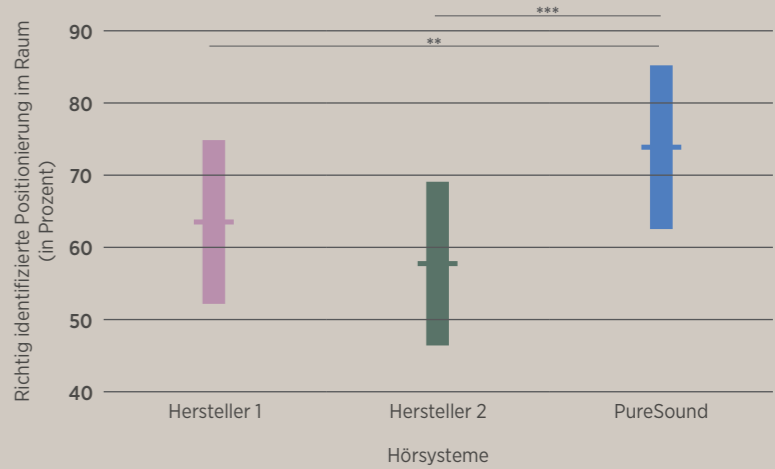

Signifikanzgrad ** p < 0.01, *** p < 0.001

INDIVIDUELLER KLANG IST GELEBTE FREIHEIT.

MySound 2.0

Das auf künstlicher Intelligenz basierende System ermittelt entweder über eine Reihe von A/B-Vergleichen das optimale Setting oder schlägt automatisch eine Klangempfehlung vor. Hinter jeder Empfehlung steckt die Analyse unzähliger A/B-Vergleiche von Hörsystem-Trägern in ähnlichen Hörsituationen. Alle KI-Berechnungen werden in der Cloud ausgeführt: für eine ultraschnelle Klangoptimierung, auch auf älteren Smartphones.

Und weil das dynamische KI-System nie auslernt, werden die Klangempfehlungen mit jedem Nutzer noch präziser.

Konnten Hörsystem-Träger bisher für ihre Klangpräferenzen auf den 3-Band-Equalizer Einfluss nehmen, wird mit dem Sheer-Update über die A/B-Vergleiche sogar die schnelle Kompression angepasst, um den Fokus auf nahe und ferne Geräusche zu beeinflussen. Dies hat maßgebliche Auswirkungen auf das Klangbild und ist insbesondere wertvoll in Situationen mit Störgeräusch.



HÖRBAR ZUR RUHE KOMMEN.

Widex SoundRelax

Stress ist allgegenwärtig. Zwischen Terminen, To-do-Listen und Erledigungen bleibt oft wenig Zeit, aktiv Entspannung zu suchen. Dieser Stress wirkt sich auf Geist, Körper und langfristig auch auf unsere Gesundheit aus. Mit Widex SoundRelax wollen wir Hörsystem-Trägern neue und innovative Wege zu mehr Entspannung zeigen.

Die Widex Sound-Relax-Klänge basieren auf der Fraktaltechnologie und sind so konzipiert, dass sie sowohl entspannend als auch akustisch stimulierend wirken. Die Auswahl von acht Klängen umfasst Fraktaltöne, Naturgeräusche sowie eine Kombination dieser Klangelemente. Sowohl das Zen-Klangprogramm als auch Widex Sound Relax können für eine brillante Klangqualität mit PureSound kombiniert werden.

Widex SoundRelax sorgt bei Hörsystem-Trägern für Entspannung, aber auch für verbesserte Konzentrationsfähigkeit. Das bestätigt eine Feldstudie mit Hörsystem-Trägern mit und ohne Tinnitus. Bieten Sie Ihren Kunden Wellness für die Ohren – mit Widex SoundRelax und Widex Moment Sheer.

Mit einem Firmware-Update kommen auch Ihre Kunden, die bereits Moment-Hörsysteme tragen, in den Genuss von Sound Relax.

FRAKTALKLÄNGE	KOMBINATIONEN	NATURKLÄNGE
Winter	Blütezeit	Sommer
Brandung		
Brise	Herbst	Frühling
		Küste



KLINGT WIE

UNTERWEGS UND
DOCH GANZ BEI SICH
SELBST SEIN.



„MEIN LEBEN
FORDERT VIEL VON
MIR – BERUFLICH
WIE PRIVAT.
DESHALB
BRAUCHE ICH EIN
HÖRSYSTEM, DAS
MIT MIR MITHALTEN
KANN.“

Tanja Bülter
TV Moderatorin, trägt Widex Moment Sheer



GUTES HÖREN SAH NOCH NIE BESSER AUS.

Design

Widex Moment Sheer macht Hören komfortabler und ist gleichzeitig auch für das Auge ein Genuss. Der moderne und cleane Look & Feel komplementiert die herausragende akustische Performance von Widex Moment Sheer. Hochwertige Oberflächen mit mattem Finish verleihen unserer neuen Ladestation eine metallische Premium-Anmutung mit angenehmer Haptik. Auch das Zubehör, TV-Play und SoundAssist orientieren sich an dieser minimalistischen Designsprache.

Die neue, hochwertige Verpackung für alle Hörsystem-Modelle der Hörsystemserie sowie für TV Play und Sound Assist unterstreicht deren Premiumcharakter und macht bereits das Auspacken zu einem ganz besonderen Erlebnis. Nutzen Sie diesen Effekt, um Ihre Kunden zu begeistern.



DER BESTE ASSISTENT, DEN MAN HABEN KANN. HAND DRAUF.

SoundAssist

SoundAssist ist ein neues, kompaktes 6-in-1-Bluetooth-Multimikrofon von Widex. Es ermöglicht stabile, audiologisch überragende Hands-Free-Telefonie sowie Streaming und die Anbindung an verschiedenste Bluetooth-Quellen und optimiert die Sprachverständlichkeit in schwierigen Hörsituationen. SoundAssist passt in jede Jacken- oder Handtasche und ist kompatibel mit allen bluetoothfähigen Moment/Moment Sheer- und Magnify-Hörsystemen. Mit diesen wertvollen Funktionen gibt SoundAssist Hörsystem-Trägern Lebensqualität zurück:

Funktionen:

- Partnernmikrofon
- Tischmikrofon
- Integrierte Telespule für induktiven Empfang, z.B. bei Veranstaltungen, im Theater oder in der Kirche
- Hands-Free-Telefonie
- Audioübertragung von jedem Bluetooth-Gerät, z.B. Smartphone, Laptop, Musikanlage
- Fernbedienungsfunktion für das Hörsystem

Nutzen:

- Übertragung von klarer Sprache direkt in die Hörgeräte
- Komfortable Hands-Free-Telefonie
- Multifunktionale Audioübertragung
- Induktiver Empfang für mehr Hörgenuss und Sprachverstehen bei Veranstaltungen, im Theater oder in der Kirche





DER STOFF, AUS DEM AUDIO-TRÄUME SIND.

TV-Play

Dank TV-Play können Hörsystem-Träger den TV-Sound via Bluetooth direkt auf ihr Hörgerät streamen. Dabei lassen sich auch mehrere Hörsysteme gleichzeitig mit TV-Play verbinden. Der brillante Stereoklang kann über MySound in der Moment-App an die individuellen Präferenzen und Ansprüche angepasst werden.

Der neue, hochwertige Textilbezug des innovativen dänischen Textildesign-Unternehmens Kvadrat verleiht unserem TV-Play einen ansprechenden Look. Zusätzlich ist er langlebig, pflegeleicht und trifft in jedem Wohnumfeld den richtigen Ton.

DIE NEUESTE
TV-PLAY-
GENERATION
SETZT NICHT
NUR BEIM SOUND
MASSSTÄBE,
SONDERN AUCH
BEIM DESIGN.



NOCH MEHR FREIHEIT MIT NEUEN SLEEVES.

Zusammen mit Widex Moment Sheer führen wir auch neue Sleeves ein:

In den Fällen, in denen keine individuelle Maßtopplastik verwendet werden kann, sorgen die Widex Sleeves in Verbindung mit der präzisen Verstärkungsberechnung über TruAcoustics für hohe akustische Stabilität und Rückkopplungssicherheit. Mit dem Fokus auf Komfort, Vent-Effekt, Okklusion und das Rückkopplungsmanagement bietet das neue Sortiment an Sleeves eine gute Verteilung des Vent-Effekts von der geschlossenen bis zur offenen Anpassung.

Die neuen Sleeves decken ein breites Spektrum von Hörverlusten ab und bieten Ihnen als Hörgeräteakustiker noch mehr Freiheit und Flexibilität für Ihre Anpassung.



Neue Sleeves für eine hohe Flexibilität, akustische Stabilität und Rückkopplungssicherheit

V2 Easywear-Hörer mit optimiertem Knickschutz für maximale Stabilität


	XS	S	M	L
BALLON-SCHIRMCHEN, OFFEN, 3 GRÖSSEN				
SLEEVE, VENT, 4 GRÖSSEN				
SLEEVE, GESCHLOSSEN, 4 GRÖSSEN				



„NUR WER GENAU ZUHÖRT, KANN AUCH EIN GUTER GESPRÄCHSPARTNER SEIN.“

Tanja Bülter, TV Moderatorin trägt Widex Moment Sheer

SO VIELFÄLTIG WIE IHRE KUNDEN: DIE MODELLPALETTE VON WIDEX MOMENT SHEER.

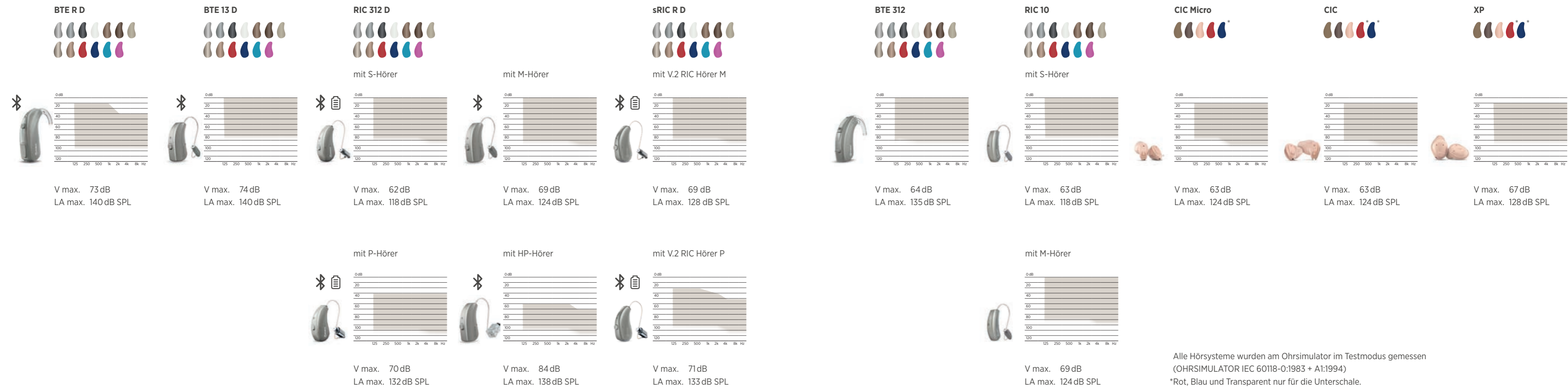

Alle Hörsysteme wurden am Ohrsimulator im Testmodus gemessen (OHRSIMULATOR IEC 60118-0:1983 + A1:1994)
*Rot, Blau und Transparent nur für die Unterschale.



KLINGT WIE

EIN MORGEN
VOLLER ENERGIE
UND INSPIRIERENDER
SCHÖNHEIT.



SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de

