

**TV-Controller**

LED

Stummschaltung der  
Hörgeräte-Mikrofone

**Basis-  
station**

Ein-/Ausschalten  
des TV-DEX

Audiosignal lauter


Audiosignal leiser



**TV-DEX – Fernsehen und Musik hören  
in Echtzeit und Stereo-Qualität**



Mini-USB-Stecker

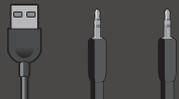

# WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER


[www.widex-hoergeraete.de](http://www.widex-hoergeraete.de)



Widex Hörgeräte GmbH • Albstadtweg 6 • 70567 Stuttgart  
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart  
Tel. +49 711 7895-0 • [info.de@widexsound.com](mailto:info.de@widexsound.com)

Änderungen vorbehalten.

10243973-01-WM 05/2022

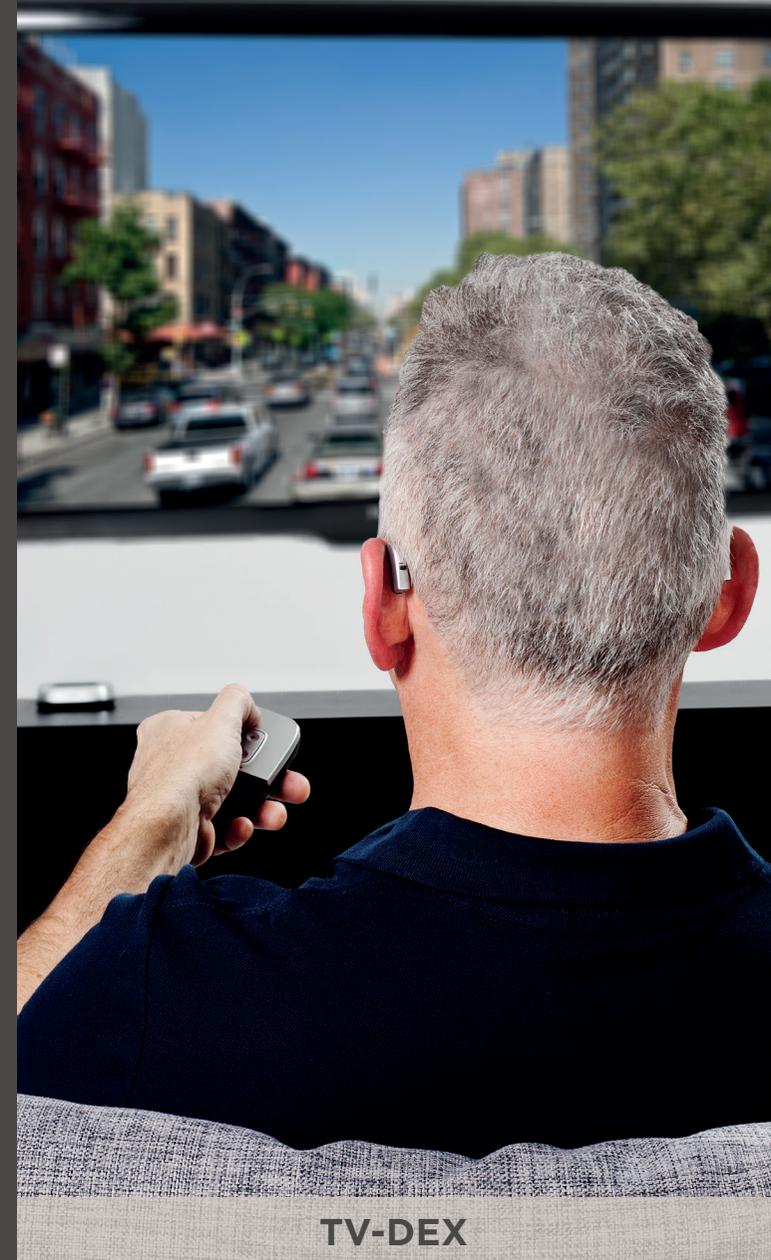

**TV-DEX**

Brillante Verbindung mit dem Fernseher

# WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

## Fernsehen und Musik hören in Echtzeit und Stereo-Hi-Fi-Qualität!

TV-DEX macht Fernsehen wieder zum Genuss. Ob Sie eine spannende Dokumentation verfolgen oder Ihre Lieblingsserie anschauen, Sie werden den Eindruck haben, mittendrin zu sein. Mit TV-DEX empfangen Ihre Hörsysteme drahtlos **Audiosignale direkt vom Fernsehgerät**. Sie hören Ihre Fernsehsendung **kristallklar in Stereo-Qualität und ohne Echoeffekte**. TV-DEX bietet außerdem die Möglichkeit, parallel Ihren Fernseher und Ihre Stereo-Anlage anzuschließen. Per Knopfdruck können Sie bequem zwischen beiden Audiosystemen umschalten.

## So einfach funktioniert TV-DEX

Die Basisstation ist an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihre Musikanlage angeschlossen. Dank „EasyConnect“ erfolgt die Kopplung zwischen Hörsystem und TV-DEX schnell und unkompliziert.

Der Fernsehton wird unverfälscht kabellos in beide Hörsysteme übertragen. Die Reichweite beträgt bis zu 10 m. Die Audioübertragung erfolgt im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ohne Echoeffekte. Sie hören Ihre Fernsehsendung oder Ihre Lieblingsmusik in brillantem Stereo-Klang.

Mit dem TV-Controller können Sie individuell die von Ihnen gewünschte Lautstärke einstellen und per Knopfdruck störende Umgebungsgeräusche abschalten.

## Ihre Vorteile im Überblick

- Lippensynchrone Übertragung des Fernsehtons in beide Hörsysteme gleichzeitig
- Brillante Stereo-Klangqualität
- Für Hi-Fi-Anlage und Fernseher einsetzbar, einfaches Umschalten per TV-Controller
- Komfortabler Kopfhörer-Effekt: Stummschaltung der Hörgeräte-Mikrofone per Tastendruck am TV-Controller für ungestörtes Zuhören
- Stromsparend: keine zusätzliche Belastung der Hörsystem-Batterien

