

ANLEITUNG FÜR DEN AUSTAUSCH VON EASYWARE-BUCHSEN

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um Easyware-Buchsen auszutauschen:

1. Bohren Sie die alte Buchse mit einem Bohrer senkrecht aus der Otoplastik.
2. Achten Sie darauf, dass keine roten/blauen Silikonreste in der Öffnung verbleiben. (Gegebenenfalls die Öffnung vorsichtig mit einem Skalpell ausschaben)
3. Entfernen Sie Staub und Silikonreste an der Buchsenöffnung durch Auspusten oder im Ultraschallbad.
4. Tragen Sie frischen Sekundenkleber am inneren Schalenwandring auf.
5. Führen Sie die Buchse mit „kleinem Rand“ nach oben senkrecht in die Öffnung ein und drücken das Gehörgangs-Ende der Schale (Schallaustritt) auf eine ebene Fläche.
6. Vor der Hörer-Montage den Kleber 1-2 Minuten trocknen lassen.