


# WIDEX TV PLAY


## Kopplung:

Die Kopplung erfolgt durch den Neustart der Hörsysteme in Reichweite der TV PLAY. Ist die Kopplung erfolgreich, ertönt die Ansage „Fernsehen“ in den Hörsystemen und es findet eine direkte Übertragung der Audioinhalte statt (Plug&Play).

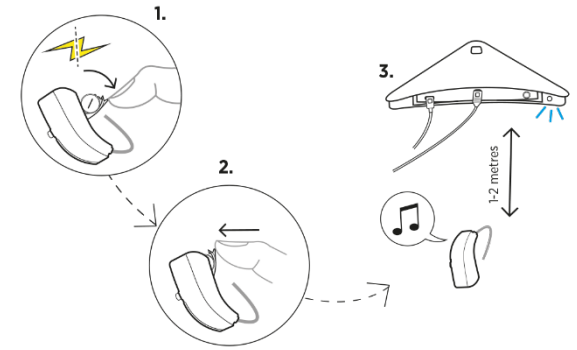

## Verbindungsaufbau:

Für die weitere Nutzung ist die manuelle Wahl des TV PLAY Programms notwendig. Diese kann entweder über die App, RC-DEX oder den Taster des Hörsystems erfolgen. Das TV PLAY Programm befindet sich hierbei an letzter Stelle, hinter den eigentlichen Hörprogrammen.

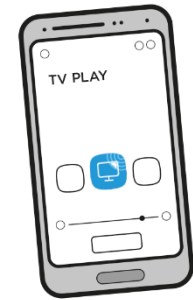

## Hinweise:

In Einzelfällen kann eine Unterbrechung des Streamings vorkommen. Für einen durchgängigen Streaming-Genuss ist ein einmaliges Koppeln mit einem Smartphone vorzunehmen, welches die Stabilität dauerhaft garantiert.

Die einmalige Kopplung mit dem Smartphone kann über ein fremdes Smartphone erfolgen und im Anschluss wieder aufgehoben werden.

