

Wie kopple ich die Hörsysteme mit TV PLAY?

TV PLAY wird über das Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt. Danach starten Sie bitte die Hörsysteme in der Nähe der TV PLAY (max. ein Meter) neu. Die erfolgreiche Kopplung wird vom Hörsystem mit einem Signalton und der Sprachansage „Fernsehen“ bestätigt.

Welche Bedeutung hat die LED an TV PLAY?

LED	STEHT FÜR
Erlöschendes weißes Licht	Dieses Licht sehen Sie, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten oder nach einem Reset.
Ein blaues Aufblinken für jedes Hörsystem	Das Gerät sendet Kopplungsinformationen an Ihre Hörsysteme.
Erlöschendes blaues Licht	Ein kurzer Druck auf die Reset-Taste lässt die LED blau aufblinken und die Übertragung wird für 30 Sekunden angehalten. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihr Gerät.
Erlöschendes grünes Licht	Das Gerät ist eingeschaltet, aber das Streaming funktioniert nicht.
Konstantes grünes Licht	Das Gerät ist eingeschaltet und das Streaming funktioniert.
Blinkendes rotes Licht	Unbekanntes Tonformat
Erlöschendes rotes Licht	Das Gerät ist überhitzt. Lassen Sie das Gerät vor Gebrauch abkühlen. Dieses LED-Leuchtmuster wird auch angezeigt, wenn das Gerät über das USB-Kabel nicht ausreichend mit Strom versorgt wird.
Konstantes rotes Licht	Das Gerät funktioniert nicht. Bitte suchen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker auf.

Siehe auch Bedienungsanleitung des TV PLAY.

Wofür benötige ich die Reset-Taste auf der Unterseite des TV PLAY?1. Zurücksetzen des TV PLAY

Reset-Taste sechs Sekunden lang drücken, bis die LED pulsierend weiß blinkt.

Dadurch wird das TV PLAY zurückgesetzt und die Kopplungen mit allen bisher gekoppelten Hörsystemen werden gelöscht. Hinweis: Wenn Sie Ihr TV PLAY zurücksetzen, müssen Sie danach die Hörsysteme neu mit dem TV PLAY koppeln.

2. Neustarten des TV PLAY

Reset-Taste kurz (ca. eine Sekunde) drücken, die LED blinkt pulsierend blau.

Dadurch wird die TV PLAY neu gestartet, jedoch bleiben alle vorhandenen Kopplungen erhalten.

Dies kann durchgeführt werden, wenn die TV PLAY nicht korrekt arbeitet oder die Verbindung zu den Hörsystemen bzw. der App unterbrochen ist.

Wie starte ich das Streaming?

Um die Übertragung des Fernsehtons auf die Hörsysteme zu starten, schalten Sie bitte in das TV PLAY-Programm (SmartSpeak-Ansage „Fernsehen“). Dies kann auf drei Arten durchgeführt werden:

a) via Taster b) via RC-DEX c) via App

Was passiert, wenn ich den Übertragungsbereich verlasse?

Die Reichweite von TV PLAY zu den Hörsystemen beträgt acht bis zehn Meter (abhängig von baulichen Gegebenheiten und eventuell vorhandenen Störfeldern; z. B. WLAN-Router). Verlässt man den Übertragungsbereich, wird die Übertragung des Fernsehtons an die Hörsysteme gestoppt, die Hörsysteme bleiben jedoch im TV PLAY-Programm. Sobald man wieder in den Übertragungsbereich zurückkommt, wird der Fernsehton wieder übertragen.

Was kann ich tun, wenn ich den Fernsehton nicht mehr hören möchte?

Wechseln Sie in ein anderes Programm (via Taster, RC-DEX oder App).

Was kann ich tun, wenn ich kein Fernsehsignal höre?

Bitte überprüfen Sie folgende Punkte:

- Ist das Hörsystem im Programm „Fernsehen“?
- Leuchtet die LED am TV PLAY konstant grün?
- Falls die LED nicht grün leuchtet, überprüfen Sie bitte die Stromversorgung des TV PLAY und die Kabelverbindungen zwischen TV PLAY und Ihrem Fernsehgerät.
- Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des TV PLAY.

Kann ich mein Hörsystem mit mehreren TV PLAY-Geräten verbinden?

Nein, die Hörgeräte können nur mit einem TV PLAY-Gerät gleichzeitig verbunden werden. Wenn Sie mehrere TV PLAY-Geräte haben, muss bei einem Wechsel von TV PLAY eine neue Paarung im Hörsystem durchgeführt werden.

Können mehrere Hörgeräte-Paare mit einer TV PLAY verbunden werden?

Ja, es gibt bei TV PLAY keine Einschränkung, wie viele Hörgeräte verbunden werden können. Daher können mehrere Benutzer dasselbe TV PLAY nutzen.