

WIDEX SOUND ASSIST

Der Widex Sound Assist ist ein kompaktes 6-in-1-Bluetooth-Multimikrofon von Widex. Es optimiert die Sprachverständlichkeit in schwierigen Hörsituationen, ermöglicht stabile, audiologisch überragende Hands-Free-Telefonie sowie Streaming von jedem Bluetooth-Gerät. Sound Assist passt in jede Jacken- oder Handtasche und kann als Partner- und Tischmikrofon eingesetzt werden. Als Partner-Mikrofonfunktion wird das handliche Zubehör einfach mit dem integrierten Clip am Kleidungsstück befestigt oder mithilfe der beiliegenden Trageschleife umgehängt. Mit seinen vielseitigen Funktionen gibt Sound Assist Hörsystem-Trägern pure Lebensqualität zurück.



Funktionen:

1. Partnermikrofon
2. Tischmikrofon
3. Telefonieren im Freisprechbetrieb
4. Streaming von jedem Bluetooth-Gerät
5. Fernsteuerung für Hörsysteme
6. Telefonspule




MOMENT/MAGNIFY-App ab v1.6: Funktionen mit Sound Assist

- Sound Assist-Funktionsanzeige
- Equalizer verfügbar
- Programmverwaltung
- My Guide-Videos und -Anleitungen
- Geräteinformationen
- Anleitung zum Koppeln
- Firmware-Updates

Technische Daten:

- Akkulaufzeit: 10 Stunden
- Ladezeit: 3 Stunden
- Bluetooth-Protokoll: Version 4.2
- Lithium-Ionen-Akku
- Micro-USB-Stromversorgung
- Größe: 43/43/16 Millimeter
- Gewicht: 32 Gramm

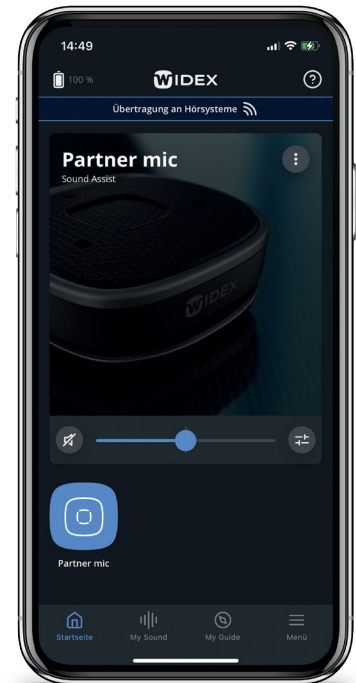

Widex Moment-App

1. BEDIENELEMENTE

a)	Wie kann zwischen den verschiedenen Betriebsarten gewechselt werden?	Durch kurzes Drücken der Ein-Taste kann man zwischen den Funktionen Induktion, Bluetooth und Mikrofon wechseln.
b)	Wie wird die Tastensperre aktiviert?	Die Tastensperre wird durch gleichzeitiges Drücken der „Plus“-Taste und der Programmtaste aktiviert.
c)	Wie können Programme gewechselt werden?	Der Programmwechsel funktioniert über die Programmtaste.
d)	Wie kann die Lautstärke verändert werden?	Die Lautstärke kann über die „Plus“- und „Minus“-Tasten verändert werden.

2. KOPPLUNG

a)	Wie wird der Sound Assist in den Kopplungsmodus versetzt?	Halten Sie die „Plus“-Taste und die Ein-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
b)	Wie verbinde ich meine Hörsysteme mit dem Sound Assist?	Nachdem der Sound Assist in den Kopplungsmodus gesetzt wurde, starten Sie die Hörsysteme neu. Schalten Sie andere Bluetooth-Verbindungen währenddessen aus.
c)	Mit wie vielen Hörsystemen kann der Sound Assist gekoppelt werden?	Der Sound Assist kann mit einem Hörsystem-Paar gekoppelt werden.
d)	Wie wird der Sound Assist mit mobilen Endgeräten gekoppelt?	Der Sound Assist wird erneut in den Kopplungsmodus versetzt und anschließend im Bluetooth-Menü des Endgeräts gekoppelt.

e)	Mit wie vielen Endgeräten kann der Sound Assist gekoppelt werden?	Der Sound Assist kann mit bis zu acht Endgeräten gekoppelt werden.
f)	Wie viele aktive Kopplungen sind möglich?	Es ist eine aktive Kopplung möglich.
g)	Wie können bestehende Kopplungen gelöscht werden?	Der Sound Assist wird ausgeschaltet. Anschließend die „Minus“-Taste und die Ein-Taste für fünf Sekunden lang gedrückt halten.

3. LIEFERUMFANG

a)	Was wird alles mitgeliefert?	Im Lieferumfang sind neben dem Sound Assist eine Nackenschlaufe, ein USB-Kabel, ein Netzteil und eine Bedienungsanleitung enthalten.
----	-------------------------------------	--

4. MIKROFON

a)	Wie kann der Sound Assist verwendet werden?	Der Sound Assist kann als Ansteck-/Partnermikrofon oder Tischmikrofon verwendet werden.
b)	Wie muss der Sound Assist getragen werden?	Der Sound Assist wird mit der beiliegenden Nackenschlaufe umgehängt oder angeklippt und sollte dabei einen Abstand von 20 cm zum Sprecher haben.
c)	Wie muss der Sound Assist auf dem Tisch platziert werden?	Der Sound Assist wird in einem Radius von 1,5 m zu den Sprechern flach auf den Tisch gelegt.
d)	Wie kann der Sound Assist im Mikrofonmodus stumm geschaltet werden?	Der Sound Assist kann über einen kurzen Tastendruck auf die Drucktaste stumm gestellt werden.

e)	Wie können die Mikrofone der Hörgeräte stumm geschaltet werden?	Die Mikrofone der Hörsysteme können im „Mikrofonmodus“ über langes Drücken der „Minus“-Taste oder über die MOMENT/MAGNIFY-App stumm geschaltet werden.
f)	Wie kann ich das Tischmikrofon von omnidirektional auf direktional umstellen?	Die Mikrofone können über langes Drücken der Drucktaste direktional gestellt werden.

5. STREAMING

a)	Wie kann die Wiedergabe angehalten werden?	Die Wiedergabe wird über die Drucktaste angehalten.
----	---	---

6. TEMPERATUR

a)	Bei welcher Temperatur darf der Sound Assist gelagert werden?	Für die Lagerung sind Temperaturen zwischen -20 °C und +55 °C zulässig.
b)	Bei welchen Temperaturen darf der Sound Assist verwendet werden?	Der Sound Assist kann bei Temperaturen zwischen -10 °C und +40 °C verwendet werden.

7. TELEFONIEREN

a)	Wie können Anrufe angenommen bzw. beendet werden?	Anrufe können über die Drucktaste im Bluetooth-Modus angenommen bzw. beendet werden.
----	--	--

8. T-SPULE

-
- | | | |
|----|---|---|
| a) | Wie muss der Sound Assist getragen werden? | Für eine optimale Verbindung muss die Ein-Taste nach oben zeigen. |
| b) | Wie kann die Verbindung unterbrochen werden? | Über die Drucktaste kann die Verbindung unterbrochen werden. |
-