

WIDEX SMARTRIC™ PORTABLE CHARGER GUIDE

Widex SmartRIC ist ein vollständig wiederaufladbares Hörgerät, das mit einem eleganten, tragbaren Ladegerät für das Aufladen unterwegs ausgestattet ist. Das Ladegerät ermöglicht dem Hörgeräte-Träger eine Systemlaufzeit von bis zu einer Woche.

Diese Kurzanleitung gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum portablen Ladegerät WPP401.



ÜBERSICHT

Hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen Komponenten des tragbaren Ladegeräts.



WIDEX SMARTRIC™-HÖRGERÄTE AUFLADEN



Vollständiges Aufladen
in **4 Stunden**.



Wenn der Hörgeräte-Akku
< 40 % Kapazität hat, **wird die
Schnelllade-Funktion aktiviert.**
**30 Minuten aufladen = 8 Stunden
Nutzungsdauer.**



LED-Status-Anzeige

Auf der Vorderseite des Ladegeräts befindet sich eine LED-Leuchtanzeige für jedes Hörgerät. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Leuchtanzeigen.

Wenn das Ladegerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist:

	12 Sek.	Hörgerät ist vollgeladen.
	12 Sek.	Hörgerät lädt.

Wenn das Ladegerät über ein USB-C-Kabel an das Stromnetz angeschlossen ist oder über ein Qi-Pad-Ladegerät geladen wird, leuchten die LEDs konstant.

Andere LED-Status, die auftreten können:

	verblappendes grün	Ladegerät schaltet sich aus.
	orange blinkend	Hörgerät überhitzt (Qi-Ladepad). Ladevorgang wird nach Abkühlen fortgesetzt.
	blinkt rot	Hörgerät überhitzt (USB-C-Ladegerät). Ladevorgang wird nach Abkühlen fortgesetzt.



Jedes Hörgerät lädt einzeln; sollte ein Hörgerät vollgeladen sein, lädt das andere Hörgerät weiter.

AUFLADEN DES LADEGERÄTES WPP401

Der eingebaute Akku des WPP401 kann per USB-C mit dem mitgelieferten Netzadapter oder einem Qi-Ladepad geladen werden. Die Hörgeräte können immer geladen werden, egal ob das WPP401 am Stromnetz direkt angeschlossen ist oder per Qi-Ladepad geladen wird. Wenn die Hörgeräte unterwegs geladen werden sollen, achten Sie darauf, dass der interne Akku des WPP401 aufgeladen ist.



LED-Status-Anzeige

Auf der Unterseite des WPP401 befinden sich drei LEDs, die Informationen über den Akkustand des WPP401 liefern.

Nicht mit dem Stromnetz verbunden:

● ● ●	12 Sek.	drei vollständige Aufladungen der Hörgeräte
● ● ○	12 Sek.	mindestens zwei vollständige Aufladungen der Hörgeräte
● ○ ○	12 Sek.	mindestens eine vollständige Aufladung der Hörgeräte
☀	12 Sek.	weniger als eine vollständige Aufladung der Hörgeräte

Mit dem Stromnetz verbunden (USB-C/Qi-Pad):

● ● ●	interner Akku vollständig geladen
● ● ●	interner Akku wird geladen, < drei vollständige Ladungen möglich
● ● ○	interner Akku wird geladen, < zwei vollständige Ladungen möglich
● ○ ○	interner Akku wird geladen, < eine vollständige Ladung möglich

Andere LED-Status, die auftreten können:

● ● ●	verblässend grün	Innerhalb von 20 Sekunden nach einem langen Tastendruck – das Ladegerät schaltet sich aus.
● ● ●	verblässend orange	Temperatur zu hoch, Aufladen pausiert (Qi-Pad).
● ● ●	konstant grün	Akku vollgeladen, Aufladen gestoppt (Qi-Pad).
● ● ●	blinkt rot	Fehler beim Laden über Qi-Pad. Spannungsprobleme.
● ● ●	blinkt rot	Temperatur des internen Akkus zu hoch/zu niedrig. Aufladen gestoppt.