

# EASY CONNECT

TV-Dex und RC-Dex können über Easy Connect auch außerhalb der COMPASS GPS mit den Hörsystemen gekoppelt werden.


## TV-Dex

Zunächst müssen Sie die Hörsysteme aus- und wieder einschalten. Anschließend halten Sie die + und - Taste des TV-Dex-Controllers gleichzeitig für ca. 2 Sekunden gedrückt.

**Wichtig: Der TV-Dex-Controller muss für die Abstimmung ausgeschaltet sein. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt in den Hörsystemen ein Bestätigungssignal.**

TV-Controller:

1. Übertragung ein/aus
2. Hörgeräte-Mikrofon aus
3. Lautstärke erhöhen
4. Lautstärke reduzieren

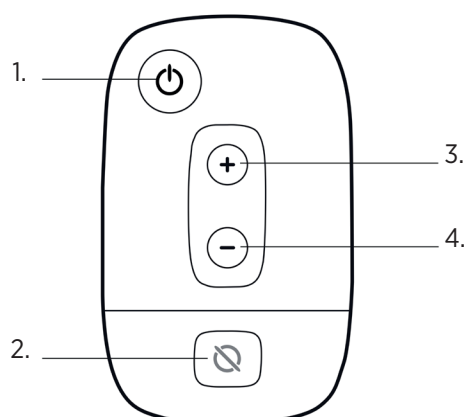

## RC-Dex

Um die Hörsysteme mit der RC-Dex über Easy Connect zu koppeln, müssen Sie die Hörsysteme aus- und wieder einschalten. Danach drücken Sie die + und - Taste ca. 2 Sekunden. Konnte die Kopplung erfolgreich durchgeführt werden, ertönt ein Bestätigungssignal in den Hörsystemen.

**Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Tastensperre bei der RC-Dex 2 nicht aktiviert ist.**

1. Leuchtdiode
2. Lautstärke erhöhen
3. Tastensperre
4. Programmwahl
5. Lautstärke reduzieren

