


TV-DEX - BEVORZUGTE INSTALLATION AM TV-GERÄT ÜBER CINCH-ANSCHLUSS



Rückansicht TV-Gerät

Manche TV-Geräte verfügen über mehrere Cinch-Anschlüsse. Bitte stellen Sie sicher, dass der gewählte Ausgang ein Cinch-Ausgang ist. Diese sind mit „Out“ oder  gekennzeichnet.




Zubehör




Basis-Station
Eingang TV

Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkestecker des Cinch-Kabels mit der Basis-Station am Eingang TV.

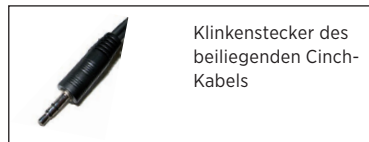


Hinweis: Die Cinch-Anschlüsse seitlich oder frontal am TV-Gerät haben eine Input-Funktion und sind für TV-Dex nicht geeignet.

TV-DEX - INSTALLATION AM TV-GERÄT ÜBER SCART-ADAPTER

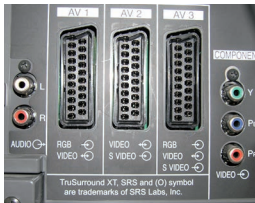


Rückansicht TV-Gerät

Verbinden Sie das mitgelieferte Cinch-Kabel mit dem Scart-Adapter und schließen den Scart-Adapter am Fernsehgerät an.

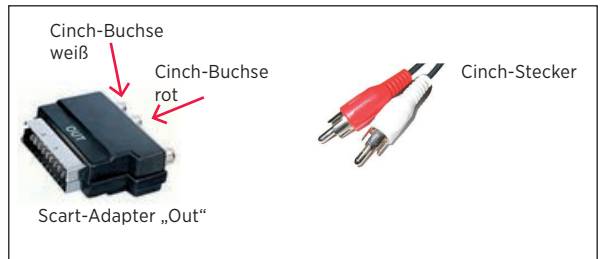


Zubehör

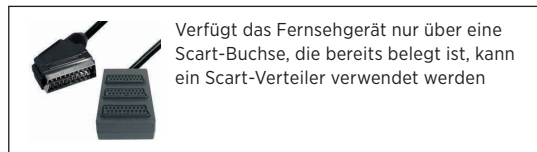

Basis-Station
Eingang TV

Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkenstecker des Cinch-Kabels mit der Basis-Station am Eingang TV.

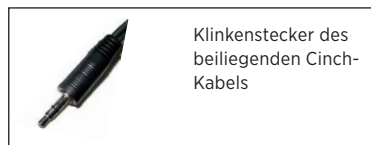

Hinweis: Befinden sich mehrere Scart-Buchsen an Ihrem Fernsehgerät, können diese menügesteuert auf ein Ausgangssignal konfiguriert werden. Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder sprechen Sie mit Ihrem Fernseh-Fachhändler.

TV-DEX – INSTALLATION AM TV-GERÄT ÜBER DEN KOPFHÖRERANGANG

Sie können die TV-Dex über das mitgelieferte Klinke-Klinke-Kabel am Kopfhörerausgang Ihres TV-Gerätes anschließen.



Kopfhörerausgang am
TV-Gerät

Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkestecker mit dem Kopfhörerausgang des TV-Gerätes.



Basis-Station
Eingang TV

Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkestecker mit der **Basis-Station** am Eingang TV.

21000885 WM 01/2021, Änderungen vorbehalten.

Hinweis: Viele TV-Geräten können nicht gleichzeitig ein Audiosignal über den Kopfhörerausgang und den TV-Lautsprecher ausgeben.