

# Hinweise zur TV-Dex


## Hinweis zur Kopplung des TV-Controllers mit den Hörgeräten

Der TV-Controller kann über COMPASS GPS im Menüpunkt „Handhabung“ über „Abstimmung starten“ mit den angeschlossenen Hörsystemen gekoppelt werden.

Die TV-Dex kann zudem außerhalb der COMPASS GPS mit den Hörsystemen gekoppelt werden. Hierzu einfach nach dem Neustart der Hörsysteme 10 Sekunden warten und dann an der TV-Dex die + Taste (3.) und die - Taste (4.) gleichzeitig ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Wichtig: Die TV-Dex muss für die Abstimmung ausgeschaltet sein (1.). Nach erfolgreicher Kopplung ertönt in den Hörsystemen ein Bestätigungssignal.

TV-Controller:

1. Übertragung ein/aus
2. Hörgeräte-Mikrofon aus
3. Lautstärke erhöhen
4. Lautstärke reduzieren

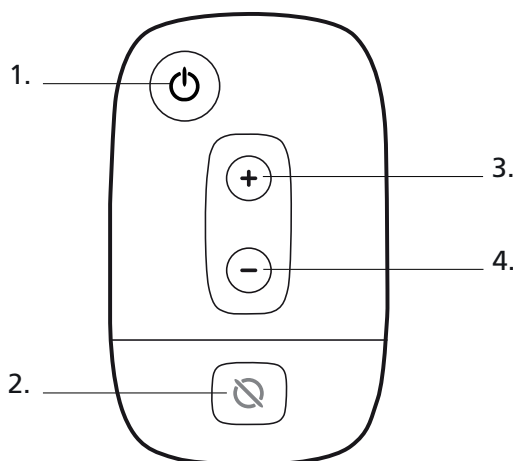

## Hinweis zur Verwendung der TV-Dex mit mehreren Fernsehern

Wenn Ihr Kunde die TV-Dex an mehreren Fernsehern benutzen möchte, gibt es dafür unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung:

- 1) Die Anschaffung eines zweiten Kabelsets für die TV-Dex ist sinnvoll. So kann der Kunde zwischen den Fernsehern wechseln, indem er die Basisstation mitnimmt und dann die entsprechenden Kabel in die Basisstation einsteckt. So umgeht man den Aufwand, die Kabel am Fernseher immer wieder ein- und ausstecken.
- 2) Die Anschaffung einer zweiten TV-Dex ist ebenso möglich. Allerdings muss beim Wechsel des TV-Controllers eine erneute Abstimmung mit den Hörgeräten durchgeführt werden (Abstimmung s.o.).

## Hinweis zur Nutzung von mehreren TV-Dex-Systemen

Der Abstand zwischen zwei TV-Basisstation bzw. zwei TV-Controllern sollte immer 1,5 – 2 m betragen.

## Hinweis zur Telefonie während der Nutzung der TV-Dex

Wenn die Hörgeräte mit einem iPhone gekoppelt sind und es geht während des TV-Dex Streamings ein Telefonat ein, dann hat der Anruf eine höhere Priorität und die Übertragung des Audiosignals wird unterbrochen.