


### **Widex ToneLink-App**

Alternative Hörsystem-Steuerung ohne Bluetooth


Sollten Sie Ihr Hörsystem per Smartphone steuern wollen, ist dies auch ohne Bluetooth möglich. Hierfür wird die

Widex ToneLink-App benötigt, die im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden kann. Ohne Bluetooth werden die Hörsysteme mit hochfrequenten Tönen gesteuert. In diesem Fall ist Audiostreaming nicht möglich. Die Steuerung über die ToneLink-App ist für alle Moment-Hörsysteme möglich.

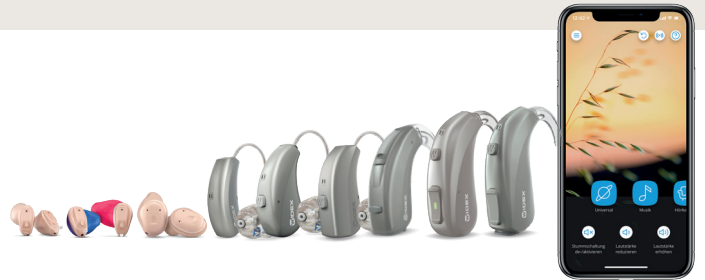

#### **Kopplung der Hörsysteme in der ToneLink-App (Abbildung 1-8):**

Öffnen Sie die ToneLink-App und gehen Sie auf „Erste Schritte“. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen. Wenn Sie einen QR-Code von Ihrem Hörakustiker erhalten haben, gehen Sie auf „Scannen“, ansonsten gehen Sie auf „Überspringen“. Starten Sie die Hörsysteme neu und gehen Sie auf „Weiter“. Klicken Sie auf „Paaren“. Wenn Sie einen Ton in Ihren Hörsystemen gehört haben, gehen Sie auf „Ja“ und die Paarung ist damit erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie zum Abschluss auf „Los geht's!“.

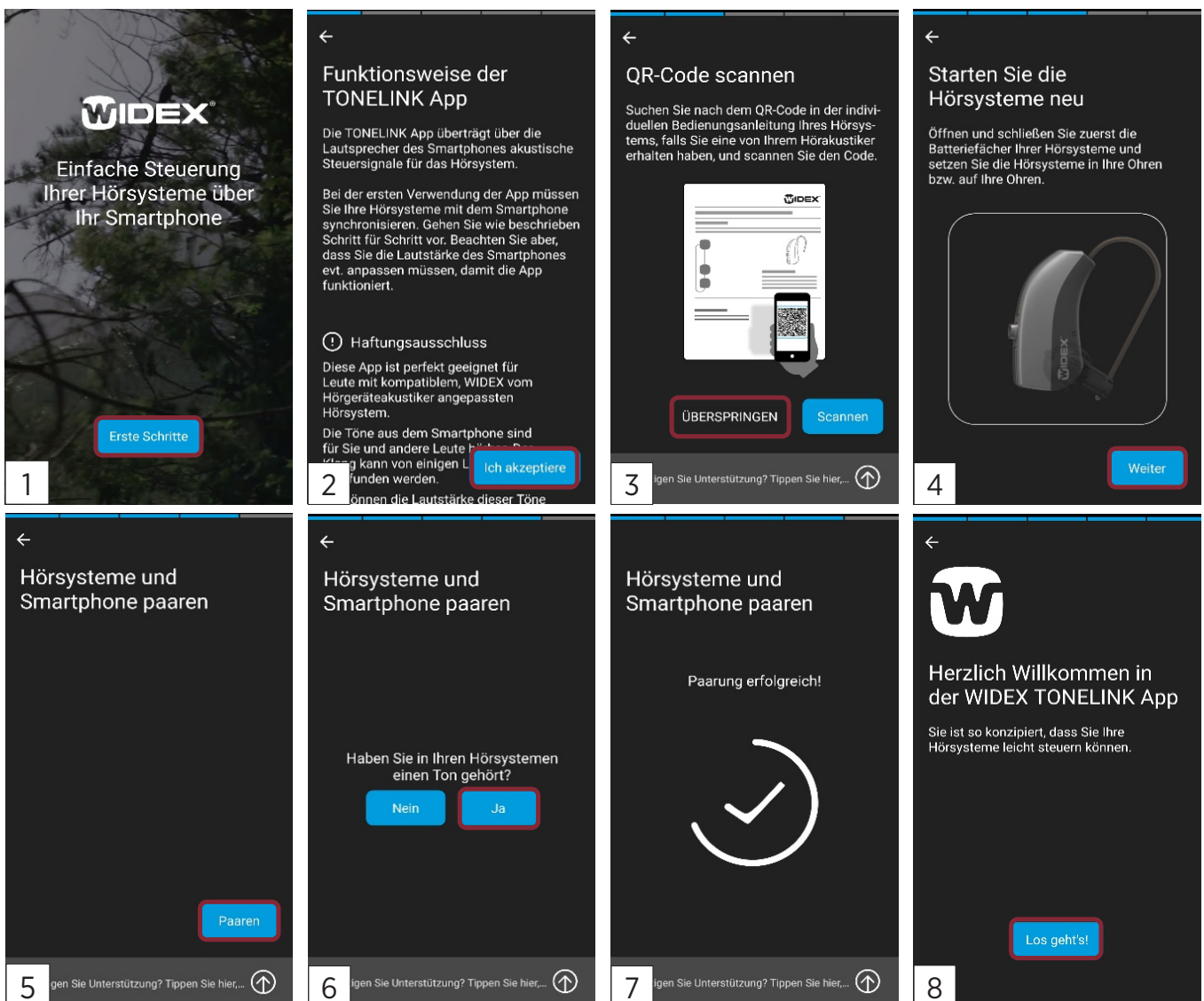

**Welche Smartphones sind kompatibel?**

Mindestanforderungen: Welche Smartphones und welches entsprechende Betriebssystem mit der ToneLink-App kompatibel sind, entnehmen Sie bitte folgender Liste unter:

<https://www.widex.com/de-de/service-und-support/kompatibilitaetslisten/>.

Die Kompatibilität der aufgeführten Smartphones wurde von Widex geprüft. Für den Einsatz von Smartphones anderer Hersteller prüfen Sie bitte die Mindestanforderungen und testen Sie die Kompatibilität gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker im Fachgeschäft.