

## LIEBLINGSPROGRAMM ZUR FEINANPASSUNG NUTZEN


**Zur Erinnerung:** Das Lieblingsprogramm, das der Hörsystem-Träger<sup>1</sup> in der Moment- oder Magnify-App nach seinen Hörbedürfnissen selbst konfigurieren kann, ist nur in der App gespeichert und ansteuerbar. Möchte er nun das Hörprogramm über den Taster seines Hörsystems oder über die Fernbedienung RC-DEX aktivieren, ist dies nicht möglich.

Anhand der Einstellung des Equalizers können Sie Ihrem Kunden jedoch ein festes Hörprogramm erstellen, das seinem Lieblingsprogramm in der Moment-App nahekommt. Es ist wichtig, dass Sie überprüfen, auf welchem Basisprogramm das Lieblingsprogramm beruht. Um dies festzustellen und um des Weiteren die Einstellung des Equalizers zu sehen\*, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

1. Der **Endkunde** muss in allen Punkten der Datenfreigabe in der Moment-App zustimmen.
2. Der **Hörakustiker** muss sich für die cloudbasierten Dienste in COMPASS GPS anmelden.

### Vorgehensweise für den Endkunden:

1. In der Moment-App unter **Menü**
2. kann der Endkunde die **Datenfreigabe** überprüfen
3. und die **Datenschutzerklärung** nachlesen.

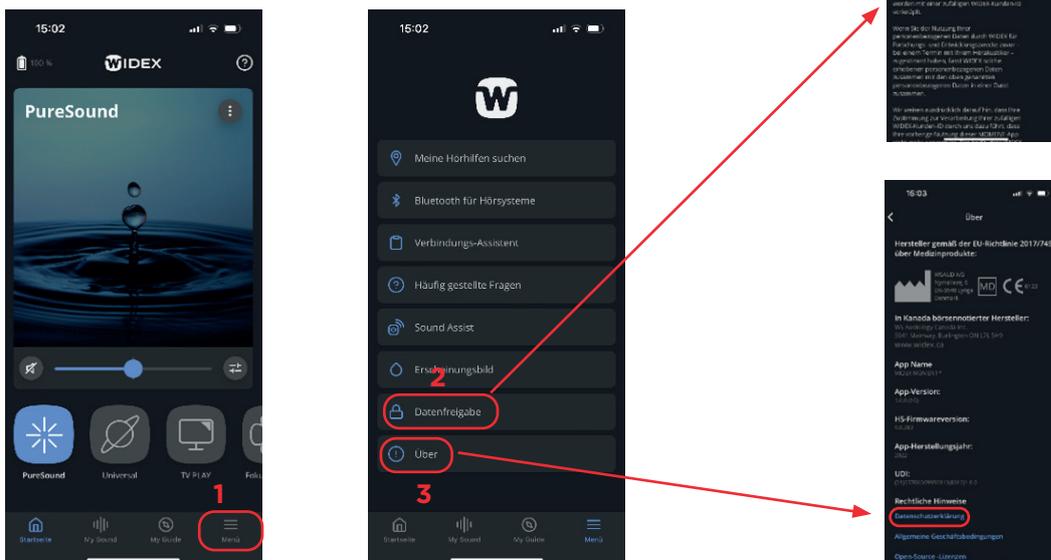


<sup>1</sup>Im Sinne des Leseflusses wird in diesem Artikel das generische Maskulinum verwendet. Sofern nicht anders angegeben, sind in den Ausführungen jedoch stets alle Geschlechter inbegriffen.

\*Wird ein Lieblingsprogramm über My Sound erstellt, basiert dieses immer auf dem Universalprogramm.

## Vorgehensweise für den Hörakustiker:


1. Melden Sie sich in der Widex-Cloud in COMPASS GPS an (grüner Haken).
2. Unter „LOG“
3. und „Real-Life Insights“
4. finden Sie alle Informationen zur **Programmeinstellung\*** des Lieblingsprogramms.

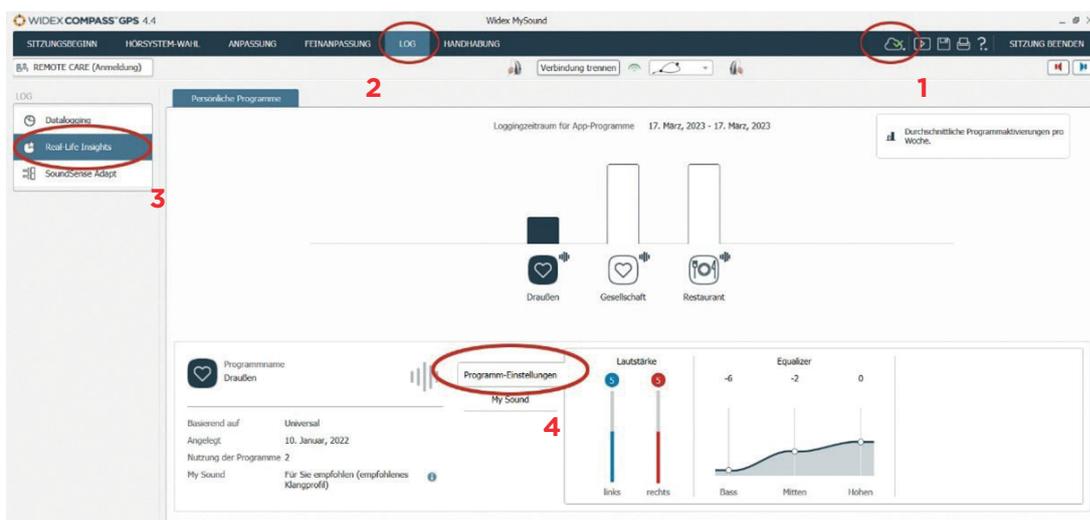

## Folgende Informationen helfen bei der Konfiguration:

Die Steller für den Bass, die Mitten und die Höhen lassen sich jeweils sechs Stufen nach oben und nach unten verschieben.

Bei den **Bässen**, die den Bereich von **125 Hz bis 640 Hz** umfassen, entspricht eine Stufe ca. **+ 2/-2 dB**. So kann eine max. Änderung von ca. **+ 12/-12 dB** vorgenommen werden.

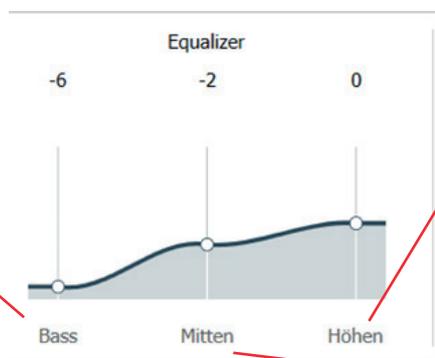

Die **Höhen** können im Bereich **2.500 Hz bis 8.500 Hz** um **+ 6 dB und -12 dB** geändert werden. Wie bei den Mitten ist eine Veränderung von **+1 dB pro Stufe** nach oben und **-2 dB pro Stufe** nach unten möglich.

Der Bereich der **Mitten** erstreckt sich von **640 Hz bis 2.500 Hz**. Der Steller kann um bis zu **-12 dB** nach unten geregelt werden. Dies entspricht ca. **-2 dB pro Stellstufe**. Nach oben sind **+6 dB** möglich (+1 dB pro Stufe).

\*Die Programmeinstellung kann nicht sofort ausgelesen werden. Der Kunde muss für einige Stunden die Lieblingsprogramme nutzen, sodass diese in der Cloud gespeichert werden und der Hörakustiker die Informationen abrufen kann.