


KURZANLEITUNG ZUR ANPASSUNG VON WIDEX MOMENT

IN 3 SCHRITTEN ZUM FIRST FIT


1. Schritt: Verbindung der Hörsysteme

Klicken Sie auf „Verbinden“, um WIDEX MOMENT-Hörsysteme über eine unserer Schnittstellen (Bsp. ProLink, Noah Link Wireless oder USB Link) mit der Software zu verbinden. Vergewissern Sie sich, dass die von GPS empfohlene Konfiguration mit der übereinstimmt, die Sie Ihrem Kunden angepasst haben. Bei Abweichungen wählen Sie in COMPASS GPS bitte die tatsächlich vorhandene akustische Ankopplung aus.

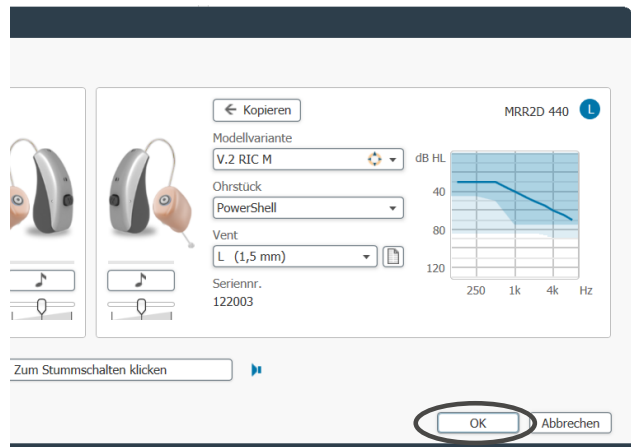


2. Schritt: Rückkopplungstest

Klicken Sie auf „Rückkopplungstest starten“. Sie können die Messung bei einer binauralen Anpassung für beide Ohren gleichzeitig durchführen oder jede Seite einzeln messen.

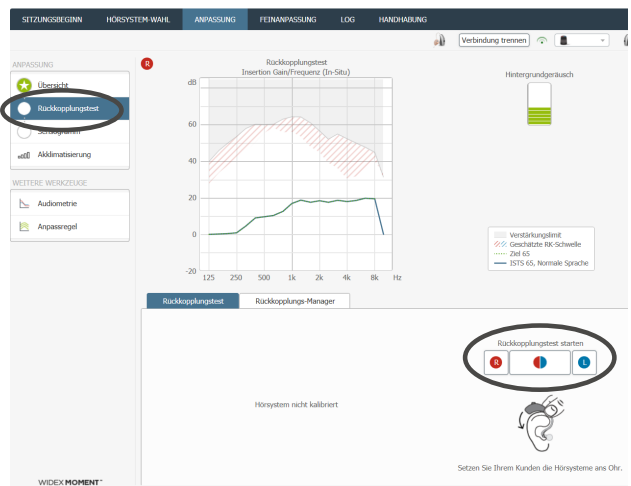

3. Schritt: Sensogramm

Das Sensogramm misst die Hörschwelle „in situ“. Um das Sensogramm durchzuführen, klicken Sie auf die jeweilige Frequenz und präsentieren dem Kunden, ähnlich wie bei einem Hörtest, den Signalton.

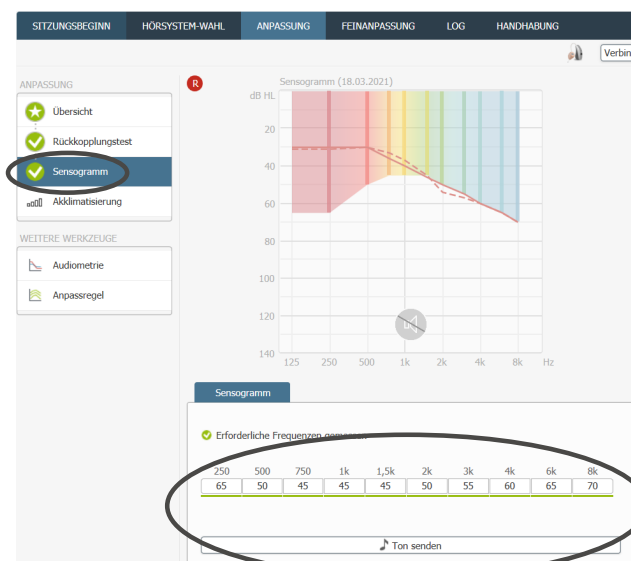

Tipp:

Was genau sich hinter unserem Rückkopplungstest und Sensogramm verbirgt und wie sich dies auf TruAcoustics auswirkt, finden Sie ausführlich beschrieben in unserem COMPASS GPS Handbuch.