


SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM INDIVIDUELLEN KLANGERLEBNIS

Um das Streaming-Signal für Ihre Kunden anzupassen, gehen Sie in COMPASS GPS bitte wie folgt vor:


1. Erstellen einer Programmkopie

Als erstes erstellen Sie bitte eine Kopie des Universalprogramms (die Kopie erscheint unter dem Namen „Universal-2“).

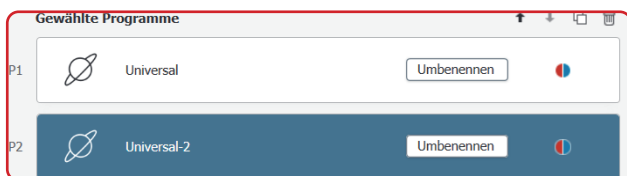


2. Verschieben der Kopie auf den ersten Programmplatz

Wir empfehlen Ihnen, die Kopie des Universalprogramms (Universal-2) anschließend auf den ersten Programmplatz zu verschieben. So stellen Sie sicher, dass das Hörsystem nach dem Einschalten mit der Kopie startet.

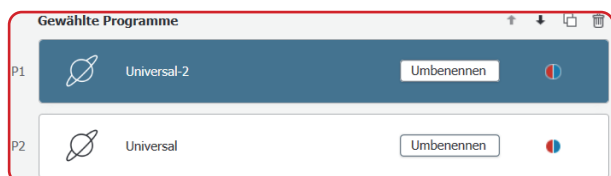

3. Umbenennen der Kopie

Als nächstes können Sie die Kopie umbenennen, z. B. in „Hauptprogramm“. Hierdurch kann Ihr Kunde die Programme beim Durchschalten besser unterscheiden.

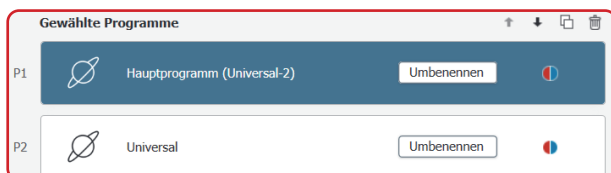

4. Anpassen des ursprünglichen Universalprogramms

Nun können Sie nach Belieben die gewünschten Klangeinstellungen im ursprünglichen Universalprogramm vornehmen. Diese Änderungen wirken sich direkt auf das Streaming-Signal aus.

Hinweis: Beim Streaming wird immer auf das ursprüngliche Universalprogramm U1 zurückgegriffen.