

WIDEX CROSの使い方


WIDEX CROSの概要・各部名称

WIDEX CROSで拾った音を聞こえる側の耳に装着した補聴器へワイヤレスで転送します。




WIDEX CROSの使用方法

1. WIDEX CROSにPR41の電池を入れ、電池ホルダーを閉じます。

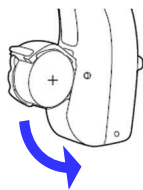

2. 補聴器とWIDEX CROSを耳に装着します。

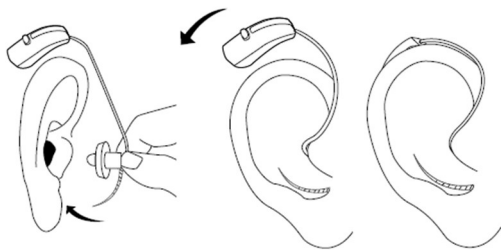

3. 補聴器とWIDEX CROSを耳に装着した段階で、通信が開始されます（自動送信オンの時）。指でWIDEX CROSのマイク部分を軽く触って『ガサガサ』という音が補聴器から聞こえてくるか、確認してください。



聞こえたら、そのままご使用ください。

音が聞こえてこない場合は、WIDEX CROSのプログラムボタンを押してください。補聴器から『ポーン』という通信開始のお知らせ音が聞こえてきます。（お知らせ音設定時）再度マイク部分を軽く触って補聴器から音が聞こえてくるか確認してください。

WIDEX CROSのプログラムボタンを押すことでCROS通信の開始と停止が行えます。

4. WIDEX CROSのFAモデルでは音量調節ができます。



ボリュームコントロールの上側を押すと、音量が段階的に上がります。下側を押すと、音量が段階的に下がります。

5. 使用しないときは、電池ホルダーを開け、電源を切ります。WIDEX CROSから電池を外して、補聴器と一緒に乾燥ケースで保管してください。
6. WIDEX CROSには、電池アラームはありません。WIDEX CROSのマイク部を軽く触って『ガサガサ』という音が聞こえてこないとき、または、補聴器の電池交換時に一緒に交換してください。

● **WIDEX CROSと補聴器の通信について**

1. WIDEX CROSからの送信が始まると『ポーン』という通信開始のお知らせ音が鳴ります（お知らせ音設定時）。



2. WIDEX CROSからの送信が始まると補聴器は「マスター」または「万能」プログラムの音に切り替わります。



3-①. WIDEX CROSと補聴器が通信中は、補聴器のプログラムは切り替えられません。



3-②. WIDEX CROSと通信中は、DEX機器の使用はできません。



4-①. WIDEX CROSからの送信が止まると、1番目のプログラムに戻ります。



4-②. WIDEX CROSを使わない時は、補聴器の他のプログラムがお使いいただけます。



※ 周囲の電波環境により、CROSからの音が途切れることもあります。

❗ **WIDEX CROSで通信中に、補聴器側のボリュームコントロールを操作すると？**

- CROS設定時 : WIDEX CROS側の音のみ大きく、または小さくなります。
- BiCROS設定時 : WIDEX CROS側の音だけでなく、補聴器側のマイク入力音も大きく、または小さくなります。