

TV-DEX用オーディオ変換器

○TV-DEX用オーディオ変換器 付属品一式



TV-DEX用オーディオ変換器
(DCT-1D)




USBケーブル
80cm



光デジタルケーブル
1.5m

○TV-DEX用オーディオ変換器 接続手順

- ① テレビと「変換器」を、付属の「光デジタルケーブル」・「USBケーブル」で接続します。
- ② 「変換器」とTV-ベースをTV-DEX付属の音声ケーブルで接続します。

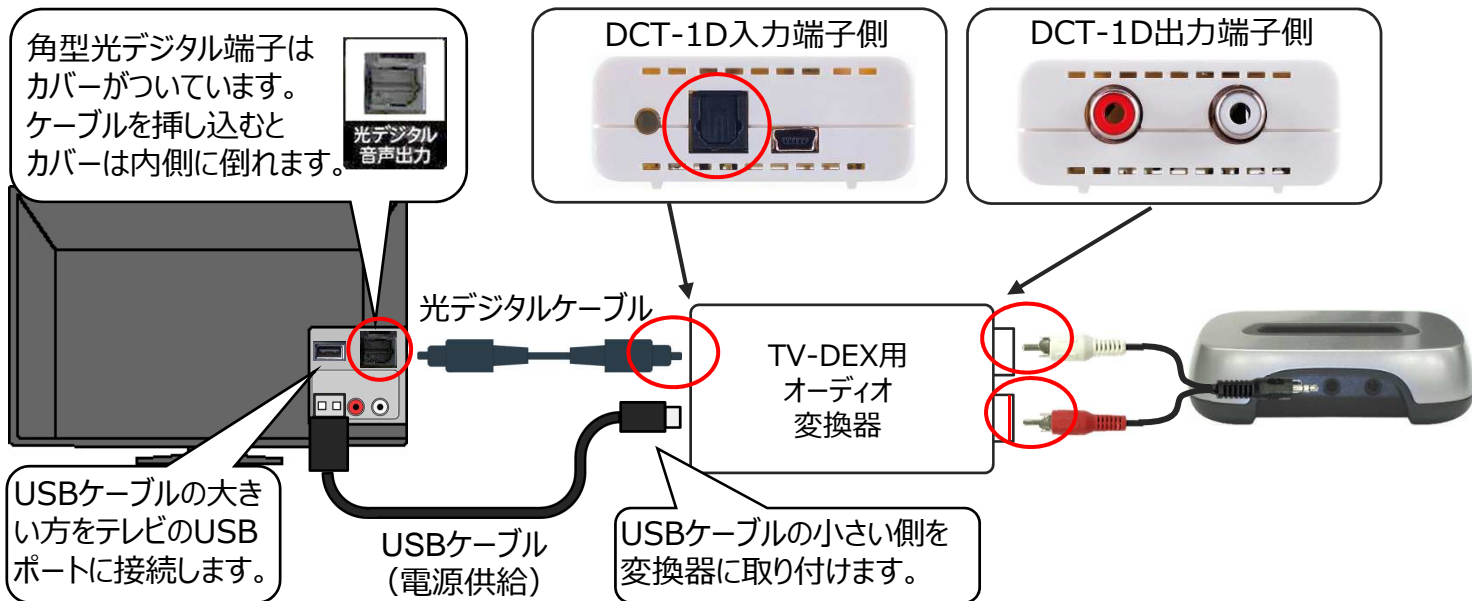

※テレビにUSBポートがない場合は、市販のスマートフォン用の充電器などから電源供給してください。

テレビの音声設定

変換器をお使いになる場合は、テレビ側の出力設定を「**PCM出力**」に変更してください。

例1) ソニー ブラビアの場合



例2) シャープ アクオスの場合



例3) パナソニック ビエラの場合



※上記のテレビでも、発売時期などで項目や設定の有無が変わる場合があります。