

## iPhone の場合

※Android の場合は、裏面をご覧ください。

1-1) ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。



1-2) 「Bluetooth」をタップします。



1-3) 「Bluetooth」のスイッチをタップし、Bluetooth をオンにします。



1-4) COM-DEX のネックループを接続し、COM-DEX をオンにします。



※COM-DEX と充電用ケーブルは外してください。

1-5) COM-DEX をタップします。




COM-DEX が「接続済み」になれば、ペアリング完了です。

### COM-DEX が検出されない場合



- COM-DEX の充電が終わってから作業を行います。
- COM-DEX から充電用ケーブルを外します。
- iPhone の Bluetooth を一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- COM-DEX を一度オフにし、少し経ってから再度オンにして試します。
- Bluetooth をオンにできない、または回転するギアマークが表示される場合は、iPhone を再起動してみます。

### ○COM-DEX アプリを使う場合



- ① ホーム画面の「AppStore」をタップ。
- ② 検索ワードに「windex」と入力し、検索。

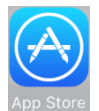

③ 「ダウンロード」をタップし、COM-DEX アプリをダウンロード。

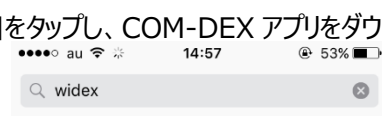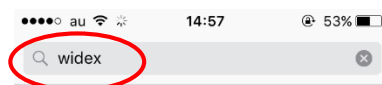


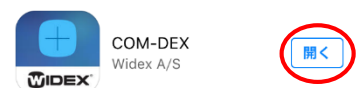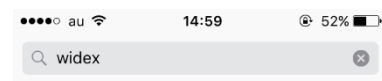

④ 「開く」からインストール後、「開く」ボタンをし、COM-DEX アプリを起動。




## Android の場合

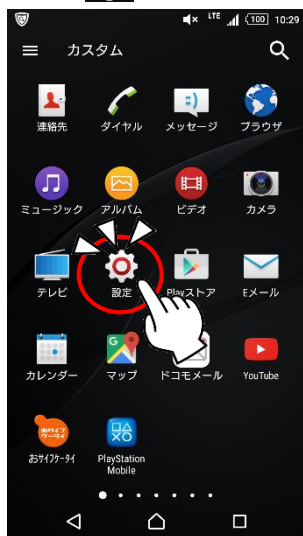
2-1) 「設定」アイコンをタップします。



設定アイコンの表示方法  
設定アイコンの表示方法は、お使いの UI (ホーム) 設定によって変わります。画面下部の「」や「」アイコンをタップすると表示されます。

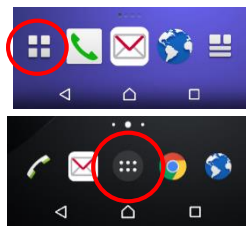

2-2) 「Bluetooth」をタップします。

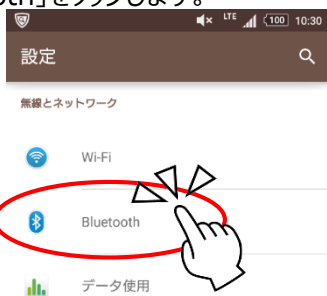

2-3) Bluetooth をタップし、Bluetooth をオンにします。




2-4) COM-DEX のネックループを接続し、COM-DEX をオンにします。



※COM-DEX と充電用ケーブルは外してください。

2-5) COM-DEX をタップします。

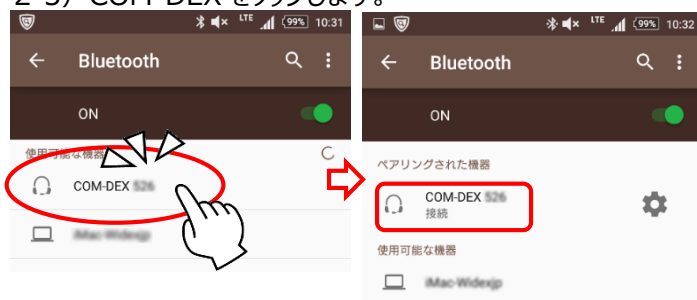

状態が「接続」になったら、ペアリングは完了です。

COM-DEX が検出されない場合

- COM-DEX の充電が終わってから作業を行います。
- COM-DEX から充電用ケーブルを外します。
- スマートフォンの Bluetooth を一度オフにし、少し経ってから Bluetooth をオンにしてみます。
- COM-DEX を一度オフにし、少し経ってから再度オンにしてみます。
- Bluetooth をオンにできない、または検索中が続く場合は、スマートフォンを再起動してみます。



### ○COM-DEX アプリを使う場合

COM-DEX でボリューム操作やプログラム切り替えを行う場合は、スマートフォンに COM-DEX アプリをインストールします。




① 「Play ストア」をタップして、「Google プレイ」画面を表示。



「Play ストア」アイコンは、ホーム画面や ・ のアプリリスト内にあります。

② 検索ワードに「widex」と入力し、検索。

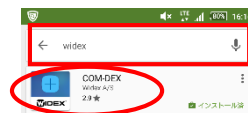


③ COM-DEX をタップ。



④ 「インストール」ボタンをタップ

⑤ 「アクセス確認」画面で「同意する」ボタンをタップ。

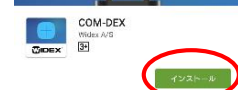

⑥ インストール後、「開く」ボタンをタップし、COM-DEX アプリを起動。



お問合せ先

ワイデックス株式会社 ワイデックススクール

00777-81810 部署番号 5