

RC/TV-DEX マッチング

WIDEX

2022年 12月 改訂



RC-DEX/TV-DEXは、補聴器とマッチングしないと使用できません。

○ マッチング手順

1. COMPASS GPSに補聴器を接続し、「使用操作」へ進みます。
2. マッチングしたいDEXリモコンを選択します。
3. お客様のあごから5cm以内の距離で、DEXリモコンの「+」ボタンと「-」ボタンを5秒ほど長押しします。補聴器から「ポーン」という音が聞こえたらマッチングは完了です。



お客様のあごから
5cm以内



<RC-DEX>

<TV-コントローラー>



DEXリモコンの「+」ボタンと「-」ボタンを5秒ほど長押し
⇒補聴器から「ポーン」というお知らせ音が鳴ったら完了

○ 動作確認

● RC-DEXをお使いの場合

COMPASS GPSを閉じ、補聴器の再起動が終わったら、「+」ボタンや「-」ボタンを押しボリュームが変わるか、プログラムを設定している場合は、プログラム切り替えボタンを押し、確認します。

● TV-DEXをお使いの場合

COMPASS GPSを閉じ、補聴器を再起動します。TVコントローラーをTV-ベース（充電台）に戻し、5秒以上充電してください。5秒以上経過したら、TV-ベースからTV-コントローラーを外し、TV-コントローラーの電源ボタンを押して、テレビやオーディオ機器からの音が聞こえるか確認します。

補聴器とマッチング後、
TV-コントローラーを
TV-ベースに置き、
5秒以上充電します。



○ TV-DEX経由で音が聞こえない場合のチェックポイント

- テレビの音声**入力**端子につないでいませんか？
→ 音声**出力**端子につないでください。音声出力端子がないテレビは、イヤホン端子につないでみてください。
- TV-コントローラーの電源ランプが早い点滅をしていませんか？
→ 通信範囲外です。TV-ベースとTV-コントローラーとの距離を短くしてみてください。
- TV-コントローラーが遅い点滅をしていませんか？
→ テレビなどからの信号がTV-ベースに正しく届いていません。テレビやTV-ベースに正しくプラグが取り付けられているか確認してみてください。