

Widex サウンドアシスト



主な特長

- 2.4GHz 帯通信の補聴器に対応
- 聞き取りにくい環境での音声明瞭度の向上
- パートナー/仲間うち/パーティーの場で使用可能なパートナーマイク/テーブルマイク
- ハンズフリー通話、スマートフォンの音声を受信
- スマートフォンからのオーディオストリーミング
- 音声アシスタントのサポート
- 補聴器用リモコン（プログラムと音量）
- Tコイル
- 一体型クリップ
- エレガントで控えめなデザイン

説明

サウンドアシストは、Bluetooth 対応のワイデックス補聴器と安定した接続を可能にする多目的デバイスです。

パートナーマイクとして、またはハンズフリー通話で使用する場合は、一体型クリップを使用してシャツに装着します。卓上で使用する場合は、クリップに小さなラバードットが付いているので、テーブルの上で安定します。パッケージにはネックループが同梱されており、テレコイルモードでの使用時や、クリップが使えない場合のパートナーマイクとして、サウンドアシストを首にぶら下げておくことが可能です。

これらの多機能を1つの機器に集約した、優れたデザインと外観。目立たないように使用するコンパクトな機器。

技術的仕様

無線仕様

周波数 (レンジ)	2.40~2.48 GHz
帯域幅	1 MHz/2 MHz
チャンネル	80/40 チャンネル
変調	GFSK
放射出力	最大 4 dBm
範囲	最大 10m の視線
以下の規格/認証に適合	EN/IEC 62479 EN/IEC 62368-1 EN 300 328 EN/IEC 301 489-17 EN/IEC 300 422-4 EN/IEC 301 489-1 EN/IEC 60601-1-2 FCC パート 15C CE マーク

オーディオ仕様

周波数 (レンジ)	100Hz~7.5kHz
電気インターフェース	Bluetooth 搭載 iOS/Android 端末、テレコイル
ストリーミング	A2DP: ステレオ/テレコイル、マイク、電話: モノラル ステレオでストリーミング (テレコイル、マイク、モノラルでの通話を除く)
遅延時間	マイク 30ms

サウンドアシスト

電気仕様と動作条件

入力電圧 電源 電力消費	マイクロ USB による 5V マイクロ USB による最低 2.5W (500mA) ストリーミング中最大 170mW (45mA) スリープ時最大 0.1uW (27nA)
動作温度 保管温度 相対湿度	0° C ~ 40° C -20° C ~ 55° C 10% ~ 95%

バッテリー

バッテリータイプ バッテリー寿命	充電式リチウムイオンポリマー : 3.7 V / 1.0 Wh Bluetoothデバイスからのストリーミング: 約7.5時間、スマートフォンによる通話: 約4時間、テレコイルのストリーミング: 約13時間、パートナーマイク: 約7時間、テーブルマイク: 約5時間
充電時間	3 時間

物理的特性

寸法 (D/W/H) 重量	43/43/16mm 32g
------------------	-------------------

概要

- 1.1 音量ボタン (+/-)
- 1.2 プログラムボタン
- 1.3 マイク
- 1.4 プッシュボタン
- 1.5 使用中のライトインジケータ
- 1.6 電源/モードボタン
- 1.7 バッテリーライトインジケータ
- 1.8 モードライトインジケータ
- 1.9 マイクロ USB ポート
- 1.10 テーブルトップへの取り付け/安定性を高める一体型金属製クリップ

