


## dry-cap uv 2<sup>®</sup> 取扱説明書（日本語簡易版）

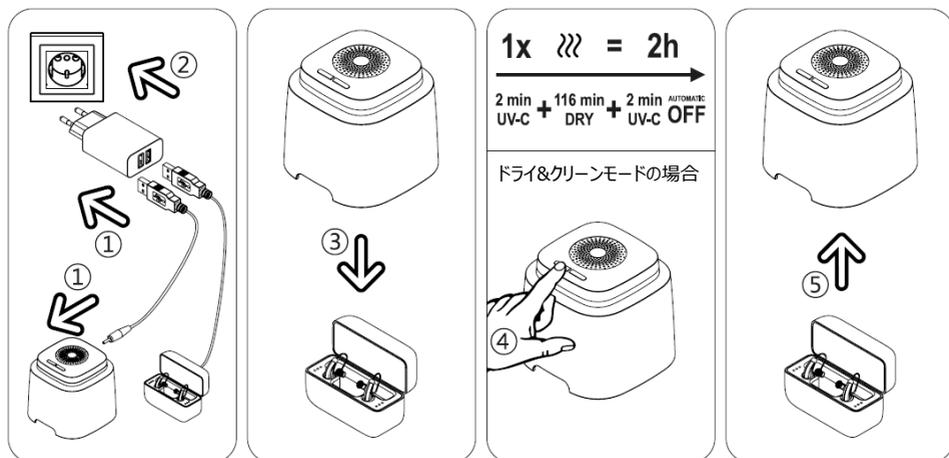

≡ ドライ&クリーンモード（120分）※左ボタン

UV-C ライトの照射と効率的なファンを使った高速乾燥を組み合わせた自動プログラムになります。

☀ クリーンモード（2分）※右ボタン

短時間で行われる衛生プログラムです。家の中に存在する細菌、バクテリア、および真菌類を効率よく除去するのに適した UV-C ライトを照射します。

### <準備>

1. 付属ケーブルの USB プラグを AC アダプターの USB 端子に、丸型プラグを DRY-CAP UV2 の背面端子に接続します。補聴器の充電器用の USB ケーブルを AC アダプターの空いている方の USB 端子に差し込むことができます。
2. AC アダプターを電源コンセントに差し込みます。

### <ドライ&クリーンモード>

1. 補聴器が充電器にセットされた状態で、充電器を覆うように DRY-CAP UV 2 のアクリル製のカバーをかぶせます。
2. 左ボタンを押すと、自動運転（乾燥+ UV-C ライト照射）が開始されます。
  - ファンによる高速乾燥はマイクロプロセッサによって制御され、120 分間実施されます。
  - UV-C ライトが 2 分間で細菌やバクテリアを除去します。
  - 2 分後、UV-C ライトは自動的に消灯し、続いて乾燥が実施されます。
  - 120 分間の自動運転の最後の 2 分間で 2 回目の UV-C ライト照射が実施されます。
  - 120 分後、DRY-CAP UV 2 は自動的に運転を終了し、電源オフとなります。  
充電中の補聴器はそのまま引き続き充電されます。
3. DRY-CAP UV 2 のカバーを持ち上げ、充電器から補聴器を取り出します。

### <クリーンモード>

1. 補聴器が充電器にセットされた状態で、充電器を覆うように DRY-CAP UV 2 のアクリル製のカバーをかぶせます。
2. 右ボタンを押すと、UV-C ライト照射が自動的に開始されます。
  - UV-C ライトが 2 分間で細菌やバクテリアを除去します。
  - 2 分後、DRY-CAP UV 2 は自動的に運転を終了し、電源オフとなります。
3. DRY-CAP UV 2 のカバーを持ち上げ、充電器と補聴器を取り出します。

### <メンテナンス>

DRY-CAP UV 2 を掃除する際は少し水で湿らせた布で拭くことを推奨します。補聴器や充電器のお手入れについては、それぞれの取扱説明書をご確認ください。DRY-CAP UV 2 を長期間使用しない場合は、電源を抜いてください。ドライ&クリーンモードでは、左ボタンを 3 秒以上押し続けるか、DRY-CAP UV 2 本体を持ち上げて傾けると、運転を中断できます。

### <警告>

水や液体との接触を避けてください。洗面所の近くでは使わないでください。

正常に動作していないと思われた場合は、電源を抜き、購入された販売店へ製品をご持参ください。

DRY-CAP UV 2 を分解しないでください。付属の AC アダプターのみをご使用ください。

子供が DRY-CAP UV 2 をおもちゃとして使用しないように、子供の手の届く所に置かないようにしてください。DRY-CAP UV 2 は、使用方法を理解し、ご自身で問題なく使うことができると認識している方以外は使用しないようにしてください。

注意：UV-C ライトを覗かないでください。目や肌に害を与える可能性があります。

DRY-CAP UV 2 には、3G 安全センサーが搭載されています。使用中に DRY-CAP UV 2 本体を移動、回転、または傾けた場合、センサーが反応し、本体の電源がオフになります。その場合、本体を再起動する必要があります。DRY-CAP UV 2 は UV-C 照射可能な製品のみを使用してください。

決して人や動物には使用しないでください。

※本製品は電気製品です。廃棄については、各自治体の決まりに従って行うようにしてください。