

# Dry-cap uv 2.2

## 取扱説明書（日本語簡易版）



本紙で使用のイラストはイメージです。  
実際の仕様とは異なる場合がございます。

### 準備

1. 付属ケーブルのUSBプラグをACアダプターのUSB端子にUSB-CプラグをDry-cap uvの背面端子に接続します。充電器のUSBケーブルをACアダプターの空いている方のUSB端子に挿し込むことができます。
2. ACアダプターを電源コンセントに差し込みます。

### ドライ&クリーンモード

1. 補聴器が充電器にセットされた状態で、充電器を覆うようにDry-cap uvのアクリルカバーを被せます。
2. 左ボタンを押すと、自動運転（乾燥+UV-Cライト照射）が開始されます。
  - ファンによる高速乾燥はマイクロプロセッサによって制御され、120分間実施されます。
  - UV-Cライトが5分間で細菌やバクテリアを除去します。※LEDランプ点滅
  - 5分後、UV-Cライトは自動的に消灯し、続いて乾燥が実施されます。※LEDランプ点灯
  - 120分間の自動運転の最後の5分間で2回目のUV-Cライト照射が実施されます。※LEDランプ点滅
  - 120分後、Dry-cap uvは自動的に運転を終了し、電源オフとなります。充電中の補聴器はそのまま引き続き充電されます。※LEDランプ消灯

3. Dry-cap uvカバーを持ち上げ、充電器から補聴器を取り出します。

### クリーンモード

1. 補聴器が充電器にセットされた状態で、充電器を覆うようにDry-cap uvのアクリルカバーを被せます。
2. 右ボタンを押すと、UV-Cライト照射が自動的に開始されます。
  - UV-Cライトが5分間で細菌やバクテリアを除去します。※LEDランプ点滅
  - 5分後、Dry-cap uvは自動的に運転を終了し、電源オフとなります。※LEDランプ消灯
3. Dry-cap uvのカバーを持ち上げ、充電器と補聴器を取り出します。

### メンテナンス


- Dry-cap uvを掃除する際は少し水で湿らせた布で拭くことを推奨します。
- 補聴器や充電器のお手入れについては、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
- Dry-cap uvを長期間使用しない場合は、電源を抜いてください。
- ドライ&クリーンモードでは、左ボタンを3秒以上押し続けるか、Dry-cap uv本体を持ち上げて傾けると、運転を中断できます。


### 使用上の注意

- UV-Cライトを覗かないでください。目や肌に害を与える可能性がございます。
- Dry-cap uvには、3G安全センサーが搭載されています。使用中にDry-cap uv本体を移動、回転、または傾けた場合、センサーが反応し、本体の電源がオフになります。その場合、本体を再起動する必要があります。
- Dry-cap uvはUV-C照射可能な製品のみを使用してください。決して人や動物には使用しないでください。

### 警告

- ⚠ 水や液体との接触を避けてください。洗面所の近くでは使わないでください。
- ⚠ 正常に動作していないと思われる場合は、電源を抜き、購入された販売店へ製品をご持参ください。Dry-cap uvを分解しないでください。付属のACアダプターのみをご使用ください。
- ⚠ 子供がDry-cap uvをおもちゃとして使用しないように、子供の手の届く所に置かないようにしてください。
- ⚠ Dry-cap uvは、使用方法を理解し、ご自身で問題なく使うことができると認識している方以外は使用しないようにしてください。

 ※本製品は電気製品です。廃棄については、各自治体の決まりに従って行うようにしてください。

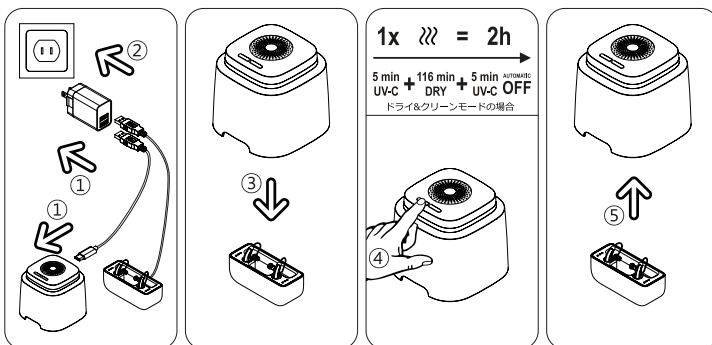

⏸ **ドライ&クリーンモード（120分）** ※左ボタン  
UV-Cライトの照射と効率的なファンを使った高速乾燥を組み合わせた自動プログラムになります。

🔴 **クリーンモード（5分）** ※右ボタン  
短時間でされる衛生プログラムです。家の中に存在する細菌、バクテリア、および真菌類を効率よく除去するのに適したUV-Cライトを照射します。

## 保証書

本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管してください。再発行はいたしません。下記の保証期間中に故障が生じた場合には、右頁の保証規定により無償修理をいたします。本保証書をご提示の上、お買上店へお申し付けください。

お客様名	様
モデル	Dry-cap uv 2.2
製品番号	
保証期間	お買い上げ日より2年間
お買上日	年 月 日
販売店 店舗名 住所 電話番号	

WSオーディオロジージャパン株式会社  
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1  
三機大和ビル6F  
TEL 0120-332-604 / FAX 0120-332-394

## 保証規定

- お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は、本保証書記載内容により無償修理をいたします。
- 万一保証期間内に故障が発生した場合は、本保証書記載の製品をお買上店へご持参の上本保証書をそえて修理をお申し付けください。付属品については保証対象外となります。
- 保証期間内でも次の場合は有償とさせていただきます。
  1. 本保証書の提示がない場合
  2. 本保証書にお買上の年月日、お客様名、お買上の販売店名の記入がない場合、および記載の字句が書き替えられた場合
  3. 取扱説明書、カタログ等の使用説明によらない使用状態での故障、および不注意による落下、水没、破損等
  4. 故障器械を提示される前に、解体、修理をされた場合
  5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等、ご不明な場合は、お買上店までお問合せください。