



ワンポイント アドバイス【32】
RC(リモコン)本体の設定・マッチングについて


※リモコンをお使いになる前に、必ず「リモコン本体の設定」・「補聴器とのマッチング」を行って頂きますようお願い致します。

リモコン本体の設定手順

※「電池の中央を浮かせ、ふたを閉じる」という方法だと、素早く行えます。



モデル	RC3-1	RC3-2	
手順			
①プログラミングモードへの切替	リモコンに電池を入れ、ふたを閉めてから10秒以内に $\boxed{+}$ を押しながら $\boxed{1}$ ($\boxed{1}$ で次へ)	リモコンに電池を入れ、ふたを閉めてから10秒以内に $\boxed{+}$ を押しながら $\boxed{(\cdot)}$ ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>Pro</i>
②RCモデル名の表示	表示のみ ($\boxed{1}$ で次へ)	表示のみ ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>rc 1</i>
③プログラム数の設定	$\boxed{2}$ と $\boxed{3}$ で補聴器と同じプログラム数を選択 ($\boxed{1}$ で次へ)	$\boxed{\blacktriangle}$ と $\boxed{\blacktriangledown}$ で補聴器と同じプログラム数を選択 ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>P 3</i>
④イベント記録の設定	$\boxed{2}$ でOn、 $\boxed{3}$ でOff ($\boxed{1}$ で次へ)	$\boxed{\blacktriangle}$ でOn、 $\boxed{\blacktriangledown}$ でOff ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>L 9 On</i>
⑤両耳同時/左右別々の設定		$\boxed{\blacktriangle}$ で Sep(左右別々)、 $\boxed{\blacktriangledown}$ で Uni(両耳同時) ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>Uni L R</i>
⑥タイマーアラーム機能の設定		$\boxed{\blacktriangle}$ で On、 $\boxed{\blacktriangledown}$ で Off ($\boxed{(\cdot)}$ で次へ)	<i>AL On</i>
⑦オプション (IDコード設定など)	全オプションとも基準は初期設定になりますので、通常、オプション設定の変更は必要ありません。変更を行う場合は、「RCプログラミングガイド」P12~16を御参照ください。		<i>OPt</i>
	$\boxed{1}$ で次へ	$\boxed{(\cdot)}$ で次へ	
⑧終了	3秒後に自動的に電源が切れ、ユーザーモードになり、補聴器とのマッチングの準備が完了します。		<i>End</i>

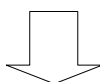

裏面の「補聴器とのマッチング」へ進みます。

補聴器とのマッチング手順


★Compass の場合★

Step1: フィッティング・調整後、「調整の完結」の中の「RC マッチング」をクリックし、装用耳を選択後、「次へ」をクリックします。


Step2: リモコンと補聴器を 1m 以内に近づけ、「マッチング開始」をクリックします(この時点では、リモコンの電源を入れしないで下さい)。

Step3: 「リモコンが補聴器より 1m 以内にあるのを確認して、リモコンのセンターキーを押します。」というメッセージが表示されたら、リモコンの真ん中のボタンをしっかりと押し、電源を入れます。「次へ」をクリックします。



Step4: マッチング完了の場合
「完了」をクリックする。

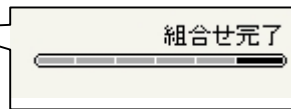

マッチング未完了の場合
メッセージの内容を確認し、
マッチングをやり直す。

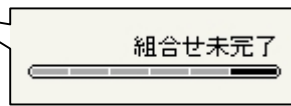


※補聴器の電源を一度オフにして、再度オンにしてからお客様にお渡します。

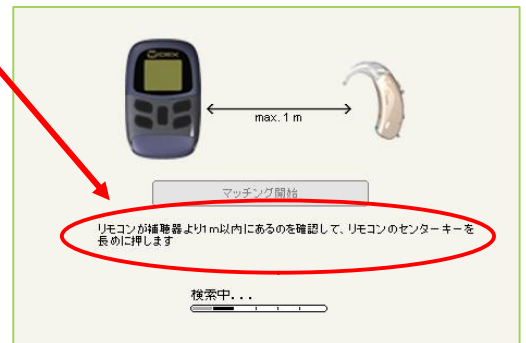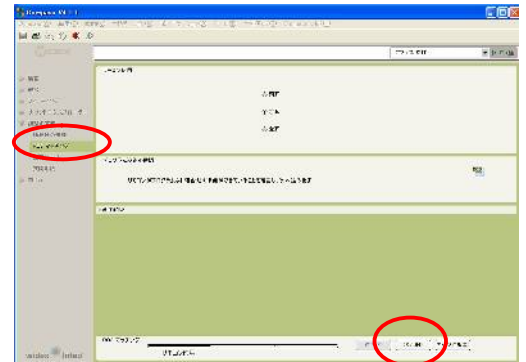


★iP5 の場合★


Step1: フィッティング・調整後、MODE キーを押し、プログラムオプションモードに切り替えます。

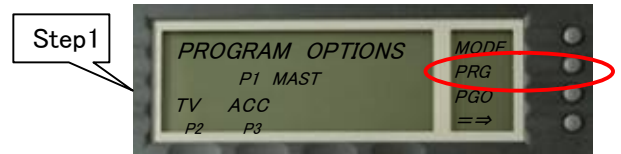


Step2: PRG キーを押し、RC3 キーを押します。

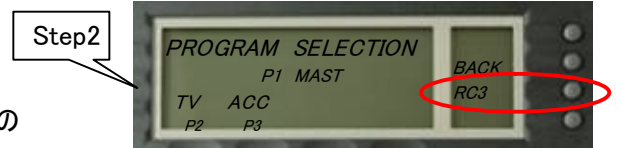

Step3: STRT キーを押し、「PRESS KEY」と表示されたら、リモコンの真ん中のボタンを押して電源を入れます。

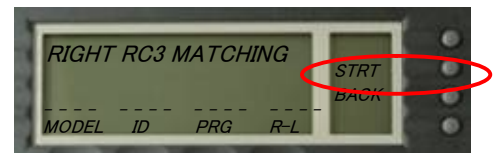


Step4: マッチング完了の場合
「MATCH OK」と表示され、モデル・ID・プログラム数・UNI(両耳同時)/SEP(左右別々)が表示されます。

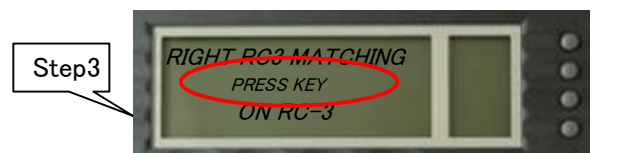

マッチング未完了の場合
「ERROR」と表示されます。
内容を確認し、マッチングをやり直します。
ERROR1: 補聴器とリモコンの通信が出来ません。
ERROR2・3・4: 補聴器とリモコンのプログラム数が一致しません。

Step5: BACK キーで戻ります。

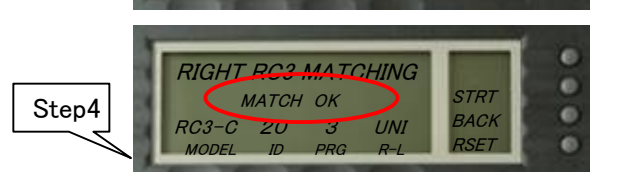

※補聴器の電源を一度オフにして、再度オンにしてからお客様にお渡します。

