

# BTE R D/BTE 13 D フック&チューブの交換手順 (V.2 EWフック&チューブ 0.9/1.4mm)


**WIDEX**

2026年 1月

この資料は、ALLURE/MOMENT/MAGNIFY/EVOKE BTE R D/13 (D) のフック交換の際にご覧ください。

**注意：EWフック&チューブはお使いいただけません。**

V.2 EWフック&チューブ用アダプター

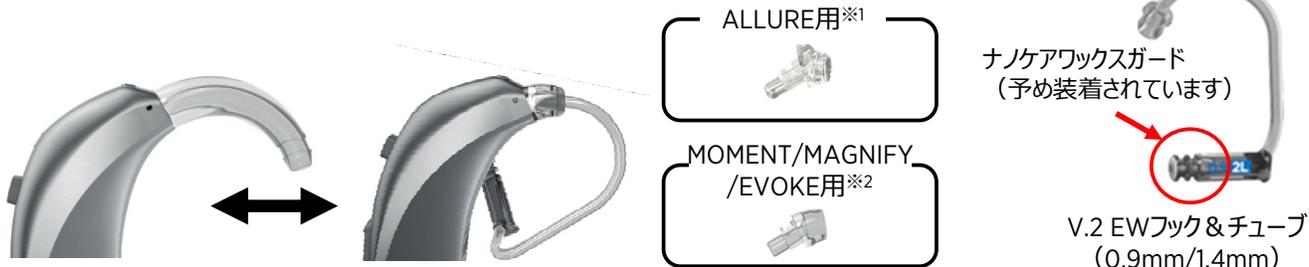


V.2 EWフック&チューブの取り付け・取り外しには、V.2 EWフック&チューブの他にロックピン付け外しツールが必要です。

※1 ALLUREには、21049468「ALLURE用アダプター」をご使用ください。

※2 MOMENT/MAGNIFY/EVOKEには、10997566「アダプター V.2 EWフック&チューブ用」をご使用ください。

## ● ノーマルフックから V.2 EWフック&チューブに交換する手順

1. ロックピン付け外しツールを使い、補聴器本体からアセンブリーピンを押し出します。

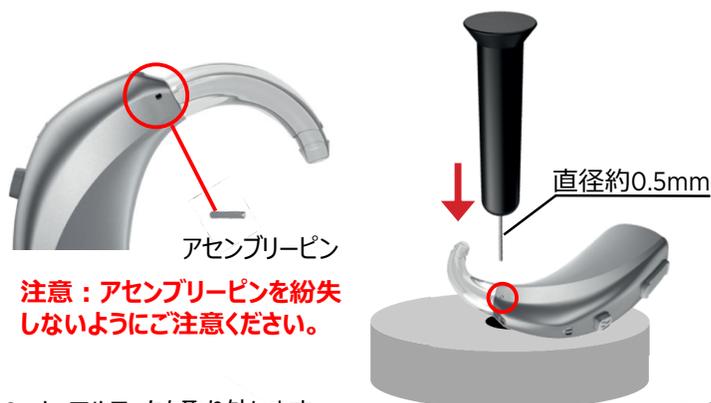

アセンブリーピン  
**注意：アセンブリーピンを紛失しないようにご注意ください。**

10977928 ロックピン付け外しツール  
台座付き 1,650円 (税込)  
ご注文は弊社営業またはカスタマーサービスへ  
ご依頼ください。

ロックピン付け  
外しツール

ロックピン付け  
外し台座


2. ノーマルフックを取り外します。



3. アダプターを補聴器に取り付けます。



4. アダプターを取り付けたら、アセンブリーピンを補聴器に対し垂直に押し込みます。

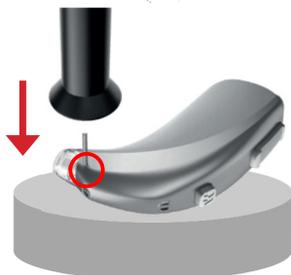


5. V.2 EWフック&チューブを挿し込みます。



## ● V.2 EWフック&チューブの外し方


1. V.2 EWフック&チューブを人差し指の上に置き、チューブを上から親指で押さえます。
2. 補聴器を反対の手で保持し、V.2 EWフック&チューブを右図の矢印の方向に**勢いよく引っ張り**、外します。

※注意 ゆっくり引っ張るとチューブが伸びたりちぎれることがあります。

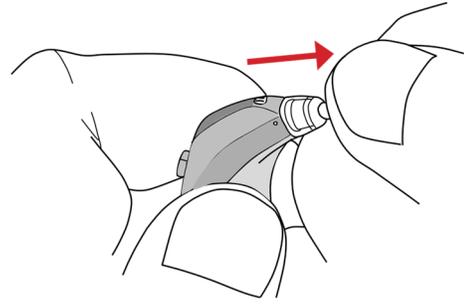

## ● アダプターの外し方とノーマルフックの取り付け方

1. ロックピン付け外しツールを使って、補聴器からアセンブリーピンを押し出します。

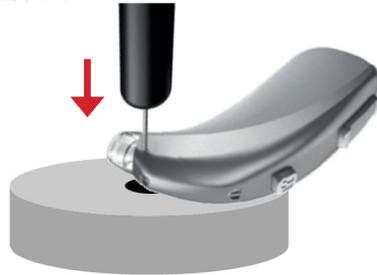

3. アダプターを外した補聴器にノーマルフックを取り付けます。



**注意：ノーマルフックはALLURE用とMOMENT/MAGNIFY/EVOKE用で異なります。**

2. 補聴器本体からアダプターを取り外します。



4. アセンブリーピンを補聴器に対し垂直に押し込みます。



## ● カスタムイヤチップの取り外し手順

1. カスタムイヤチップを取り外す前にナノケアワックスガードを外します。
2. カスタムイヤチップ取外治具を使用しV.2 EWフック&チューブの音口部分を押し出します。



※カスタムイヤチップ取外治具は、RIC/RITEアソートボックスに入っています。

## ● イヤチップ取り付け時の注意

補聴器を外す際、イヤチップが耳の中に残ってしまったとご連絡をいただくことがあります。

多くのケースで、イヤチップがレシーバーやフック&チューブの適切な位置まで挿入されていないことが原因です。

イヤチップを取り付ける際は、右図を参考にレシーバーなどの根元の適切な位置まで挿入されているか、イヤチップの傘の部分めくってご確認ください。



根元まで届いている



根元まで届いていない