

ALLUREアプリ シンプル操作ガイド

ALLUREアプリ V1.4

WIDEX

2026.7

お使いになる前に

- **ALLUREアプリは、ALLUREシリーズ補聴器用アプリです。**
- ALLUREアプリの初回起動時にプライバシー設定の確認がありますが、個人を特定する情報は収集されませんので同意していただくことをお勧めします。また一度同意しても後から拒否することも可能です。
- ALLUREアプリを起動した際、補聴器のファームウェア更新を要求される場合があります。アプリの表示内容に当たって、補聴器のファームウェアを更新してください。

このアプリで主にできること

- 音量調整
- プログラム切り替え
- 聞きたい方向選択（指向性切り替え）
- 補聴器の取り扱い説明（マイガイド）
- お客様自身で今いる環境に合わせた音作り（AIサウンドアシスタント）
- ビックデータからお客様のいる環境に適した音をAIが提案（AIクイックアシスタント）
- ミュート（消音）の切り替え
- 自分の補聴器を探す
- 低域・中域・高域のバランス調整（イコライザー）

〔 ALLUREアプリ ホーム画面 各部名称・機能 〕

ステータスバー
補聴器の電池残量や接続状態が表示されます。



※表示される使用可能時間は、MLシーバー使用時、かつ「4年間使用後」または「約1500回の充電サイクル後」の目安です。

現在補聴器で選択されているプログラム名

聞きたい方向選択ボタン※

※ 片耳装用の場合は、装用耳側と前後のみ

AIクイックアシスタント（ショートカット）※

イコライザー（ショートカット）※

※ショートカットを追加した場合のみ表示

音量調整



音量下げる

音量上げる

ミュート（消音）ボタン

ホームボタン


ヘルプや詳細画面からホーム画面に戻るときにタップします。

ヘルプボタン

補聴器の取り扱い説明（マイガイド）やALLUREアプリの使い方ガイドを表示します。

プログラム切り替えボタン

切り替えたいプログラムやAIサウンドアシスタントを使用する際にタップします。

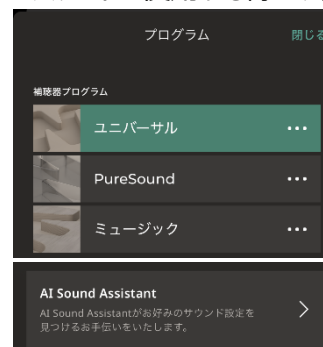

音を調整するボタン

指向性・イコライザーで音調整をしたり、AIクイックアシスタントを使用する際にタップします。
詳しくは次のページをご覧ください。



左右個別の音量調整ボタン

詳細ボタン

補聴器やアプリのバージョン確認や「補聴器を探す」機能を使うときにタップします。

○ 音質調整



指向性（聞きたい方向選択）：

一時的に前後左右の特定の方向※からの音を中心に関きたい時に使用します。

※ 片耳装用の場合は装用耳側と前後のみ

AIクイックアシスタント：

お客様のいらっしゃる環境に近いものを選択することで、AIが素早くビックデータから近い環境で多くの方に好まれた音設定を提案します。

イコライザー：

低域・中域・高域ごとのバランスを好みに応じて変えられます。

☆マークをタップするとホーム画面にショートカットアイコンを追加するとでき、簡単に呼び出すことができます。

設定変更した後で名前を付けて保存すると1つのプログラムとして登録できます。後で登録したプログラムを選択して使用することができます。

AIクイックアシスタント画面



お客様のいらっしゃる環境に近いものを選択

○ 自分の補聴器を探す

補聴器と接続したスマートフォンの位置情報やスマートフォンと補聴器間のBluetooth信号の強さを表示します。



○ 自分好みの音に近づける (AIサウンドアシスタント)


ALLUREアプリが提案する2つの音を聞き比べ選択していくことで、よりその場に合わせたお客様好みの音に近づけることができます。また名前を付けて保存しておくことで、プログラムとして呼び出すことができます。



万一の紛失に備えて

ALLUREアプリの位置情報の利用/権限は許可にしてください。位置情報の設定は、「アプリの使用中は許可」や「常に許可」を選択します。位置情報を許可しないとアプリがスマートフォンの位置情報を取得できません。


- ALLUREアプリは最後に補聴器が接続された位置をを保存します。
- ALLUREアプリが動いていないと（画面に見えていなくても良い）位置情報は保存されません。
- ALLUREアプリは「自分の補聴器を探す」で最後保存された位置を示すので、紛失した時点の位置情報が無いと補聴器を探せません。
- 外出中は常にALLUREアプリを起動しておくことを強くお勧めします。

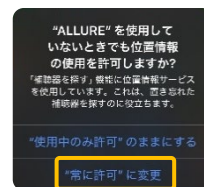

○ ALLUREアプリのアップデート方法

iOS版の場合

1. App Storeアプリを開きます。
2. マイアカウントボタン（右上のアイコン）をタップします。

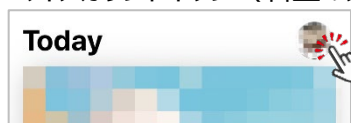

3. 画面を下に🌀が回転するまでスワイプ（引っ張る）してから、指を離し情報を更新します。



4. 画面をスクロールして、WIDEX ALLUREを探し、WIDEX ALLUREの横の「アップデート」をタップします。



※利用可能なアップデートが無い場合は「アップデート」が表示されません。

Android版の場合


1. Google Playストア アプリを開きます。
2. プロフィールアイコン（右上のアイコン）をタップします。



3. 「アプリとデバイスの管理」をタップします。



4. 「アップデート利用可能」をタップします。

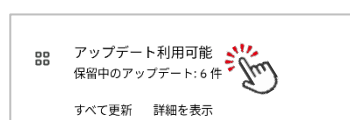

5. WIDEX ALLUREの横にある「更新」をタップします。



※利用可能なアップデートが無い場合は表示されません。

○ ALLUREファームウェアのアップデート方法

1. アップデート可能なファームウェアがある場合、ALLUREアプリに補聴器を接続すると以下の画面が表示されるので、「アップデートを開始する」をタップします。※画像はiOS版の画面です。



2. 以下の画面が表示されアップデートが開始します。



※確実にファームウェアの更新を行うため、アップデート中はアプリを閉じず、他の操作も行わないでください。
※アップデートの所要時間はおよそ15分です。

3. アップデートが終了すると補聴器が再起動されます。



4. 以下の画面が表示されれば、ファームウェアの更新は完了です。「終了」をタップしてアプリをご使用ください。

