

# BEYONDアプリ 設定ガイド<Android版>

※スマートフォンでBEYONDアプリを使用するには、**Android OS 5.1以降、Bluetooth 4.2以降**が必要です。

※電話音声・音楽を直接BEYONDへストリーミングすることはできません。

— お使いになる前に —

## アプリのダウンロード

Playストアで「WIDEX」と検索し、BEYONDアプリをダウンロードします。





## スマートフォンとBEYONDのペアリング

ペアリングをする前に、スマートフォンの電源をオフにした後、再起動してください。


また、補聴器は手順の「2」まで電源を入れしないでください。

1. スマートフォン「設定」より、Bluetoothを「オン」にします。
2. 補聴器の電源を入れると、スマートフォンが補聴器を検索します。
3. タップすると自動でペアリングが始まります。


ペアリングには1分程かかる場合があります。

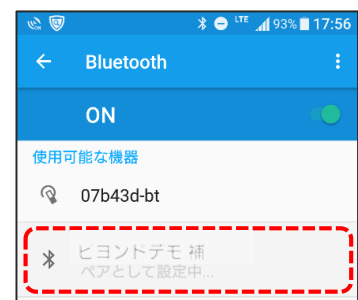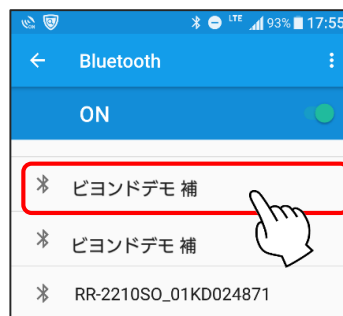


4. 両耳装用の場合は、もう1台の「補聴器の名前」をタップしてペアリングします。

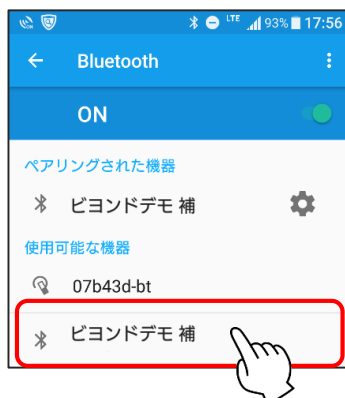

5. 下のような画面になれば、スマートフォンとBEYONDとのペアリングは完了です。

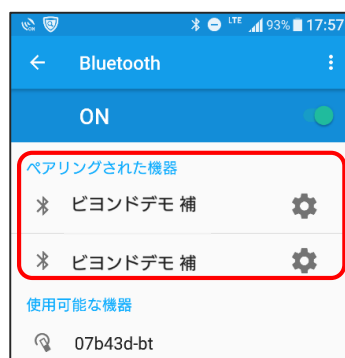


6. ホーム画面に戻り、BEYONDアプリをタップして起動します。

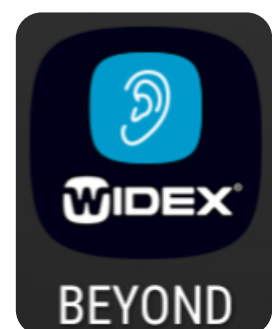

## ！ うまくつながらない場合は？

一度ペアリングをすれば、BEYONDの電源をオンにすると、BEYONDアプリは自動で接続されます。つながらない場合は、次の手順を行ってください。


- 補聴器の電池蓋を開けて、5秒以上経ってから閉じて、しばらく待つ。
- 補聴器の電池を新しいものと交換して、しばらく待つ。  
※電池を交換した場合は、接続するまで時間がかかります。そのまましばらくお待ちください。
- スマートフォンの「設定 」で、Wi-Fiをオフにしてみて、しばらく待つ。
- スマートフォンを再起動してしばらく待つ。

## BEYONDアプリの更新

BEYONDアプリの更新は、通常のアプリ同様、Playストアからの通知があります。

## BEYOND補聴器本体内ファームウェアの更新

アプリ更新後、補聴器を接続するときに「補聴器の更新」画面が表示された場合は、必ず更新を実行してください。

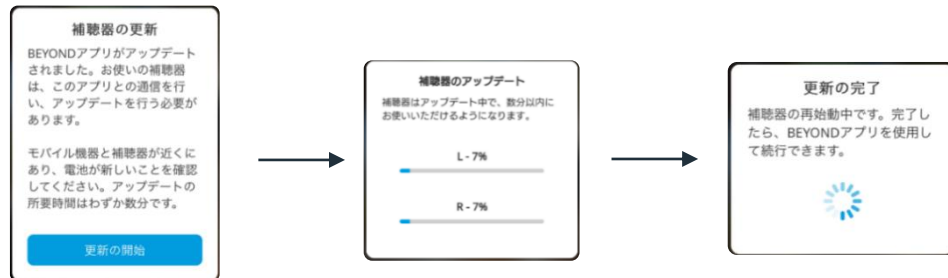

※作業が中断された場合、新しい電池を使用して再試行してください。

※「更新の完了」画面が5分以上続く場合、補聴器の電源オフ、10秒経って電源をオンにし、アプリを再起動してください。