


# BEYONDアプリ 設定ガイド<iPhone版>

※iPhoneでBEYONDアプリを使用するには、**iOS 10以降を搭載したiPhone 5S以降**が必要です。

— お使いになる前に —

## アプリのダウンロード

App storeで「WIDEX」と検索し、BEYONDアプリをダウンロードします。

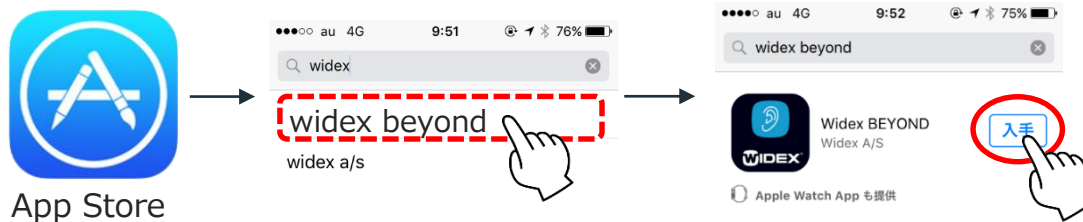

QRコードから  
ダウンロードも  
可能です。

## iPhoneとBEYOND補聴器とのペアリング

ペアリングをする前に、iPhoneの電源をオフにした後、再起動してください。

また、補聴器は手順の「3」まで電源を入れないでください。

1. iPhoneのホーム画面「設定」より、Bluetoothを「オン」にします。



2. 「一般」→「アクセシビリティ」→「MFi補聴器（または、ヒアリングデバイス）」の順にタップします。



3. 補聴器の電源を入れると、iPhoneが補聴器を検索します。検索された「補聴器の名前」をタップします。



4. Bluetoothペアリングの要求で「ペアリング」をタップします。補聴器が左右ある場合は、ペアリングの要求も2回表示されます。またペアリングには1分ほどかかる場合があります。



5. 下のような画面になれば、iPhoneとBEYONDとのペアリングは完了です。



6. ホーム画面に戻り、BEYONDアプリをタップして起動します。





## うまくつながらない場合は？

一度ペアリングをすれば、BEYONDの電源をオンにすると、BEYONDアプリは自動で接続されます。つながらない場合は、次の手順を行ってください。


- 補聴器の電池蓋を開けて、5秒以上経ってから閉じて、しばらく待つ。
- 補聴器の電池を新しいものと交換して、しばらく待つ。  
※電池を交換した場合は、接続するまで時間がかかります。そのまましばらくお待ちください。
- iPhone の「設定」で、Wi-Fiをオフにしてみ、しばらく待つ。
- iPhoneを再起動してしばらく待つ。

## BEYONDアプリの更新

BEYONDアプリの更新は、通常のアプリ同様、App storeからの通知があります。

## BEYOND補聴器本体内ファームウェアの更新

アプリ更新後、補聴器を接続するときに「補聴器の更新」画面が表示された場合は、必ず更新を実行してください。

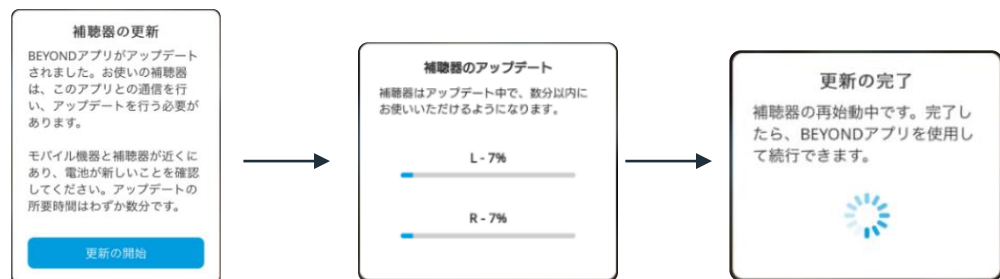

※作業が中断された場合、新しい電池を使用して再試行してください。

※「更新の完了」画面が5分以上続く場合、補聴器の電源オフ、10秒経って電源をオンにし、アプリを再起動してください。

## iPhoneからBEYONDへの音声伝送

iPhoneとBEYONDをペアリングすると、アプリでのリモコン操作に加え、iPhoneの音声をアクセサリーを経由せずにワイヤレスで聞くことができます。

### ● 電話



iPhoneに電話がかかってくると、着信音がBEYOND補聴器から聞こえてきますので、iPhoneを操作して通話をしてください。相手の音声は、補聴器に伝送されます。

### ● 音声ストリーミング




iPhoneで音声ファイルや動画を再生すると、音声は自動で補聴器に伝送されます。

### ● iPhoneをリモートマイクとして使う

騒がしい場所などで会話音がききとりづらい場合は、会話相手にiPhoneを渡し、iPhoneのマイクに向かって話してもらうことで、会話音声をBEYONDで直接聞くことができます。

1. iPhoneのホームボタンをトリプルクリック

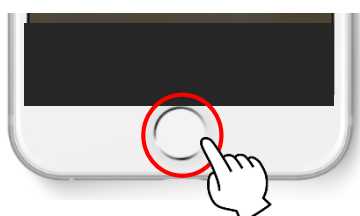

2. 「ライブリスニングを開始」をタップ



3. 終了するときは、「ライブリスニングを終了」をタップ

