

ハイブリッド充電補聴器 かんたんガイド



ポイントは **毎日の充電**

2019.11

初めて使用する際は充電が必要です。

図のように補聴器のバッテリードアを開けて充電電池を入れ、ドアを閉めてから、充電器にセットしてください。約8時間で充電完了です。



快適に使うために、毎日の充電を心がけましょう



充電器から外すと
補聴器の電源 **ON**

充電器に置くと
補聴器の電源 **OFF**

充電電池と空気電池



充電電池

くり返し使える電池です
8時間充電



空気電池

使い捨ての電池です
充電不可
茶色のラベルシール
PR41(312)

ワイデックスの充電補聴器は充電電池と補聴器用の空気電池どちらも使えるハイブリッド。充電が切れた時や旅行など充電できない時も空気電池が使えるので便利です。

以下の事を習慣づけ、毎日快適に使いましょう。

- 家に帰って補聴器を外したら、充電器にセットする
 - 長期間使用しない場合も、補聴器を充電器にセットしておく
- セットしておけない場合は、一度充電してから充電電池を外して保管する

！ 充電器のランプの見方



正常に充電中



充電完了



正しくセット
されていません

補聴器の向きや充電器の電源、充電電池が入っているか確認しましょう。



電池が充電
されていません

充電電池が正しく入っているか、空気電池が入っていないか確認しましょう。



気温が高すぎる
または低すぎる

適温(10°C~40°C)の
場所で充電しましょう。

• 補聴器を充電器にセットしてからランプが点滅するまで15秒程かかる場合があります。

改善しない場合はご購入店へご相談ください

ワイデックス株式会社

補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル: TEL ☎ 0120-332-604 FAX ☎ 0120-332-394

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

ハイブリッド充電補聴器の特徴を覚えましょう



この状態でも通電しています

補聴器に入っている限り、 バッテリードアを開けても電池は減り続けます。

図のような状態で置いたままにしておくと、充電電池の容量は減り続けます。充電電池の容量を使い切ってしまうと、その後の充電がうまくいかなくなる場合があります。しばらく使用しない場合は充電器にセットしておくか、一度充電した後、充電電池を補聴器から外して保管してください。

定期的なお手入れを忘れずに



充電器接点



補聴器接点



バッテリードア内部接点

汗や水分が付着したまま充電器にセットすると充電電池が劣化し正常に作動しない恐れがあります。補聴器と充電器の接点をブラシや綿棒、乾いた布などで拭いてください。

※お手入れの際、溶剤などの液体は使用しないでください。

充電電池の使用時間の目安

カタログ記載の連続使用時間はJIS規格に準拠した測定条件下での性能です。実際の使用状況により電池寿命は異なります。

(例)



Aさん
スマホ使用なし

約18時間




Bさん
通話、ストリーミング、
スマホアプリ・ゲーム常時使用

10時間未満

ワンポイントアドバイス

充電は適温で

10℃～40℃が適温です。気温が低すぎたり高すぎると充電器が正常に作動しない場合があります。

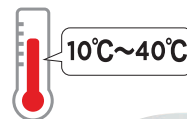

補聴器は乾燥が大切

補聴器を使った後は乾燥ケースや電気乾燥器で乾燥。乾燥器に入れる時は電池を外してください。(充電と乾燥が同時にできる乾燥器は除く)



しばらく使わない時は

2週間以上使わない時は充電器にセットしたままにしておくか、充電後に充電電池を補聴器から外して保管してください。



充電器にセット



電池は外して保管

充電電池の寿命

充電電池の寿命は約1年(充電回数400回)です。充電電池の使用時間が短くなってきたら、下記無償交換サービスをご利用ください。

こんな時は

充電電池に膨らみやサビ、液漏れ跡等が見られた場合は、充電電池の使用を中止し、ご購入店へ充電電池をお持ちください。

以下の場合には充電電池の使用時間が短くなります。充電電池無償交換サービスをご利用ください。

- ・購入後1年近く経過しているもの
- ・バッテリードアに入れたままで放電が進んでしまっているもの
- ・ストリーミングの多用など電力消費が早い使い方をしたもの

WIDEX ZPower 充電電池 無償交換サービス



「以前より、使用できる時間が短くなった」
「充電電池の持ちが悪くなってきた」と感じたら
新しい充電電池と無償で交換いたします!

このサービスは補聴器の保証期間中は何度でもご利用いただけます。詳しくはご購入店へお問い合わせください。