

フィッティングツールガイド

| MOMENT / MAGNIFY EVOKE / ENJOY / UNIQUE BEYOND / DREAM / DAILY | | CLEAR SUPER | MENU mind |
|--|--|--|--|
| CIC-M以外 | CIC-M | | |
| | | | |
| ワイヤレス接続 | 有線接続 | ワイヤレス接続 | 有線接続 |
| PRO LINK または USB Link または nEARcom | PRO LINK + PRO LINK Connector または USB Link + Widex Link Connector または nEARcom + Widex Link Connector | USB Link または nEARcom | NOAHlink + CIC m/m-CB Passion X 9 19 SP-38 |

有線接続用

プログラムチューの接続方法



CIC / CIC-M




バッテリーホルダーを45度開き、軽くひねりながら取り外す（本体とバッテリーホルダーを接続している左右2本の支柱から片側ずつ取り外す）。

プログラミングケーブルの先にアダプター（CIC用）を接続する。
アダプターをフェイスプレートに「カチッ」というまで差し込んで固定する。




**m / m-CB
Passion**

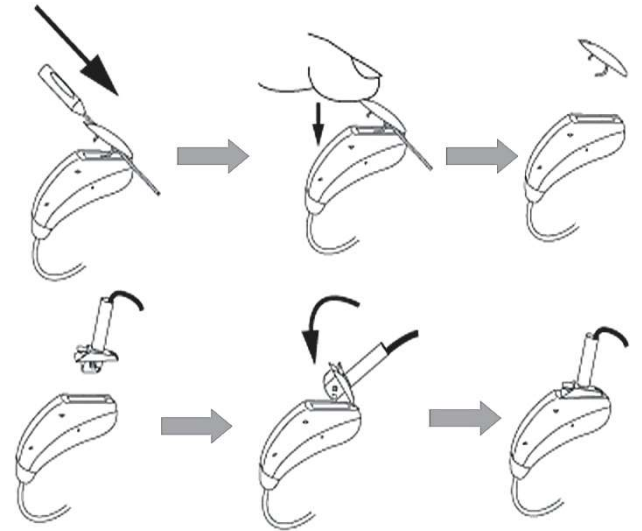

バッテリーホルダーを開く。ペント用クリーニングツールなど細いものをバッテリーホルダーの軸部分に差し込む。クリーニングツールを挟んだまま、バッテリーホルダーを閉じるように軽く押しすと、バッテリーホルダーが外れる。


プログラミングアダプターを左右2本の軸に45度の角度でしっかり差し込む。「カチッ」というまで差し込んで固定する。

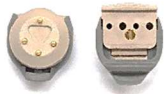

X


グレーのつまみを手前に引き、アダプターを補聴器本体に押しつけながら、つまみを押ししてロックする。

外すときはつまみを手前に引く。

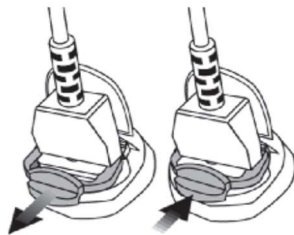

9

アダプターを下側から上方向に押し付け、「カチッ」というまで差し込んで固定する。

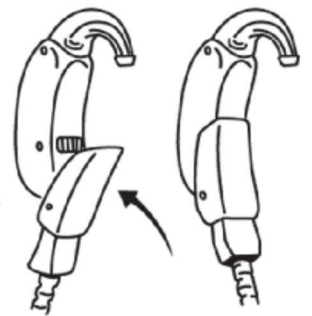

19

アダプターを下側からまっすぐ「カチッ」というまで差し込んで固定する。



SP / 38

アダプターを接続する場合は、補聴器側面にある半円状のカバーを外し、まっすぐ差し込む。

