




重要 : Compass V5.9.1 インストール前の注意

- COMPASS GPSのインストールにはDVDドライブが必要です。
- 対応OS : Microsoft Windows 11、Windows 10 (バージョン1607以降)
要Microsoft .NET Framework 2.0及び.NET Framework 4.7.2以降

※購入直後のWindows 11及びWindows 10パソコンは、Microsoft .NET Framework (以下 .NET) 2.0を含む .NET 3.5 が無効になっています。Compassをインストールする前に下記「.NET Framework 3.5の有効化」をご覧ください。(.NET 3.5を有効にしてください。 (**Microsoft .NET Framework 3.5を有効化するには、インターネット接続が必要です。**))


.NET Framework 3.5の有効化

1. Windowsキー()を押しながら「**Q**」キーを押しながら「**ta**」キーを押しながら「**コントロールパネル**」を検索して、開きます。

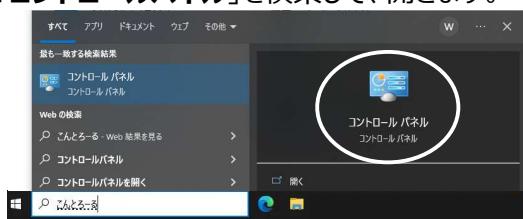

2. 「プログラムのアンインストール」、または「プログラムと機能」をクリックします。
3. 「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

4. **.NET framework 3.5 (.NET 2.0および3.0を含む)** にチェックを入れ、「OK」ボタンで閉じます。

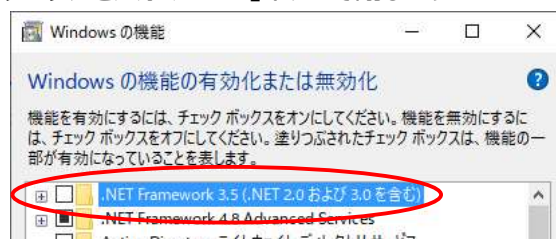


5. 「Windows Updateでファイルを自動ダウンロードする」をクリックします。
6. インストールが終わったら「閉じる」をクリックします。

Compass V5.9.1のインストール

1. Compass V5.9.1 DVDをパソコンのDVDドライブに挿入します。
2. 「自動再生」画面が表示された場合は「**フォルダーを開いてファイルを表示**」をクリックします。「自動再生」画面が表示されない場合は、タスクバーのエクスプローラー()から開きます。
3. 「Setup(.exe)」を右クリックし、「**管理者として実行(A)...**」をクリックします。「**ユーザーアカウント制御**」画面が表示された場合は、「**許可(A)**」または「**はい(Y)**」ボタンをクリックします。
4. 「CompassのInstallShield ウィザードへようこそ」画面で、「**次へ(N) >**」をクリックします。


5. 「**使用許諾契約**」画面で、「**はい(Y)**」をクリックします。
6. 「**セットアップタイプ**」画面で、「**Minimum installation**」を選択し、「**次へ(N) >**」をクリックします。

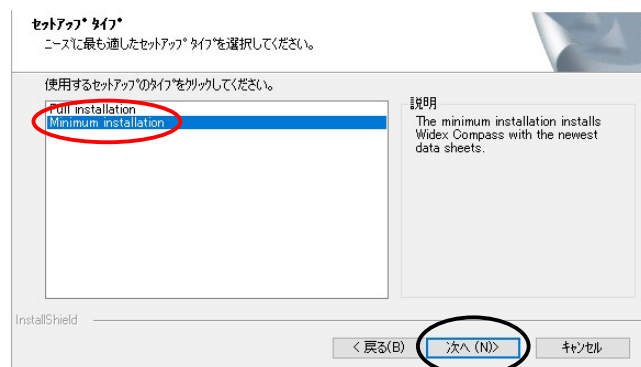

7. 「インストール先の選択」画面で、「**次へ(N) >**」をクリックします。
8. 「プログラムフォルダーの選択」画面で、「**次へ(N) >**」をクリックします。

裏面に続く

9. 「国の選択」画面で、
「Japan」を選択し、「次へ(N)>」をクリックします。
 10. 「言語を選択してください。」画面で、
「Japanese」を選択し、「次へ(N)>」をクリックします。
 11. 「他の言語を選択してください。」画面で、
「次へ(N)>」をクリックします。
 12. 「ショートカットの追加」画面で、
「はい」にチェックをし、「次へ(N)>」をクリックします。
 13. 「ファイルコピーの開始」画面で、
「次へ(N)>」をクリックします。
- ※ファイルのコピーが始まります。
コピーが終わるまで、しばらくお待ち下さい。
また、パソコンによってはコピーが開始されるまで数分かかる場合があります。誤ってパソコンを再起動しないでください。
14. 「Reminder」画面で、
「次へ(N)>」をクリックします。
 15. 「InstallShield Wizardの完了」画面で、
「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」にチェックし、「完了」ボタンをクリックしてください。

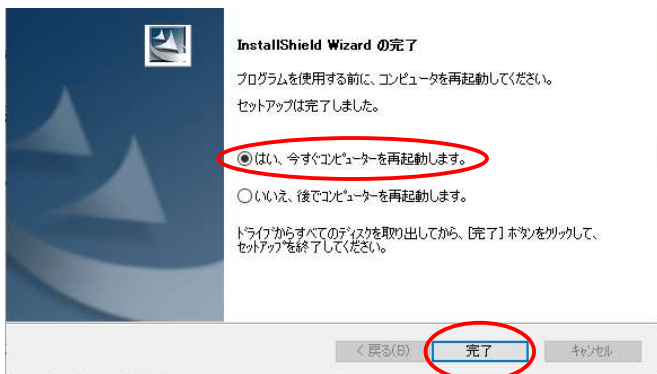


16. 再起動が終わったら、パソコンからCompass V5.9.1 DVD
を取り出してください。

以上で、Compass V5.9.1のインストールは終了です。

Compass V5.9.1の起動確認と設定変更

1. デスクトップまたはスタートメニュー内の「Compass Demo」アイコンを右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックしてください。

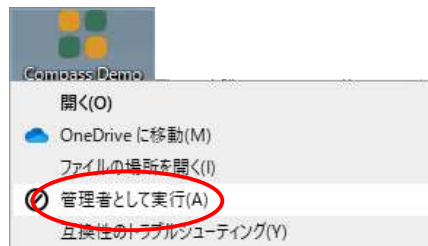

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」をクリックしてください。

重要


この手順を行わないと、Compass起動時にユーザーアカウント制御画面が表示されたり、Noah4からCompassが起動できなくなる可能性があります。

2. 「セットアップ」→「インターフェイス(I)」で必要なインターフェイスを追加し、「OK」で閉じます。



左のリストから必要なものをクリックし、追加をクリックします。

3. 「セットアップ」→「情報(n)」をクリックし、「Compass改善プログラム」を「オフ」に、「OK」ボタンで閉じます。

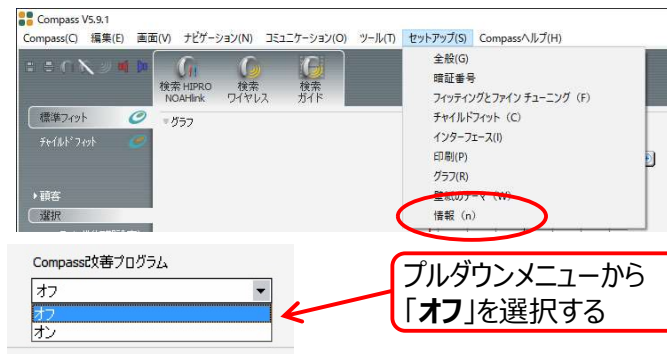

プルダウンメニューから「オフ」を選択する


以上で、Compassの起動確認と設定変更は終了です。

また、CompassでUSB Linkをお使いになる場合は、3ページ目へ進んでください。

Compass V5.9.1でUSB Linkを使用するために

同じパソコンにCOMPASS GPSがインストールされていて、かつ既にUSB Linkをお使いの場合は、Compass V5.9.1 DVDを入れ、「Support」→「Widex USB Link driver」の順に開いた上で、7.へお進みください。
また、**設定が終わるまで、パソコンにUSB Linkを取り付けないでください。**

1.  Compass V5.9.1 DVDをパソコンのDVDドライブに挿入します。

CDドライブの内容が表示されない場合は、タスクバーのエクスプローラー()からCDドライブを開きます。



2. 「Support」→「Widex USB Link driver」→「New Ver. 1.9.5」の順にフォルダを開きます。

3. 「Setup(.exe)」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」ボタンをクリックします。

4. 「Welcome to the Device Driver Installation Wizard !!」画面で、「次へ(N)>」をクリックします。


5. 「Completing the Device Driver Installation Wizard」画面で、「Widex A/S USB Link driver...」に緑のレ点がついていることを確認し、「完了」をクリックします。




6. 「←」や「↑」で、「Widex USB Link driver」フォルダまで戻ります。




7. 「WULC(.exe)」を右クリックし、コピーします。

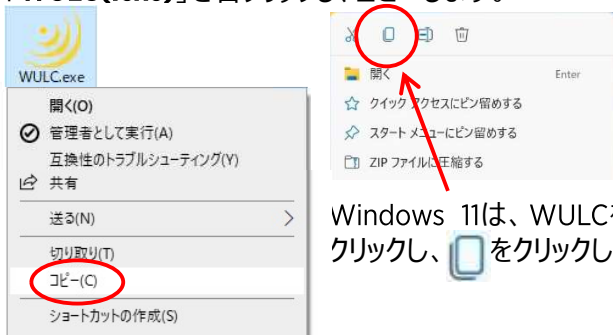

Windows 11は、WULCを右クリックし、 をクリックします。


8. 「←」や「↑」で、「PC」まで戻ります。

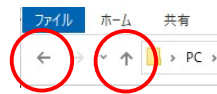


9. 「Cドライブ」→「Program Files (x86)」→「Common Files」→「Widex Shared」の順に開きます。


※Cドライブの名前は、PCメーカーによって異なります。
例：Windows(C:)、OS(C:)、ローカルディスク(C:) 等

10. 「Widex Shared」フォルダの開いているところで右クリックし、「貼り付け」を選択します。

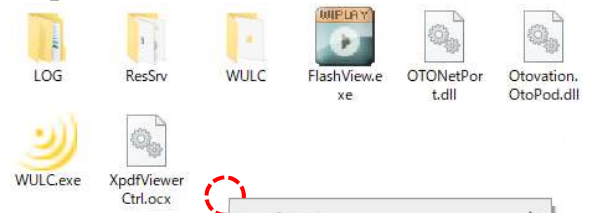

Windows 11は右クリックし、 をクリックします。

11. 「ファイルを置き換える(R)」をクリックします。

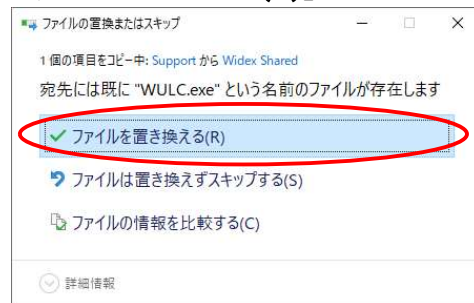

パソコンの設定によっては、管理者の権限が必要です。「続行(C)」をクリックします。



12. エクスプローラーを閉じ、USB Linkをパソコンに接続します。

以上で、Compass V5.9.1のUSB Linkの設定は終了です。