

重要：COMPASS GPS V4.x インストール前の注意

●COMPASS GPSのインストールにはDVDドライブが必要です。**CDドライブではインストールできません。**

●対応OS：Microsoft Windows 10（バージョン1607以降）

要Microsoft .NET Framework 2.0及び.NET Framework 4.7.2以降

※バージョン1511以前のWindows 10やWindows 8、Windows 8.1、Windows 7は、製造元サポート終了に伴い、動作対象外となります。

※購入直後のWindows 10 PCは、.NET Framework 2.0を含んだ .NET Framework 3.5が無効になっていますので、COMPASS GPSをインストールする前に .NET Framework 3.5を有効にする必要があります。


下記「.NET Framework 3.5の有効化」をご確認ください。（インターネット接続が必要です。）

COMPASS GPSの自動更新で最新版のGPSにアップデート済みのパソコンは、改めて最新版のGPS V4.x DVDからインストールする必要はありません。

Windowsのバージョン確認方法

1. キーボードのWindowsキー()を押しながら「R」キーを押します。

2. 名前の欄にキーボードから「winver」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。

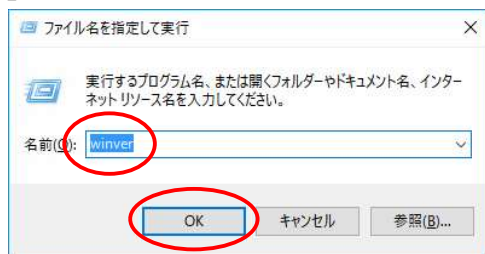

3. 対象OSかどうか確認します。



(参考) Windows 10の場合

インストールに必要な各OSのバージョン

Windows 10：バージョン 1607以降

4. 「OK」ボタンで「Windowsのバージョン情報」画面を閉じます。

.NET Framework 3.5の有効化

重要 .NET Framework 3.5を有効化するには、インターネット接続が必要です。

1. Windowsキー()を押しながら「Q」キーを押し「コントロールパネル」を検索し、開きます。

2. 「プログラムのアンインストール」、または「プログラムと機能」をクリックします。

3. 「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

4. .NET framework 3.5 のチェックボックスをオンにし、「OK」ボタンで閉じます。

5. 「Windows Updateでファイルを自動ダウンロードする」をクリックします。


6. インストールが終わったら「閉じる」をクリックします。

最新版COMPASS GPS V4.x インストール手順

1. 最新版のCOMPASS GPS DVDをパソコンのDVDドライブに挿入します。



2. 「自動再生」画面が表示された場合は「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。「自動再生」画面が表示されない場合は、タスクバーのエクスプローラー()から開きます。

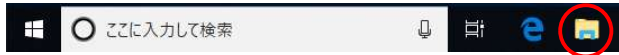

3. 「Setup(.exe)」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」ボタンをクリックします。

4. COMPASS GPSに必要なソフトのインストールを行います。「インストール」ボタンをクリックしてください。

※ GPSに必要なソフトがすでにインストールされている場合は表示されません。

※ 複数回、再起動を要求されることがあります。画面表示にしたがってパソコンを再起動してください。



5. 「COMPASS GPS用のInstallShield ウィザードへようこそ」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

6. 「使用許諾契約」画面で、「使用許諾契約の条項に同意します(A)」にチェックし、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

新規インストールの場合は 7.へ、バージョンアップの場合は 12.へお進みください。

7. 「インストール先のフォルダー」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。


8. 「言語を選択」画面で、「Japanese - JP」を選択し、「追加 >>」ボタンをクリックします。



9. 右の欄に「Japanese - JP」が追加されたことを確認し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



10. 「通常使用する言語を選択」画面で、プルダウンメニューから「Japanese - JP」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

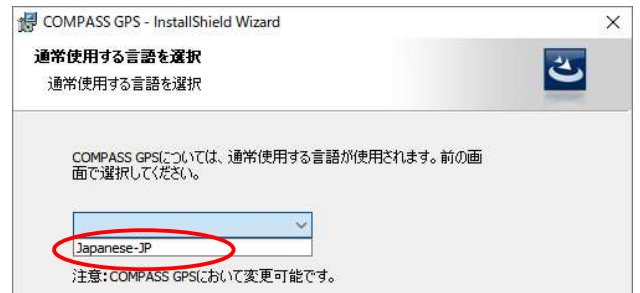


11. 「販売会社を選択」画面で「Japan」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

12. 「プログラムをインストールする準備ができました」画面で「インストール(I)」ボタンをクリックします。

COMPASS GPSのインストールが開始されます。インストール完了まで、しばらくお待ちください。

13. 「InstallShield ウィザードを完了しました」画面で、新しいパソコンなどUSB Linkの設定が必要な場合のみ「Widex USB Linkドライバーを...」にチェックを入れ「完了(F)」ボタンをクリックします。USB Linkを既にお使いの方はチェックを入れず、「完了(F)」ボタンをクリックします。

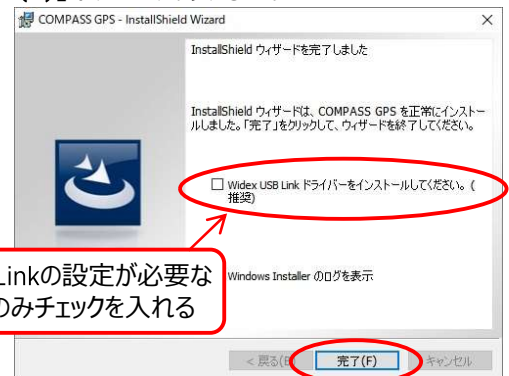

USB Linkの設定が必要な場合のみチェックを入れる

14. 開いているウィンドウを閉じます。COMPASS GPS DVDをパソコンから取り出し、パソコンを再起動してください。

以上で、COMPASS GPSのインストールは完了です。