

ワイデックスBTEモデル 各部の名称



BTE R D

1 - 電源の状況確認

補聴器の電源状況を確認するには、優先コントロールの下側を押します。補聴器がオンの場合、ライトインジケータは電池残量に応じて緑または赤で点滅します（ライトインジケータの説明をご覧ください）。

2 - 優先コントロール

優先コントロールの上側を押すと、補聴器の音量が増大して聞こえやすくなり、話し声が認識しやすくなります。下側を押すと全体的な音量が減り、より快適に聞こえるようになります。

3 - プログラム切替え

押すと、音のプログラムが順に切り替わります。

4 - オン/オフスイッチ

補聴器をオン・オフするには、3秒以上押し続けてください。オン・オフは、それぞれの補聴器で行ってください。

ライトインジケータの説明

補聴器のオン/オフ切替

- 緑でゆっくり点滅
補聴器はオンに切り替わっています
- 赤ですばやく点滅
補聴器はオフに切り替わっています

電源の状況確認

- 緑で点滅
補聴器はオンになっており、電池残量は20%以上です
- 赤で点滅
補聴器はオンになっており、電池残量は20%未満です

Bluetoothのペアリング

- 緑で点滅
補聴器はBluetoothデバイスとペアリングされました



BTE 13 D

1 - 電源 オン/オフ

電池ホルダーの開閉が電源のオン・オフを兼ねています。

2 - 電池ホルダー


電池ホルダーの凸部に指を掛け、ゆっくり開けてください。

3 - 優先コントロール

優先コントロールの上側を押すと、補聴器の音量が増大して聞こえやすくなり、話し声が認識しやすくなります。下側を押すと全体的な音量が減り、より快適に聞こえるようになります。

4 - プログラム ボタン

押すと、音のプログラムが順に切り替わります。

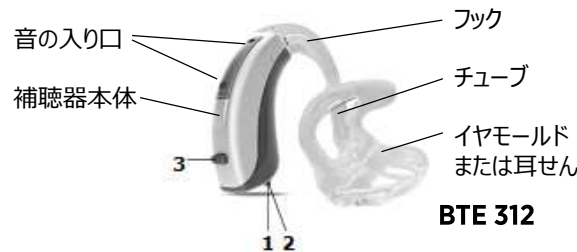

BTE 312

1 - 電源 オン/オフ


電池ホルダーの開閉が電源のオン・オフを兼ねています。

2 - 電池ホルダー

電池ホルダーの凸部に指を掛け、ゆっくり開けてください。

3 - プログラム ボタン

押すと、音のプログラムが順に切り替わります。

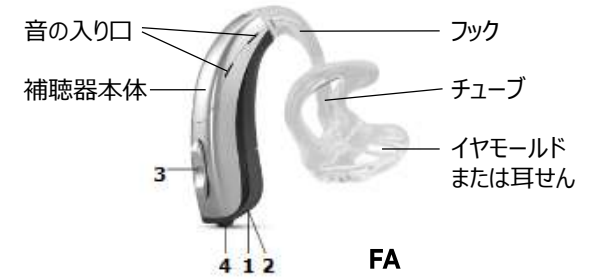

FA

1 - 電源 オン/オフ

電池ホルダーの開閉が電源のオン・オフを兼ねています。

2 - 電池ホルダー

電池ホルダーの凸部に指を掛け、ゆっくり開けてください。

3 - 優先コントロール

優先コントロールの上側を押すと、補聴器の音量が増大して聞こえやすくなり、話し声が認識しやすくなります。下側を押すと全体的な音量が減り、より快適に聞こえるようになります。

4 - プログラム ボタン

押すと、音のプログラムが順に切り替わります。



FP (FA-P)

1 - 電源 オン/オフ

電池ホルダーの開閉が電源のオン・オフを兼ねています。

2 - 電池ホルダー

電池ホルダーの凸部に指を掛け、ゆっくり開けてください。

3 - 優先コントロール

優先コントロールの上側を押すと、補聴器の音量が増大して聞こえやすくなり、話し声が認識しやすくなります。下側を押すと全体的な音量が減り、より快適に聞こえるようになります。

4 - プログラム ボタン

押すと、音のプログラムが順に切り替わります。