

EWレシーバー / V.2 EW イヤワイヤ付の選択から 補聴器の装着まで < S※/M/Pレシーバー >

※SレシーバーはEWレシーバーのみ

ご注文前：EWレシーバー / V.2 EWレシーバー イヤワイヤ付きの長さ選択

RIC/RITEアソートボックスに入っているイヤセットメジャーを使用し、適切なEWレシーバー イヤワイヤ付の長さを選び、補聴器を注文します。



耳珠の中央の数字に対応した長さのEW レシーバー イヤワイヤ付を選択します。
(左の写真では「3」)
2つの数字の間に耳珠の中央がきた場合は、1つ小さい数字に対応した長さを選択します。
※左の写真は一例です。外耳道の形状による個人差があります。


取り付け手順

1 イヤチップ・ナノケアワックスガードをEWレシーバー / V.2 EWレシーバー イヤワイヤ付に取り付けます。


既成イヤチップとカスタムイヤチップでは取り付け手順が一部異なります。

A) 既成イヤチップの場合

A-1) レシーバーの先端にナノケア ワックスガードを取り付けます。

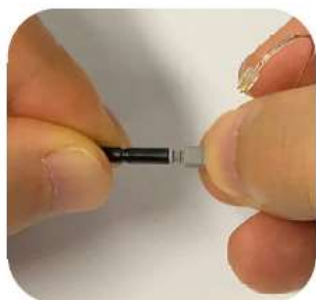


A-2) レシーバーの先端に既成イヤチップを取り付けます。

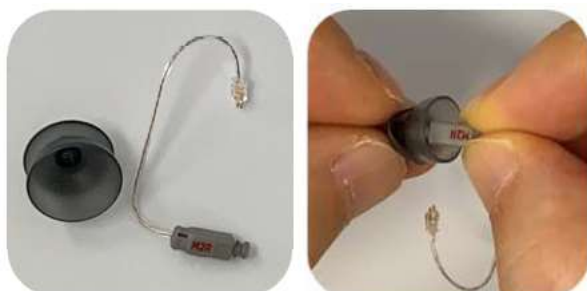

B) カスタムイヤチップの場合

B-1) レシーバーの先端にカスタムイヤチップを取り付けます。

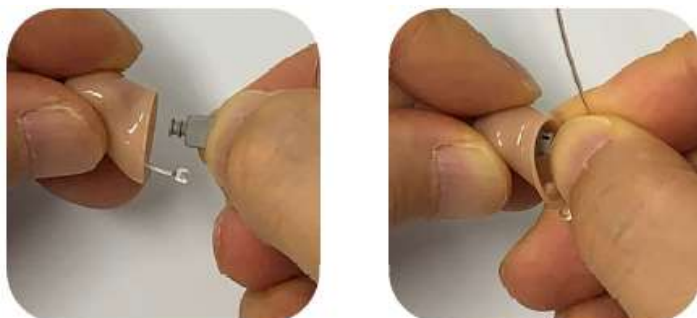

B-2) レシーバーの先端にナノケア ワックスガードを取り付けます。



2

補聴器とEWレシーバー / V.2 EWレシーバー イヤワイヤ付に取り付け

補聴器本体にEWレシーバー / V.2 EWレシーバー イヤワイヤと付を差込口にまっすぐ押し込みます。



3

補聴器の装着・脱着

① お客様の耳介に補聴器をかけます。




② イヤワイヤの下部分を持ちながらイヤチップを耳の穴に入れます。



③ イヤワイヤが耳の輪郭に沿うように装着します。



補聴器を耳から外す際は、初めに補聴器を耳の後ろから取り外し、イヤワイヤの下側を持ち、イヤチップを外耳道からゆっくり引き出します。イヤチップが外耳道の中に入った状態で補聴器をつかんで外そうとすると、イヤワイヤが断線したり千切れたりする原因になります。

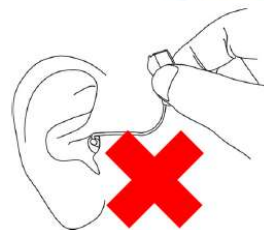


参考1：カスタムイヤチップの外し方

カスタムハードイヤチップを外す際は、RIC/RITEアソートボックスに入っているレシーバーツールを用います。また、EXカスタムイヤチップは、別紙「EXカスタム（レシーバー）イヤチップの取り付け方・取り外し方」をご覧ください。


① ナノケア ワックスガードを外します。



② レシーバーツールを音口に挿し込みます。

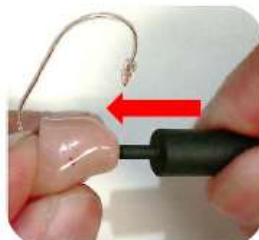

③ レシーバーツールを押し込みレシーバーを外します。

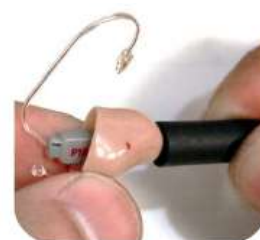

レシーバーツール

参考2：イーチップロックを取り付ける場合

オープンイヤチップやチューリップイヤチップで抜けてくる場合は、イーチップロックを付けることもできます。



① イヤチップを外耳道の入り口まで入れます。



② イーチップロックをコンチャのくぼみに合うように指で微調整します。



※ EWレシーバー / V.2 EWレシーバー イヤワイヤ付き、それぞれのイーチップロックの形状は異なります。また、これらのイーチップロックは、輪にして使用することはできません。