


EXカスタム（レシーバー） イヤチップの取り付け・取り外し方

EWレシーバー イヤワイヤ付（S/M/P）レシーバー / V.2 EWレシーバー（M/P）、EWフック&チューブ用共通


納品前の準備



適切なイヤワイヤ、またはチューブの長さを選び、補聴器を注文します。
下記「EW イヤワイヤ付レシーバー/EW フック&チューブの長さの選び方」を参考にお客様に
適した長さを選択してください。

1.  (V.2) EWレシーバー イヤワイヤ付または、(V.2) EWフック&チューブに、EXカスタム（レシーバー）イヤチップを取付けます。
裏面「EXカスタム（レシーバー）イヤチップの取り付け・取り外し」をご参考ください。

2.  イヤチップの先端にナノケアワックスガードを取付けます。

3.  イヤワイヤ、またはフック&チューブを補聴器に取り付けます。




COMPASS GPSで調整する際は、実際に使用するレシーバー、またはフック&チューブ、イヤチップを選んでください。



レシーバー
V.2 RIC M
イヤチップ/モデル
カスタム ハード イヤチップ
バンド
XS (0.7 mm)


EWレシーバー イヤワイヤ付/EWフック&チューブの長さの選び方

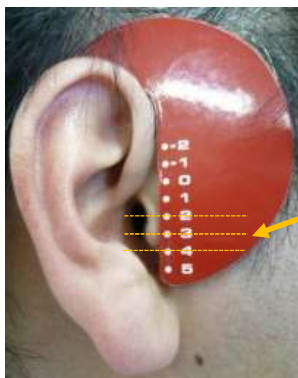

耳珠の中央の数字に対応した長さのEWレシーバー イヤワイヤ付を選択します。
（左の写真では「3」）
2つの数字の間に耳珠の中央がきた場合は、1つ小さい数字に対応した長さを選択します。
※左の写真は一例です。外耳道の形状による個人差があります。

EXカスタム（レシーバー）イヤチップの取付け・取外し


取り付け方

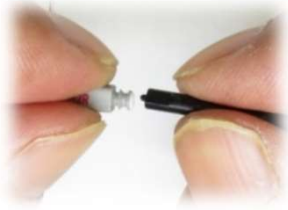


レシーバーやフック&チューブの音口部分にナノケアワックスガードが付いていない場合は、ナノケアワックスガードを必ず取り付けてからイヤチップを装着します。



レシーバー、またはチューブの先端をイヤチップに取付けます。レシーバー（グレー）部分が途中まで入ったら、指先でレシーバー（グレー部分）の先端を以下の写真のように奥まで押し込みます。

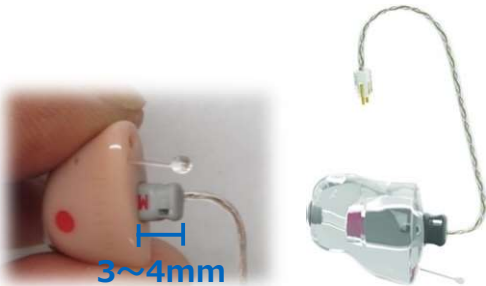


耳の大きさにもよりますが、イヤチップからレシーバーの後方3~4mm程度、外に出ることがあります。

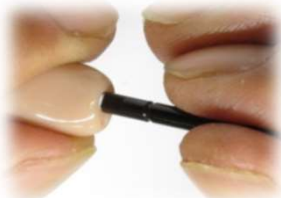

ナノケアワックスガードをイヤチップの先端に取り付けます。

※ 音口とイヤチップの両方にナノケアワックスガードを取付けることにより、耳垢や埃、湿気等の浸入をより防ぎます。

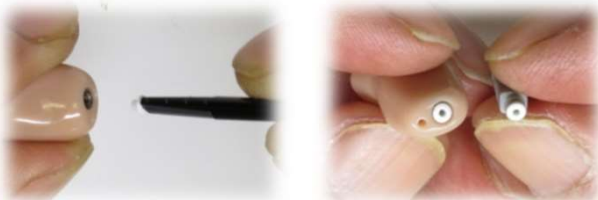


取外し方

- EW レシーバー イヤワイヤ付き
- EW フック&チューブ



EXカスタムイヤチップ取り外しツール

- ① レシーバー後方を取外しツールで挟み、イヤチップからレシーバーを引き抜きます。

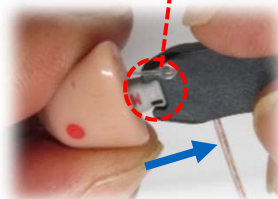

- V.2 EW レシーバー イヤワイヤ付き
- V.2 EW フック&チューブ



EXカスタムイヤチップ取り外しツール V.2 EW用


取り外しツールの中央を押すとツール先端が開きます。



- ① 取り外しツールの先端が開き、ツールの先端でレシーバーの後方を挟みます。レシーバーを挟んだら、ツール中央部の押し込みを緩め、ロックします。



- ② ツールでレシーバーをロックしたら、まっすぐ引き抜きます。

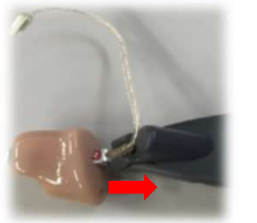

必要に応じて、イヤチップとレシーバー、またはフック&チューブのナノケアワックスガードを交換してください。