


参考：標準フックの外し方・取り付け方

<外し方>


補聴器本体をしっかり保持し、矢印の方向にフックを持ち上げるように外します。

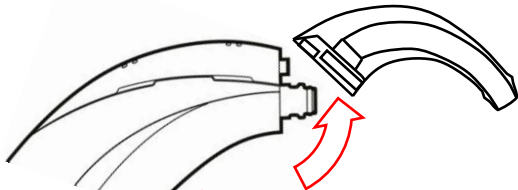

注意：フックは回転さないでください。


<取り付け方>

補聴器とフックの凹凸を合わせ、フックをまっすぐ差し込みます。

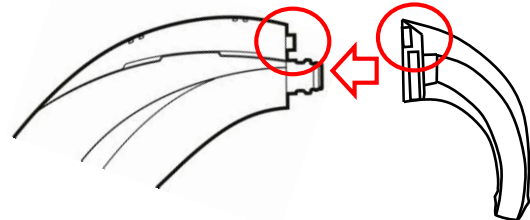


●EWフック&チューブの取り付け方


- EWフック&チューブを取り外しツールに取り付けます。補聴器とフックの凹凸を合わせまっすぐに差し込みます。
- 補聴器を取り外しツールから外します。

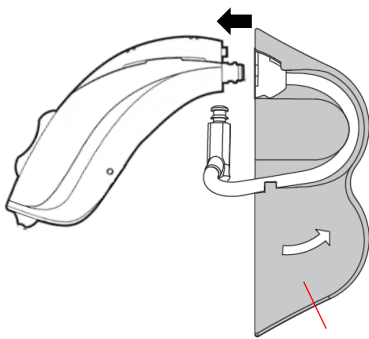

取り外しツール

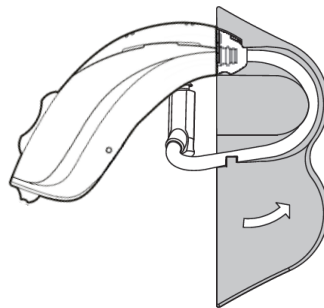

【ツールがない場合】


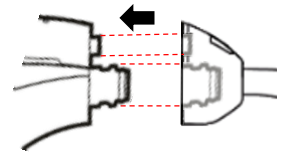


凹凸を合わせ、EWフック&チューブをまっすぐ差し込みます。


取り付ける際は、チューブを回転させないでください。

●EWフック&チューブの外し方

- 補聴器を取り外しツールに取り付けます。
- 補聴器をしっかり保持し、右図のようにツールを矢印の方向へ持ち上げるようにしてフックを外します。

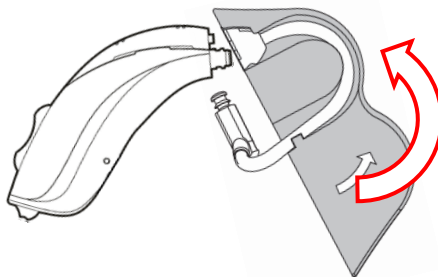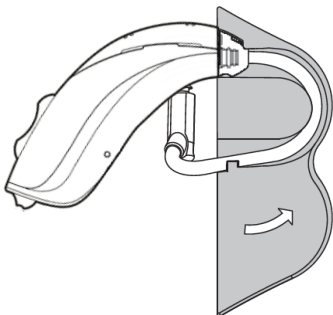

【ツールがない場合】

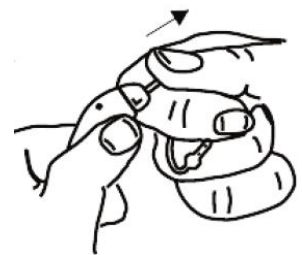

人差し指の上にチューブを置き、親指と中指でしっかりはさみます。その後、EWフック&チューブを勢いよく引っ張ります。

※注意：ゆっくり引っ張らないでください。チューブが伸びてしまう可能性があります。