

BTE 13 D フック&チューブの交換手順 (V.2 EWフック&チューブ 0.9/1.4mm)

WIDEX

2021年 5月

この資料は、MOMENT / EVOKE BTE 13 D のフック交換の際にご覧ください。

注意：BTE 13 D にFA/FM用EWフック&チューブはお使いいただけません。



ナノケアワックスガード
(予め装着されています)



V.2 EWフック&チューブ
接続アダプタ




V.2 EWフック&チューブ
(0.9mm/1.4mm)

V.2 EWフック&チューブの取り付け・取り外しには、V.2 EWフック&チューブの他にV.2 EWフック&チューブ接続アダプタとピン径の合う細いピン抜き工具が必要です。

●標準フックから V.2 EWフック&チューブに交換する手順

1. ピン径の合う細いピン抜き工具を使い、補聴器本体からロックピンを押し出します。

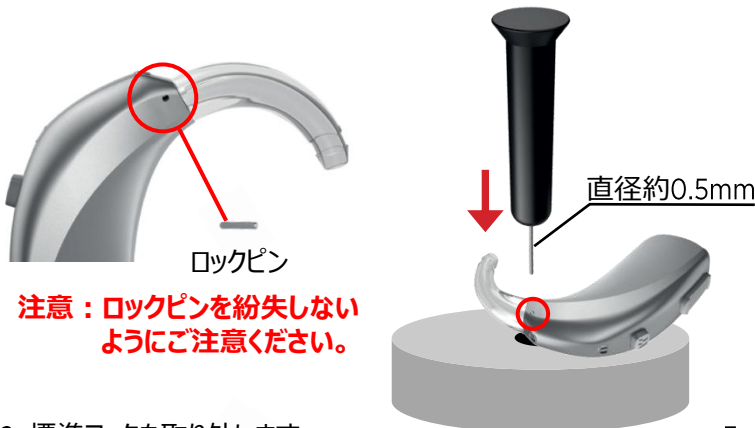

ロックピン

**注意：ロックピンを紛失しない
ようにご注意ください。**

ロックピン付け外しツールセットもございます。
(有償) 1,650円(税込)
ご注文は弊社営業またはカスタマーサービスへ
ご依頼ください。



ロックピン付け
外しツール



ロックピン付け
外し台座


2. 標準フックを取り外します。



3. 接続アダプタを補聴器に取り付けます。



4. 接続アダプタを取り付けたら、ロックピンを補聴器に対し垂直に押し込みます。

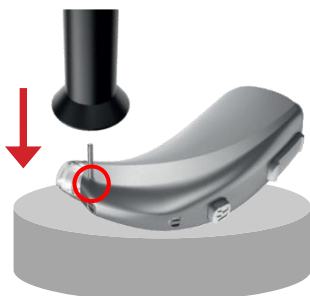


5. V.2 EWフック&チューブを挿し込みます。



●V.2 EWフック&チューブの外し方


1. V.2 EWフック&チューブを人差し指の上に置き、チューブを上から親指で押さえます。
2. 補聴器を反対の手で保持し、V.2 EWフック&チューブを右図の矢印の方向に**勢いよく引っ張り**、外します。

※注意 ゆっくり引っ張るとチューブが伸びたりちぎれることがあります。

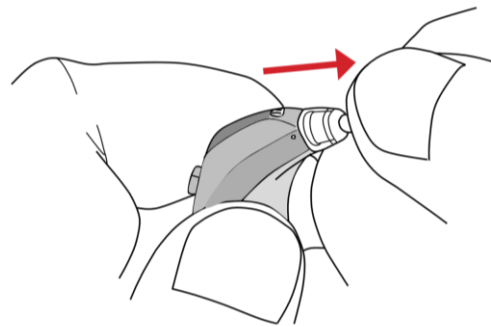

●接続アダプタの外し方と標準フックの取り付け方

1. ピン径の合う細いピン抜き工具を使って、補聴器からロックピンを押し出します。

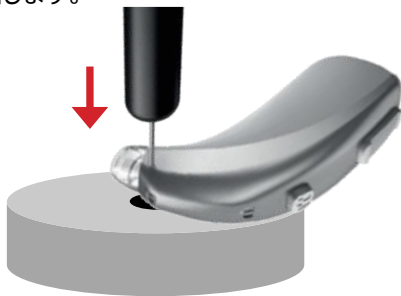

2. 補聴器本体から接続アダプタを取り外します。



3. 接続アダプタを外した補聴器に標準フックを取り付けます。



4. ロックピンを補聴器に対し垂直に押し込みます。




●カスタムイヤチップの取り外し手順

1. カスタムイヤチップを取り外す前にナノケアフックガードを外します。



2. カスタムイヤチップ取外治具を使用しV.2 EWフック&チューブの音口部分を押し出します。

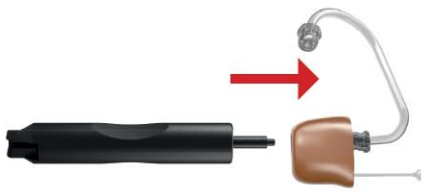


※カスタムイヤチップ取外治具は、RIC/RITEアソートボックスに入っています。

●イヤチップ取り付け時の注意


補聴器を外す際、イヤチップが耳の中に残ってしまったとご連絡をいただくことがあります。

多くのケースで、イヤチップがレシーバーやフック&チューブの適切な位置まで挿入されていないことが原因です。

イヤチップを取り付ける際は、右図を参考にレシーバーなどの根元の適切な位置まで挿入されているか、イヤチップの傘の部分めくってご確認ください。

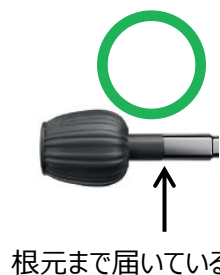

根元まで届いている

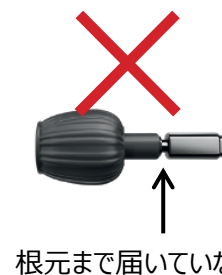

根元まで届いていない