

# フィッティングツールガイド


MOMENT / MAGNIFY EVOKE / ENJOY UNIQUE / BEYOND / DREAM / DAILY		CLEAR SUPER	MENU mind
CIC-M以外	CIC-M		
COMPASS™ GPS		COMPASS™	
ワイヤレス接続	有線接続	ワイヤレス接続	有線接続
 PRO LINK または  USB Link または  nEARcom  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">             MOMENT/MAGNIFY              末尾にDが付くモデル                Noahlink Wireless           </div>	  PRO LINK + PRO LINK Connector または   USB Link + Widex Link Connector または   nEARcom + Widex Link Connector	 USB Link  または  nEARcom	 NOAHlink +  CIC m/m-CB Passion   X   9   19   SP・38

有線接続用

# プログラムチューの接続方法



**CIC / CIC-M**

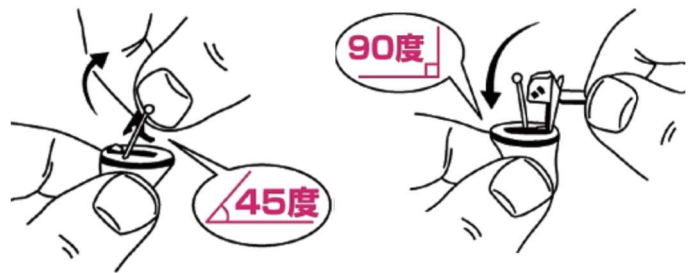


バッテリーホルダーを45度開き、軽くひねりながら取り外す（本体とバッテリーホルダーを接続している左右2本の支柱から片側ずつ取り外す）。

プログラミングケーブルの先にアダプター（CIC用）を接続する。  
アダプターをフェイスプレートに「カチッ」というまで差し込んで固定する。




**m / m-CB  
Passion**

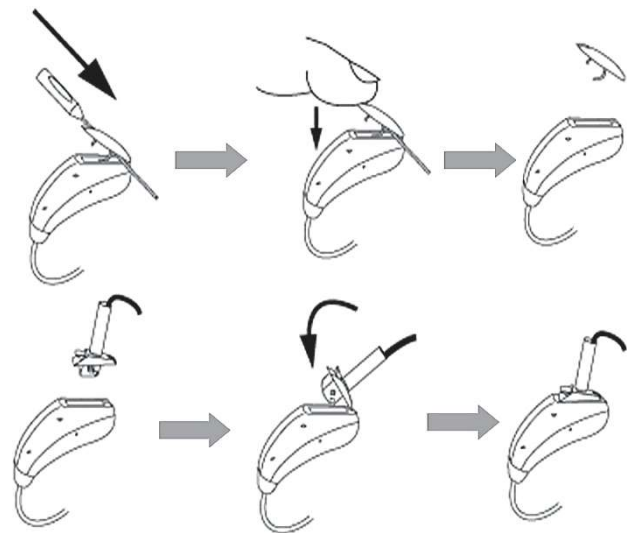

バッテリーホルダーを開く。ベント用クリーニングツールなど細いものをバッテリーホルダーの軸部分に差し込む。クリーニングツールを挟んだまま、バッテリーホルダーを閉じるように軽く押しすと、バッテリーホルダーが外れる。


プログラミングアダプターを左右2本の軸に45度の角度でしっかり差し込む。「カチッ」というまで差し込んで固定する。

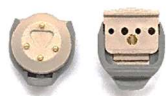

**X**


グレーのつまみを手前に引き、アダプターを補聴器本体に押しつけながら、つまみを押ししてロックする。

外すときはつまみを手前に引く。

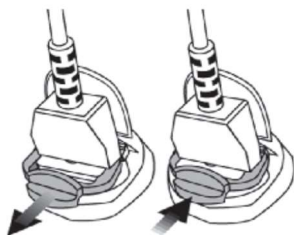

**9**

アダプターを下側から上方向に押し付け、「カチッ」というまで差し込んで固定する。

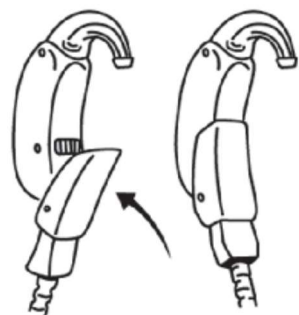

**19**

アダプターを下側からまっすぐ「カチッ」というまで差し込んで固定する。



**SP / 38**

アダプターを接続する場合は、補聴器側面にある半円状のカバーを外し、まっすぐ差し込む。

