


指示があるまで、Hi-Pro 2とパソコンを接続しないでください。

1. Hi-Pro 2 インストールCDをパソコンのDVDドライブに挿入します。




2. 「自動再生」画面が表示された場合は「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。

「自動再生」画面が表示されない場合は、タスクバーのエクスプローラー()から開きます。

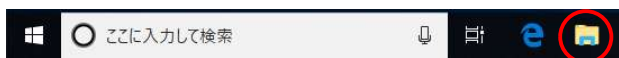

3. 「Setup(.exe)」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」ボタンをクリックします。

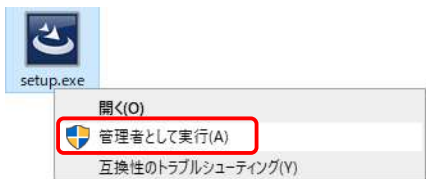


4. 「Welcome to the InstallShield wizard for Hi-Pro」画面で、「Next >」ボタンをクリックします。

5. インストールする言語を選択します。「English」のまま、「Next >」ボタンをクリックします。


6. 「Custom Setup」画面は、変更せず「Next >」ボタンをクリックします。

7. 「Ready to Install the Program」画面で、「Install」ボタンをクリックします。インストールが終わるまで少しお待ち下さい。


8. 「InstallShield wizard Completed」画面が表示されたら、「Finish」ボタンをクリックせず、9へ進みます。

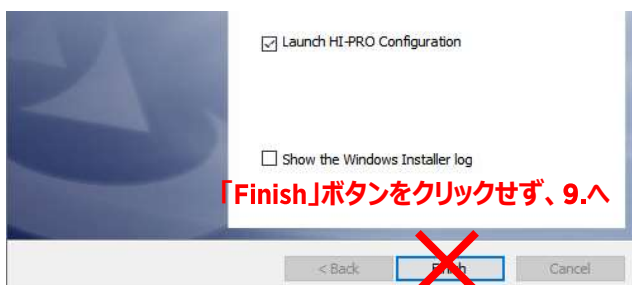


9. Hi-Pro 2を付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。ドライバが自動的に適用され、Hi-ProのPowerランプが点灯します。また、パソコン画面右下のタスクトレイに2と表示されます。

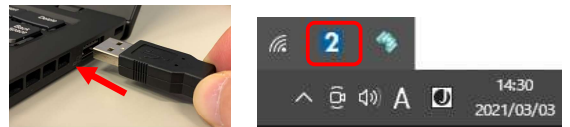

10. 「InstallShield wizard Completed」画面で、「Launch Hi-Pro configuration」にチェックを入れ、「Finish」ボタンをクリックします。

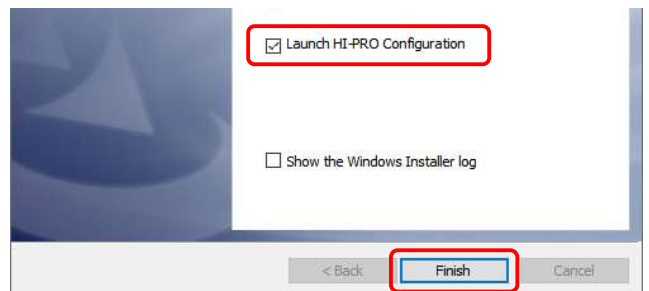


11. Hi-Pro 2の通信確認が行われ、通信に成功すると画面上部に「Hi-Pro 2 was found!」と表示されます。「Next >」ボタンをクリックします。

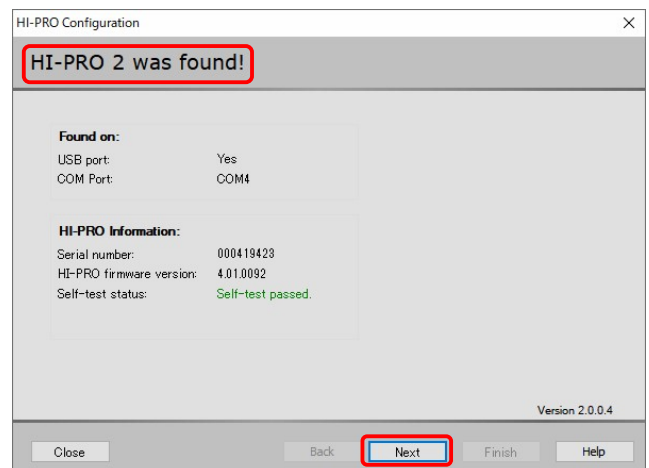

Warning!が表示された場合

Hi-Proが通信できる通信ポート（COMポート）は、COM1～4です。COM5以上が割り当てられた場合は、下図のような警告が表示されます。「参考：COMポート設定」を参考にCOMポートを割り当ててください。

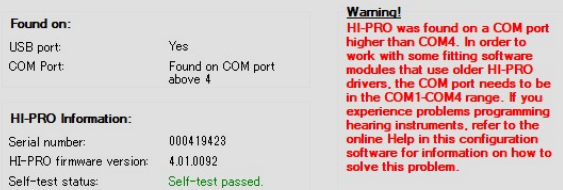


12. 「Firmware upgrade」画面で、「Finish」ボタンをクリックします。

13. パソコンからHi-Pro 2 インストールCDを取り出し、パソコンを再起動してください。

14. Noah4をお使いの方はNoah4アイコンを、Noah4をお使いでない方はCompass Demoアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。




15. 「互換性」タブ内の「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れ、「OK」ボタンで閉じます。

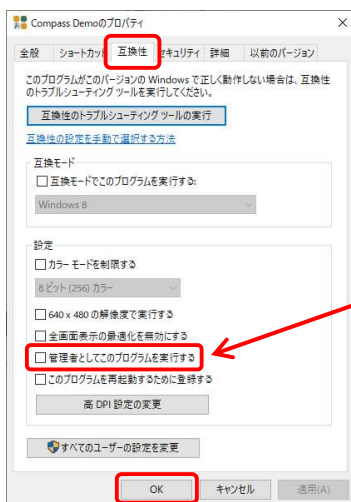


以上で、Hi-Pro 2 のインストールと設定は完了です。

参考：COMポート設定


I. スタートボタンを右クリックし、「デバイス マネージャー」をクリックします。

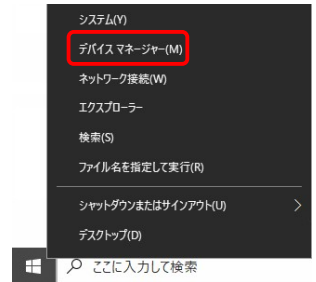


II. ポート（COMとLPT）をダブルクリックし、「HI-PRO（COM○）」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

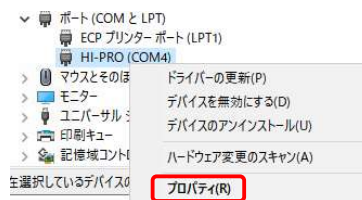

III. 「ポート設定タブ」をクリックし、「詳細設定」ボタンをクリックします。

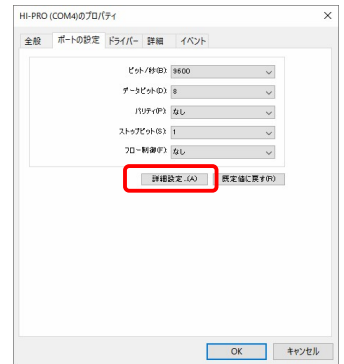

IV. COMポート番号のプルダウンメニューをクリックし、COM1～4で空いているCOMポートを指定します。指定が終わったら、「OK」ボタンで画面を閉じます。

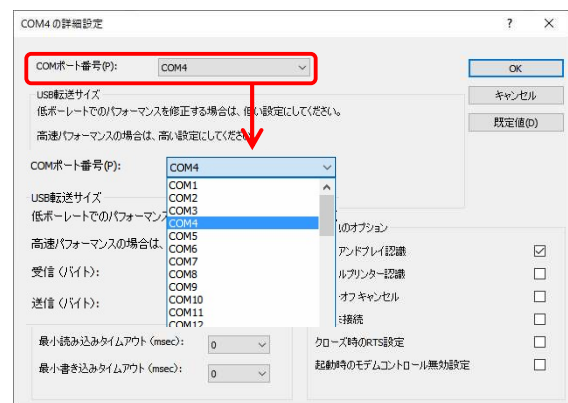

※COM1～4が使用中になっている場合、現在使用している機器のCOMポートを変更する必要があります。なお、変更したことによりその機器が動作しなくなる恐れがあります。

V. デバイス マネージャー等の画面を閉じます。

VI. タスクトレイの 2 アイコンをクリック、「Start HI-PRO Configuration」をクリックして、1ページ11.へ戻ります。

