

NOAHlink 設定マニュアル ～v1.56.05～

当マニュアルはOS標準のBluetoothドライバを使用した場合の手順になります。

家電量販店等で購入したパソコン周辺機器メーカー製Bluetoothをお使いになる場合、Bluetoothに付属しているBluetoothソフトはインストールしないでください。

○事前準備

- 最新版のCOMPASS GPS、または最新版のCompass CD（2枚目）
NOAHlinkに付属していた古いNOAHlinkインストールCDはお使いにならないでください。
- Bluetooth内蔵パソコンの場合はBluetoothをオンに、Bluetooth非内蔵パソコンは、NOAHlinkに付属のBluetoothを接続してください。

○NOAHlinkソフトのインストールとペアリング

1. インストール用CDの挿入

パソコンのCD(またはDVD)ドライブに最新版のCOMPASS GPS DVD、またはCompass CD（2枚目）を挿入します。

自動再生画面が表示されたら、「**フォルダーを開いてファイルを表示**」または、「**エクスプローラーを開く**」をクリックします。

※ **何も表示されない場合**は、「スタート」ボタン→「コンピューター」の順に開き、「CD(またDVD)ドライブ」を**右クリックし「開く」**をクリックします。

お使いのインストールディスクによって、操作手順が変わります。

最新版のCOMPASS GPS DVDをお使いの場合：

→**COMPASS GPS DVDの場合**へ

最新版のCompass CDをお使いの場合：

→**COMPASS CD2の場合**へお進みください。




COMPASS GPS DVDの場合：

- I. 「Support」→「NOAHlink」→「NOAHlink Properties Program V01.56.05」の順にフォルダーを開きます。
- II. 「 NOAHlink_01.56.05(.exe)」を**デスクトップにコピー**してください。
- III. デスクトップにコピーした「 NOAHlink_01.56.05(.exe)」をダブルクリックします。


COMPASS CD2の場合：

- i. 「Support」→「NOAHlink」→「0_NOAHlink Properties Program V01.56.05」→「Installation」の順にフォルダーを開きます。
- ii. 「 Setup(.exe)」を右クリックし、「**管理者として実行(A)**」をクリックします。

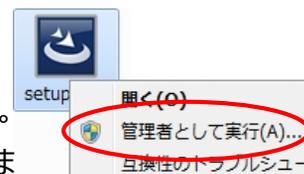


2. 「設定言語選択画面」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。
3. 「NOAHlink セットアップへようこそ」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。
※インストールが開始されますので、インストールが終わる前でお待ちください。


4. 「InstallShield Wizardの完了」画面で、「接続ウィザードの起動」にチェックが入ったまま、「完了」ボタンをクリックします。

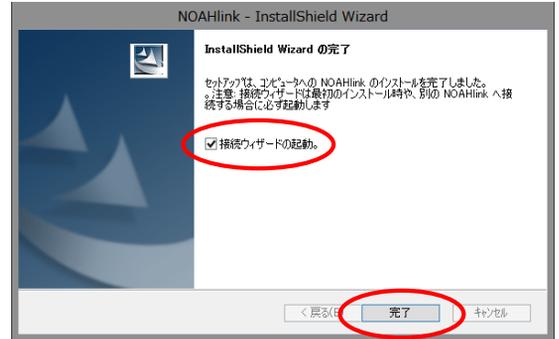


「ご使用のNOAHlinkがオンの状態になっていることを確認します」と表示された場合
 この画面が表示されたら、開いている画面を閉じ、4ページ「Bluetoothの確認」を参考にパソコンのBluetoothを確認します。

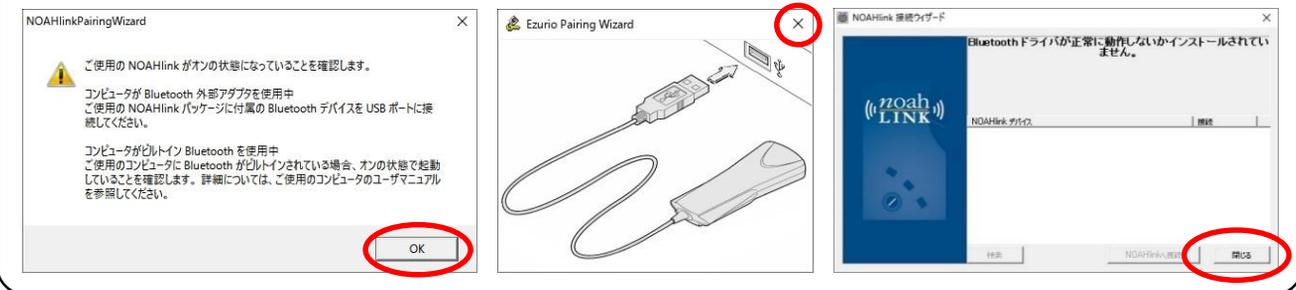

5. NOAHlinkに電源を入れます。
6. 「NOAHlink 接続ウィザード」画面で、「検索」ボタンをクリックします。

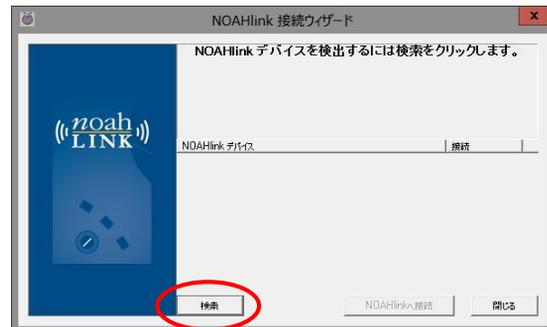

7. 接続するNOAHlinkのシリアル番号が表示されたら、表示されたNOAHlinkの項目をクリックし、「NOAHlinkへ接続」ボタンをクリックします。

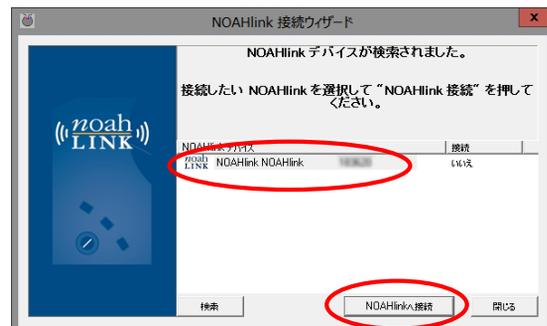

※ NOAHlinkドライバのインストールに時間がかかります。
 インストールが終わるまでお待ちください。



8. 「NOAHlinkデバイスは接続されました。」画面を「OK」ボタンで閉じます。



9. 「NOAHlink接続ウィザード」画面を「閉じる」ボタンで閉じます。



10. 「NOAHlink Properties」を起動します。起動方法は、お使いのWindowsによって変わります。

●Windows 10/7の場合：


「スタート」ボタン → 「すべてのアプリ（またはプログラム）」 → 「NOAHlink」 → 「NOAHlink Properties」の順にクリックします。




●Windows 8.1 / 8の場合：

キーボードの  キーを押しながら、 キーを押し、チャームを表示します。「 検索」で「NOAHlink」を検索、検索結果から「NOAHlink Properties」をクリックします。


11. 「NOAHlinkプロパティ」画面で、「検索(R)」ボタンをクリックします。

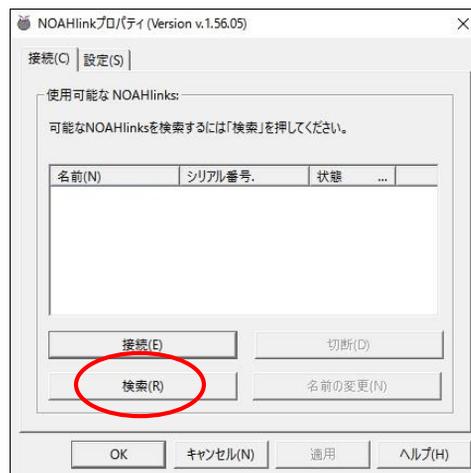

12. 接続したいNOAHlinkが表示され、状態が『**利用可能**』になっていることを確認し、「接続(E)」ボタンをクリックします。

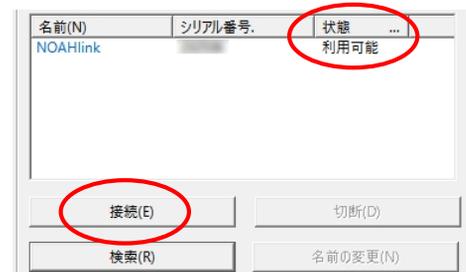


13. 状態が『**接続済み**』になったら、「OK」ボタンで画面を閉じます。

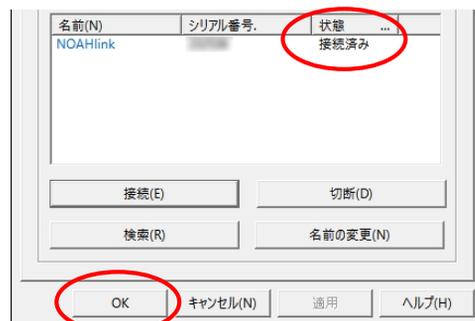

以上で、NOAHlinkソフトのインストールとペアリングは完了です。

○参考：Bluetoothについて

※NOAHlink接続ウィザードで、右の画面が表示された場合、パソコンにBluetoothが接続されていないか、故障などでBluetoothが認識されていない、サードパーティ製Bluetoothソフトを使用している可能性があります。

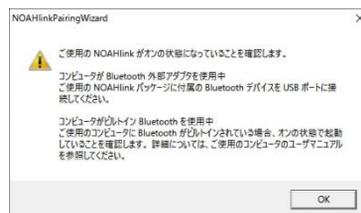

○使用しているBluetoothの確認

お使いのパソコンのBluetoothの有無、OS標準のBluetoothソフトかパソコン周辺機器メーカー製Bluetoothソフトの使用などは、デバイスマネージャーで確認できます。

●Windows 10/8.1の場合：

「 スタート」ボタンを右クリック → 「**デバイスマネージャー(M)**」の順にクリック

●Windows 7の場合：

「 スタート」ボタン → 「コンピューター」を右クリック → 「プロパティ(R)」をクリック → 「デバイスマネージャー」をクリック

デバイスマネージャー画面で、Bluetooth項目を確認します。

●Bluetoothがない場合




Bluetoothを内蔵していないか、外付けBluetoothまたは、USBポートに問題があります。外付けBluetoothを他のUSBポートに取り付けてみます。変化がない場合はBluetoothの購入元へご連絡ください。

●「Bluetooth無線」の項目があり、「Microsoft Bluetooth Enumerator」がある場合



NOAHlink接続ウィザードで設定可能です。
NOAHlinkとのペアリングを行います。

●「Bluetooth」項目に、「Microsoft Bluetooth Enumerator」がない場合

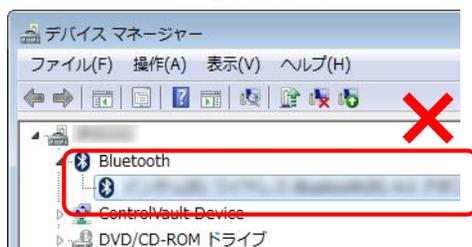

パソコンや購入したBluetoothの取扱説明書に従ってBluetoothペアリングを行ってください。

参考：PINコードを要求された場合

Bluetoothのペアリング時にPINコードの入力を要求された場合は、PINコード「1234」を入力してください。