

Noahlink Wirelessの使い方



2021年6月

● Noahlink Wirelessを使う前に


既にNoahlink Wirelessをお使いの場合は、COMPASS GPSでインターフェースを追加するだけです。
これからNoahlink Wirelessをお使いになる場合は、Noahlink Wirelessをパソコンと接続する前にNoahlink Wireless用のドライバをインストールする必要があります。付属のUSBメモリ、またはCOMPASS GPS DVD（V4.2以降）からインストールしてください。

（参考）COMPASS GPSの場合：「Compass GPS DVD」-「Support」-「NoahlinkWireless」


また、最新のNoahlink Wirelessのドライバ/ファームウェアは、HIMSAのWebサイトやCOMPASS GPS DVDにあります。
https://www.himsa.com/himsa_download/noahlink-wireless-downloads/

● インターフェースの追加

1. 「セッションスタート」-「COMPASS設定」-「インターフェース」の画面でNoahlink Wirelessを「使用可能なインターフェース」へ移動

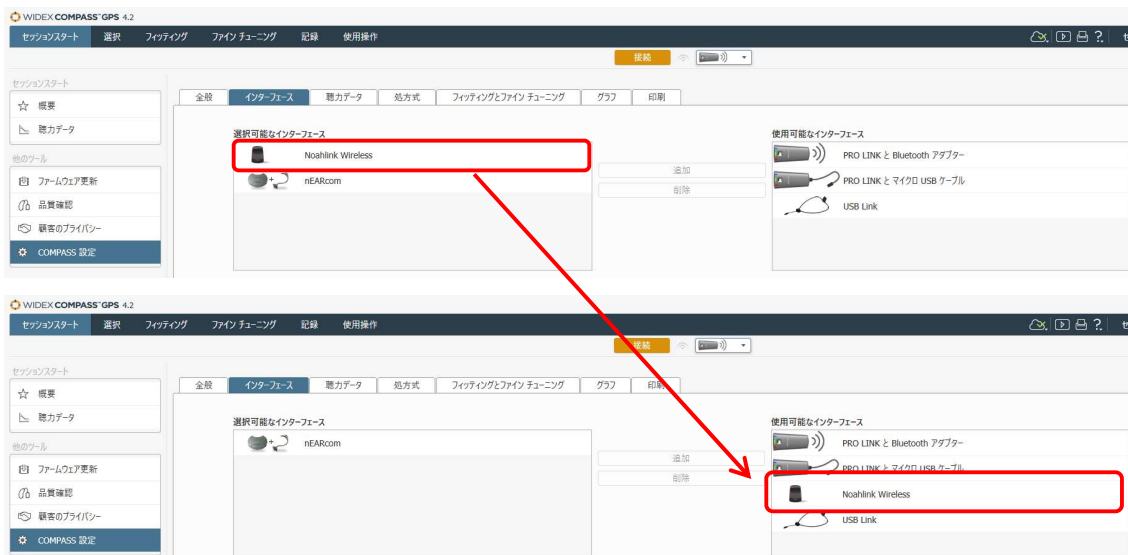

2. 「接続」の右側のインターフェース選択でNoahlink Wirelessを選択

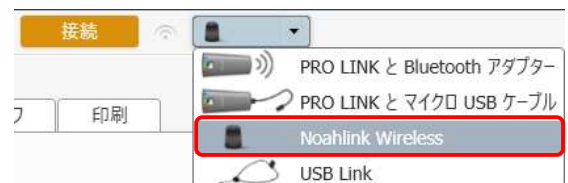

以上で、Noahlink Wirelessでの検索が可能です。

● Noahlink Wireless使用時の注意

MOMENT DEMO器を検索した場合、どのクラスに設定していても必ず440クラスとして検出されますので、ご注意ください。
その後のクラス変更は可能です。

