



● COMPASS GPSへのインターフェース追加

COMPASS GPSでNoahlink Wirelessをお使いになる前に、GPSでインターフェースの追加が必要です。
インターフェースの追加手順は次のとおりです。

1. 「セッションスタート」-「COMPASS設定」-「インターフェース」の画面で、Noahlink Wirelessを「使用可能なインターフェース」へ移動します。

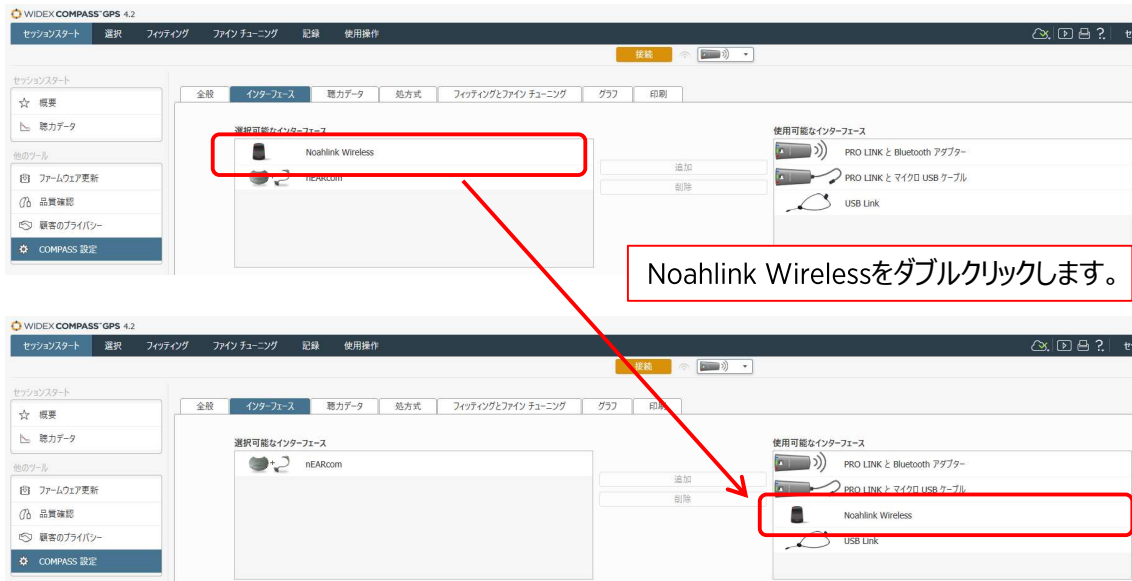

2. 「接続」の右側のインターフェース選択でNoahlink Wirelessを選択

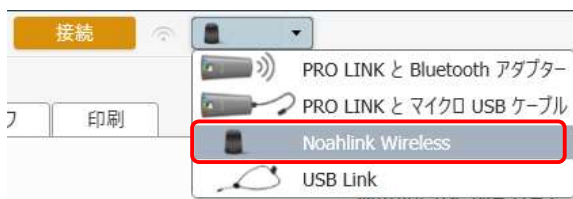

以上で、COMPASS GPSのインターフェースにNoahlink Wirelessが追加され、補聴器検索が可能になります。

● Noahlink Wirelessで接続できるモデルと注意点

MOMENT / MAGNIFY シリーズで、かつスマートフォンと直接Bluetoothでペアリングできるモデル。
(sRIC R DやBTE 13 D等のモデル名の最後に“D”が付くモデル)

※注意：NOAHlink Wirelessをご利用になる際は、補聴器とスマートフォンがBluetooth通信していないことをご確認ください。接続時は念のためスマートフォンのBluetoothをオフにすることをお勧めします。

モデル名の最後に“D”が付かないモデルは、PRO LinkやUSB Linkをお使いください。