

# CIC-Mモデル専用PRO LINK コネクター 使用ガイド

PRO LINK コネクターは、PRO LINKとCIC-Mを接続するために使用します。



PRO LINK コネクター



## PRO LINK コネクター使用上の注意点

PRO LINK コネクターを接続した状態では、他のワイヤレス補聴器の調整はできません。  
**CIC-Mを調整するときのみ、PRO LINK コネクターを接続するようにしてください。**

CIC-Mの調整が終わりましたら、PRO LINKからPRO LINK コネクターを外し、PRO LINK付属のネックループに戻してください。

また、CIC-Mを接続するために、CIC用プログラミングコードが必要になります。  
CIC用プログラミングコードは、PRO LINK コネクターには付属していませんので、既存のNOAHlink用のものをお使いください。



CIC用プログラミングコード

## PRO LINK コネクターをお使いになる前に



PRO LINK コネクターをお使いいただく際は、アルカリボタン電池 LR44が1個必要です。

PRO LINKに取り付ける前に、ボタン電池を入れてください。

補聴器用空気電池 PR44もご使用になれますが、使用しない間も電池を消耗してしまうため、ご注意ください。  
また、LR44電池は、市販のものをお使いください。

PRO LINK コネクターのピン側に電池ボックスがあります。  
コインなどを使って蓋を開けます。

電池ボックスにLR44電池を入れ、蓋を閉めます。

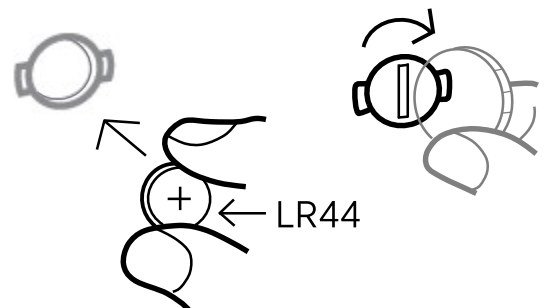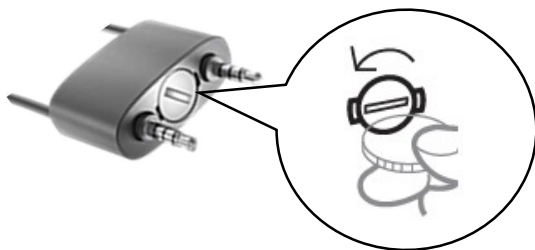


TESTボタンで電池チェックができます。




ランプが緑に点灯すれば  
お使いいただけます。

## PRO LINK コネクターの使い方

1. PRO LINKからネックループを外します。

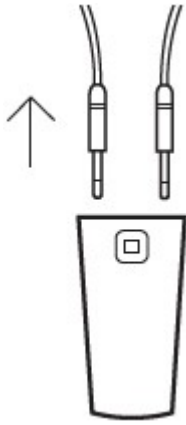


2. PRO LINK コネクターをPRO LINKに取り付けます。

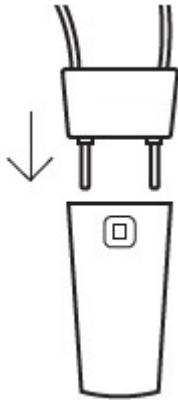


3. PRO LINK コネクターにCIC用プログラミングコードを取り付けます。



4. CIC-MにCIC用プログラミングコードを取り付け、お客様に補聴器を装着していただきます。

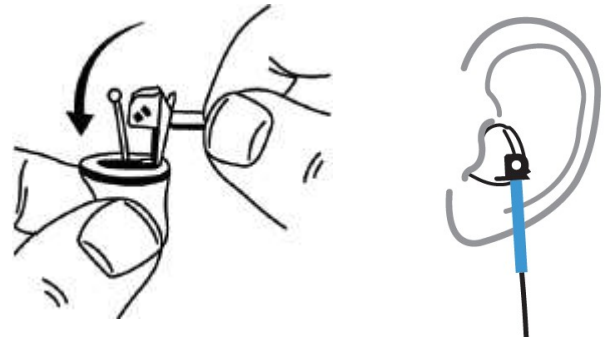

5. CIC-Mのフィッティングを行います。

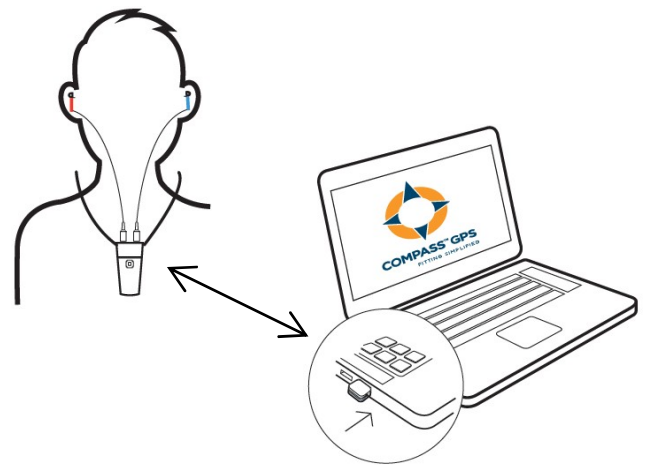

6. フィッティングが終わったら、PRO Linkの電源をオフにし、次回のフィッティングのために、PRO LINK コネクターを外し、元のネックループに戻します。

