





## 音質調整ボタン

低・中・高帯域ごとのバランス調整や左右個別の音量設定（両耳装用の場合）を行います。

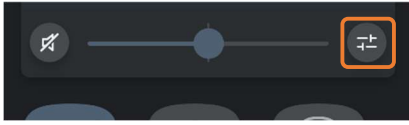

音量を上げる

音量を下げる

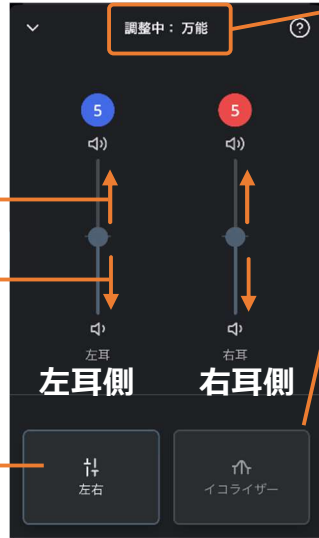

ベースになるプログラム

## イコライザー

（低・中・高帯域ごとのバランス調整）



上げる

下げる


よく使われる設定を用意しています。

DEX経由でストリーミング中もイコライザー調整が可能です。

設定する項目をタップします。  
※左右は、両耳装用の場合です。

## <お気に入りプログラムの作成>

音量調整やイコライザーを動かし好みの音質にした設定を「お気に入りプログラム」として登録し、後から使用することができます。

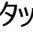
1. 音量調整やイコライザーなどで好みの音質に調整します。調整後、「」をタップしてトップ画面に戻ります。
2. 「名前を付けて保存」をタップします。
3. 登録する設定に名前を付け、アイコンを選択し、「作成」をタップします。



## <お気に入りプログラムの変更>

変更したいお気に入りプログラムを選択します。



 をタップするとメニューが表示されます。

プログラム名やアイコンの変更

メイン画面に表示される画像を変更

スマートフォンの位置情報を保持し、その場所に移動したら、自動的に該当するプログラムに切り替わります。


選択したプログラムの削除

## <ストリーミング中の音質調整>




ミュート（消音）ボタン/ 優先コントロール（音量調整）：1ページ目をご覧ください。


- ・左右（音量調整）（※両耳装用の場合）
- ・イコライザー（低・中・高域ごとのバランス調整）  
2ページ目の「音質調整ボタン」をご覧ください。
- ・サウンドミキサー（ストリーミング音と周囲の音のバランス調整）  
補聴器のマイクに入った周囲の音とストリーミングやテレコイルからの入力などのバランスを調整できます。

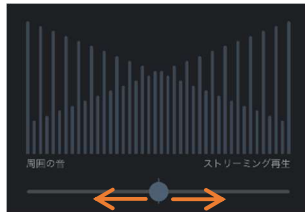

スライダーを左右に動かし優先する音を選びます。

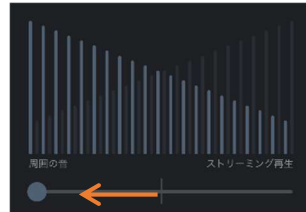

周囲の音（補聴器のマイク入力）をよく聞きたい場合は左へ。

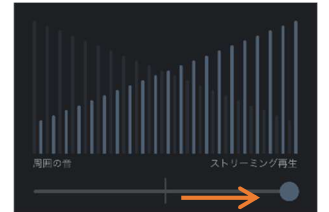


電話や音楽などのストリーミング音をよく聞きたい場合は右へ。

音声聴取に適した設定

音楽聴取に適した設定

## <聞きたい方向を選択>

一時的に前後左右のいずれか特定の方向※からの音を中心に聞きたい場合に使用します。

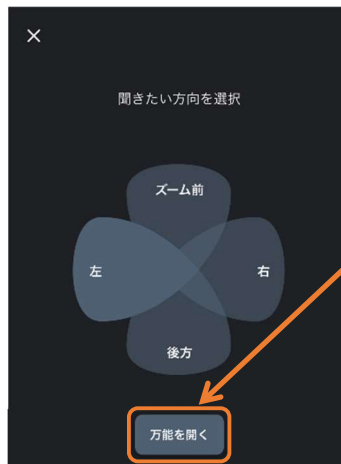


聞きたい方向を解除する場合は、「聞きたい方向を選択」アイコンをタップし「万能を開く」をタップするか、メイン画面で他プログラムをタップします。



※ 片耳装用や補聴器によっては、選択できる方向が限られることがあります。

## <MAGNIFYアプリ・補聴器のファームウェアの更新>

MAGNIFYアプリの操作性向上や品質改善のため、予告なくアプリを更新することがあります。アプリの更新については、AppストアやPlayストアからの通知があります（お使いのスマートフォンの設定によっては通知なく更新される場合もあります）。アプリの更新にはデータ通信量が多くなるため、Wi-Fi環境での更新をお勧めします。

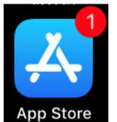

MAGNIFYアプリの更新後、MAGNIFYを接続した際に補聴器のファームウェアの更新を要求されることがあります。「更新」をタップして、補聴器のファームウェア更新を行ってください。ファームウェア更新作業に15分以上かかる場合がありますが、更新が終わるまで補聴器とスマートフォンは近くに置き、しばらくお待ちください。なお、ファームウェアの更新が完了するまでMAGNIFYアプリはお使いいただけません。また補聴器のファームウェア更新は店頭でも行えます。



補聴器の再起動が終わればファームウェア更新は完了です。

※大幅な仕様変更があった場合ファームウェア更新後Bluetoothのリセット及び再ペアリングを要求されることがあります。その場合はBluetoothのリセットまたは再ペアリングを行ってください。

## <補聴器を探す>

補聴器とMAGNIFYアプリが通信したスマートフォンの位置情報やBluetooth信号の強さを表示します。

メニュー > 自分の補聴器を探すを順にタップします。




**マップ**：アプリが接続できていた場所を地図上に表示します。



※GPSの誤差もあるため、水色の円が目安になります。

**検索**：補聴器からのBluetooth信号をスマートフォンが捉え、現在地からの距離を円で表示します。Bluetooth通信距離は最大10mです。

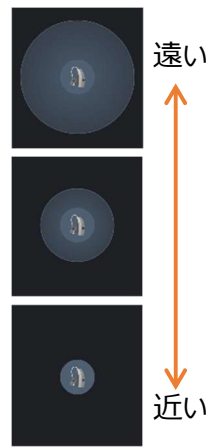

※補聴器とスマートフォンの距離が近くなると円も小さくなります。

## 万一の補聴器紛失に備えて

- MAGNIFYアプリは、スマートフォンの位置情報の使用を許可する設定にしてください。位置情報の設定は、「Appの使用中は許可」や「常に許可」を選択します。位置情報を許可しないとアプリがスマートフォンの位置情報を取得できません。
- MAGNIFYアプリは最前面やバックグラウンドで動作している状態でお使いください。MAGNIFYアプリを終了すると位置情報が更新されず、MAGNIFYアプリを終了する前に補聴器と通信した位置情報が記録として残るため、補聴器紛失時に補聴器を探すのがより難しくなります。




“MAGNIFY”を使用していないときでも位置情報の使用を許可しますか？  
位置情報サービスは、「自分の補聴器を探す」や「位置情報の追加」など、全ての機能に必要です。  
“使用中のみ許可”のままにする  
“常に許可”に変更

## <補聴器のBluetoothのオフ>

スマートフォンとカーナビゲーションシステムでBluetoothのペアリングをしている場合など、一時的に補聴器とスマートフォンのBluetooth通信を切断したい場合があります。このような場合は、MAGNIFYアプリから補聴器側のBluetoothをオフにします。



1. メニューをタップします。

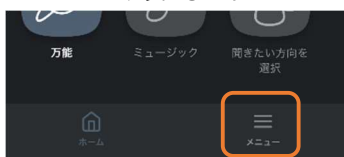

2. 補聴器Bluetoothをタップします。



3. Bluetoothをオフにするをタップします。



再度補聴器とスマートフォンを接続する際は補聴器を再起動（電源のオフ→オン）をします。