


# イーチップロックの取り付け方

ワイデックスのEASYWEAR（以下EW）イヤワイヤ付レシーバーやEWフック&チューブは、顔の側面にフィットし、抜けにくい形状をしています。多くの場合そのままお使いいただけますが、運動をされる方や耳道が大きく動く方、耳道がまっすぐな方の場合、耳せんが抜けてくるケースもあります。

そのような場合は、耳せんが抜けにくいようにイーチップロックを併用します。

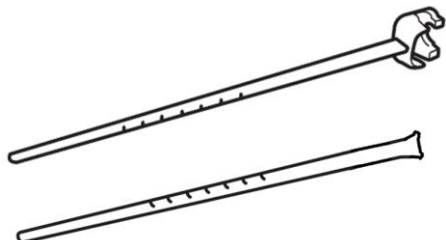

上段：V.2 EWイヤワイヤ付レシーバー用イーチップロック  
（mRIC R Dモデル専用）


下段：EWイヤワイヤ付レシーバー用イーチップロック

## イーチップロックの取り付け方

V.2 EWイヤワイヤ付レシーバー用イーチップロックとEWイヤワイヤ付レシーバー用イーチップロックの取り付け方は異なります。下記図を参考にイーチップロックをレシーバーに取り付けてください。（EWフック&チューブは、EWイヤワイヤ付レシーバー用イーチップロックの取り付け方と同じです）


### V.2 EWイヤワイヤ付レシーバー用の場合

イーチップロックの先端がお客様の前方を向くようにレシーバーの音口とは反対側に被せる形で取り付けます。

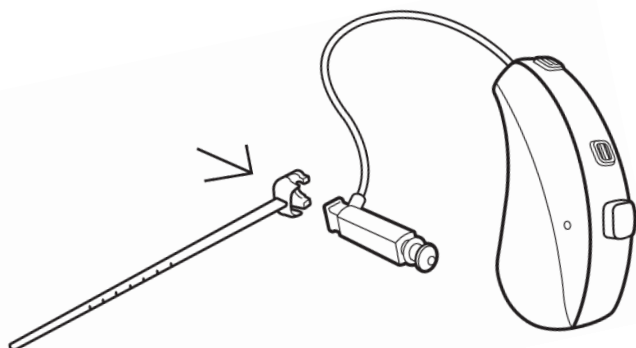


### EWイヤワイヤ付レシーバー用の場合

イーチップロックの先端がお客様の前方を向くようにレシーバーの穴を通し、イーチップロックがしっかり止まるまで引き込みます。

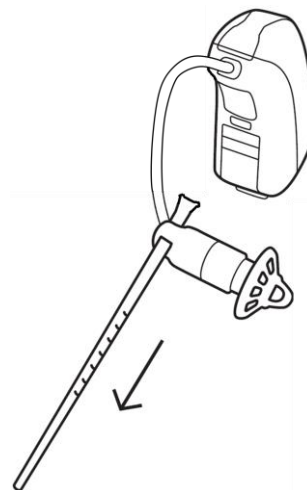

## 耳介への装着

①耳せんを外耳道の入口まで入れます。

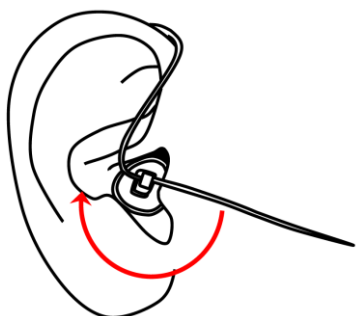

②イーチップロックをコンチャの窪みに沿わせます。

