

リチウムイオン充電式補聴器 充電方法かんたんガイド

リチウムイオン充電式補聴器とは

繰り返し充電できる充電電池が内蔵されているため電池を交換する必要がありません。

使い始める前に専用の充電器で充電を行いましょう。



リチウムイオン充電電池内蔵



※充電電池は取り出せません。電池の不具合が生じた場合はご購入店へご相談ください。

充電に必要なもの

※イラストはイメージです。



●リチウムイオン
充電式補聴器




●mRIC除菌乾燥
充電器 (WPC 1)


または



●mRIC充電器
(WPT 1)

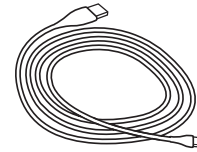

●USBケーブル

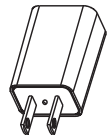

●ACアダプター

補聴器の電源 オン/オフ

通常時

プログラムボタン



プログラムボタン長押しで電源ON/OFF

充電時



充電器から外すと
補聴器の電源ON



充電器にセットすると
補聴器の電源OFF

⚠ **使用時間の目安** ●スマホ使用なし:約20時間* ●ストリーミングを4時間使用時:約18時間*


※フル充電には最長4時間かかります。

※上記使用時間はフル充電した場合の目安です。実際の使用状況により連続使用時間は変動します。

充電式補聴器の正しい使い方

●湿気、直射日光を避け適温で充電

0°C~30°Cが適温です。気温が低すぎたり高すぎると充電器が正常に作動しない場合があります。

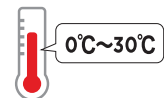

●充電器の定期的なお手入れ

充電スロット内は綿棒などでお掃除しましょう。お手入れの際、溶剤などの液体は使用しないでください。



●補聴器をしばらくの間使用しない場合は、フル充電して保管


長期間放置すると、充電してもご購入当初の使用時間より短くなってしまいます。6ヶ月毎に最低一度はフル充電してください。

使い方【mRIC除菌乾燥充電器 WPC 1の場合】

- 1** 充電器にUSBケーブル・ACアダプターをセットして電源コンセントにつなぎます。接続されるとインジケーターが白色で5回点滅します。



- 2** 補聴器をセットして、カバーを閉じます。補聴器の電源は自動的にオフになります。充電は補聴器が充電器にセットされると、除菌乾燥はカバーを閉じると、それぞれスタートします。

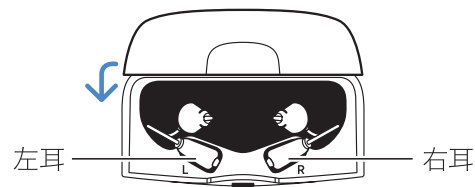


- 3** 充電と除菌乾燥サイクルが自動的に実行されます。(フル充電:約4時間、除菌乾燥サイクル:約30分)


充電	緑の点滅	緑の明暗反復	緑の点灯	黄色の点滅	赤の点滅
WPC 1本体	正常に充電中	正常に充電中	充電完了	充電一時停止	エラー
	充電電池残量 40%未満	充電電池残量 40%以上 100%未満	充電電池残量100% (フル充電)	周囲の温度または補聴器の温度が下がると充電を再開するので少しお待ちください。	補聴器を外し充電器の電源を10秒間切断してからもう一度お試しください。
除菌乾燥	白の点滅	白の点灯	黄色の点灯	赤の点滅	
WPC 1本体	除菌乾燥中	除菌乾燥完了	除菌乾燥一時停止	エラー	
			カバーが開いている場合、閉じると再開します。	補聴器を外し充電器の電源を10秒間切断してからもう一度お試しください。	

使い方【mRIC充電器 WPT 1の場合】

- 1** 充電器にUSBケーブル・ACアダプターをセットして電源コンセントにつなぎます。接続されるとインジケーターが白色に点滅します。

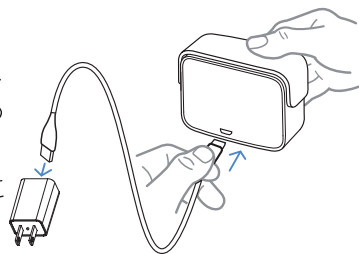

- 2** カバーの両側を持ち上げて後方へ倒して開き、補聴器をセットします。

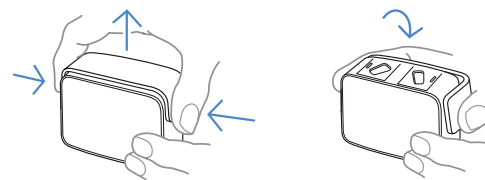

- 3** 補聴器を奥まで差し込んでください。検出中はインジケーターが黄色に点灯します。補聴器の電源は自動的にオフになります。



正常に充電中	正常に充電中	充電完了	正しくセット されていません	エラー
緑の点滅: 充電電池残量 40%未満	緑の反復点灯: (明↔暗) 充電電池残量40%以上 100%未満	緑の点灯: 充電電池残量 100% (フル充電 約4時間)	補聴器が正しく置かれて いるか、充電器の電 源が入っているか確認 しましょう。	補聴器を外し充電器 の電源を10秒間切断し てからもう一度お試 しください。

改善しない場合はご購入店へご相談ください