

# Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート

WCCは補聴器とのインターフェースにNoahlink WirelessまたはNoahlink Wireless 2（以下、総称してNoahlink Wireless）を使用します。ご使用の際は以下を参照のうえ、最新のファームウェアに更新してください。

1. HIMSAのWebサイトからNoahlink Wireless Firmware Updaterをダウンロードします。


※以下のリンクからもダウンロードしていただけます。

[Noahlink Wireless Firmware Upgrader](#)

2. PCにNoahlink Wirelessを接続します。
3. ダウンロードしたFirmware Updaterを実行すると以下のウィンドウが表示されます。

新しいファームウェアがある場合は、シリアル番号左のボックスにチェックを入れて「更新」をクリックします。

※4.の図のように「最新 NLW」の表示がる場合は、更新の必要はありませんので、「閉じる」をクリックして終了します。

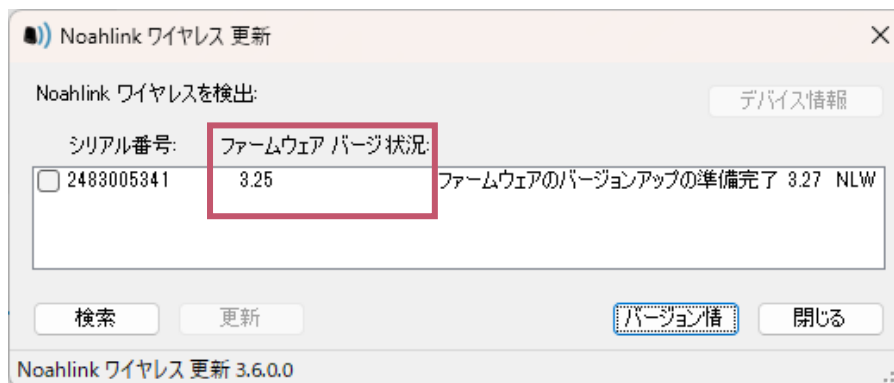

4. アップデートが終了し、ファームウェアバージョン状況に「最新 NLW」の表示があれば更新完了です。「閉じる」をクリックしてUpdaterを終了します。

