


180×90 2つ折り 1C


折り

外面

- ② 充電器のふたを開けた状態で Dry-cap uv を被せます。USBケーブルで充電しながらでも除菌乾燥が行えます。

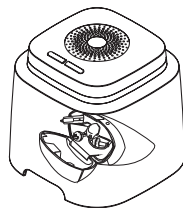

- ③ Dry-cap uv の左側のドライ&クリーンボタンを押して除菌乾燥を行います。

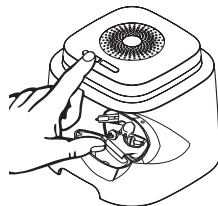

- ④ Dry-cap uv の運転が終了したら充電器を取り出し、ふたを閉じます。




WIDEX MOMENT

SmartRICお手入れガイド

補聴器を快適に長くお使いいただくために、本ガイドを参考に補聴器をきれいで清潔な状態に保ちましょう。補聴器およびイヤセットのお手入れにはいかなる液体や殺菌剤等も使用しないでください。


① 補聴器のお手入れ

やわらかく乾いた布で補聴器を拭き、汚れや油分を取り除きます。マイクカバーの隙間に埃や汚れが詰まっている場合は販売店にご相談ください。

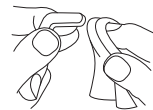

② ワックスガードの交換

定期的にしーバーからイヤチップを外し、ワックスガードに耳垢がたまっていないか確認します。ワックスガードに耳垢が詰まっている場合は、次の方法でワックスガードを交換します。

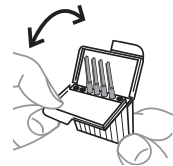

- ① 新しいワックスガードをケースから取り出します。


折り

折り


180×90 2つ折り 1C

内面


- ② 取り外しフックを音口に取り付けられているワックスガードに挿入します。

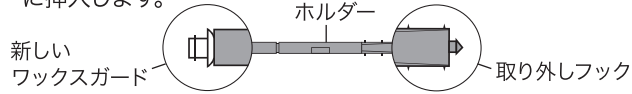


- ③ ホルダーを引くと使用済みのワックスガードが外れます。

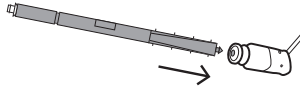

- ④ 反対側の新しいワックスガードを音口の開口部にまっすぐに挿入します。

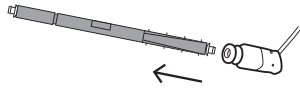


- ⑤ ホルダーを引き抜くとワックスガードの取り付けは完了です。

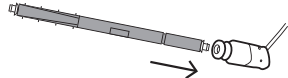

- ⑥ 平らな所に音口を軽く押し付けワックスガードがしっかり取り付けられていることを確認します。



- ⑦ イヤチップを元に戻します。

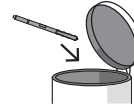


※ワックスガードは使い捨てです。再使用はできません。

③補聴器の除菌・乾燥

補聴器の除菌乾燥には別売りの Dry-cap uv [ドライキャップ ユーブイ] をご使用ください。

- ① お手入れ済みの補聴器を充電器に置きます。

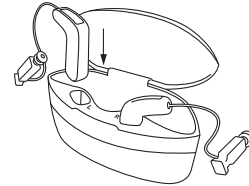

折り