

BEYONDとUNIQUEのFS・FMモデルには、ボリュームコントロールが付いていませんが、両耳でお使いのときに限り、プログラムボタンを優先（ボリューム）コントロールとしてお使いいただけます。

設定方法

補聴器の調整が終わりましたら、以下の順番でタブをクリックし、プログラムボタンの利用方法を選択してください。



※1 プログラムボタン操作方法

右プログラムボタン		ボタン操作機能	左プログラムボタン	
長押し	短く押す		短く押す	長押し
-	プログラム切替え	プログラム切替え	プログラム切り替え	-
-	音声聴取を優先	優先コントロール	快適性を優先	-
ミュート	音声聴取を優先/ミュート解除	優先コントロールとミュート	快適性を優先/ミュート解除	ミュート
プログラム切替え	音声聴取を優先	優先コントロールとプログラム切替え	快適性を優先	プログラム切替え
-	-	無効	-	-

※2 コントロール ステップ

優先コントロールのステップ設定です。

『音声聴取優先』から『快適性優先』の間で3段階の大きなステップ、もしくは9段階の小さなステップで設定することができます。

3ステップの場合

↑ 1 ステップ +3dB

● 元の位置

↓ 1 ステップ -6dB

9ステップの場合

↑ 4 ステップ +2dB

↑ 3 ステップ +2dB

↑ 2 ステップ +2dB

↑ 1 ステップ +2dB

● 元の位置

↓ 1 ステップ -2dB

↓ 2 ステップ -2dB

↓ 3 ステップ -2dB

↓ 4 ステップ -2dB