



BRUGSANVISNING
**EARSETS TIL
WIDEX BAG-ØRET-
HØREAPPARATER**

Individuelle eartips og ørepropper

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	3
OVERSIGT OG AFKRYDSNINGSFELTER	4
INDIVIDUELLE EARTIPS	6
Højre/venstre-markering	7
Placering af høreapparat og eartip	8
Udtagning af høreapparat og eartip	9
Rengøring	10
Udskiftning af earset-dele	16
INDIVIDUELLE ØREPROPPER	18
Højre/venstre-markering	19
Placering af høreapparat og øreprop	20
Aftagning af høreapparat og øreprop	22
Rengøring	24
Udskiftning af earset-dele	29
VOKSFILTER	30
Udskiftning af voksfiler	31
INTEGRERET ANKER	34
FEJLFINDING	35
Eartips og ørepropper med earwire	35
Eartips og ørepropper med slange	37
ADVARSLER	39
VEDLIGEHODELSE	40
SYMBOLER	42

INDLEDNING

Denne brugsanvisning giver en oversigt over forskellige individuelle earset-løsninger til Widex® bag-øret-høreapparater. Et earset består af en eartip eller en øreprop, som er fastgjort til en slange eller en earwire og højttaler. Earsettet anvendes til at kanalisere lyd ind i øregangen fra bag-øret-høreapparatet.



ADVARSEL

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og vejledninger vedrørende dit earset og er et supplement til brugsanvisningen til dit høreapparat. Ud over brugsanvisningen til dit høreapparat skal du også sørge for at læse de afsnit i denne brugsanvisning, som vedrører din earset-løsning, inden du begynder at anvende høreapparatet.

BEMÆRK

I denne brugsanvisning kan earsettet se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes.

OVERSIGT OG AFKRYDSNINGSFELTER

Tilpasseren kan her afkrydse den valgte løsning.

Individuelle eartips

Individuel eartip med højttaler & RIC-earwire	
<input type="checkbox"/>	Individuel åben hård eartip med højttaler, til RIC S & M
<input type="checkbox"/>	Individuel hård eartip med højttaler, til RIC S, M & P
<input type="checkbox"/>	Individuel blød eartip med højttaler, til RIC S, M & P
Afsnit, der skal læses	side
Indledning	3
Oversigt og afkrydsningsfelter	4-5
Individuelle eartips	6-17
Voksfilter	30-33
Fejlfinding	35-36
Advarsler	39
Vedligeholdelse	40-41

Individuel eartip & élan slange/tyndslange	
<input type="checkbox"/>	Individuel åben hård eartip, til élan slange/tyndslange
<input type="checkbox"/>	Individuel hård eartip med ventilation, til élan slange/tyndslange
<input type="checkbox"/>	Individuel blød eartip med ventilation, til élan slange/tyndslange
Afsnit, der skal læses	side
Indledning	3
Oversigt og afkrydsningsfelter	4-5
Individuelle eartips	6-17
Integreret anker	34
Fejlfinding	37-38
Advarsler	39
Vedligeholdelse	40-41

Individuelle ørepropper

Individuel øreprop med højttaler & RITE-earwire	
<input type="checkbox"/>	Individuel hård høreprop med standard lydkanal, til RITE
<input type="checkbox"/>	Individuel hård øreprop med øget lydoutput, til RITE
<input type="checkbox"/>	Individuel blød øreprop, RITE med wire
Afsnit, der skal læses	side
Indledning	3
Oversigt og afkrydsningsfelter	4-5
Individuelle ørepropper	18-29
Voksfilter	30-33
Fejlfinding	35-36
Advarsler	39
Vedligeholdelse	40-41

Individuel øreprop & klassisk slange	
<input type="checkbox"/>	Individuel åben hård klassisk øreprop, til klassisk slange
<input type="checkbox"/>	Individuel hård klassisk øreprop med ventilation, til klassisk slange
<input type="checkbox"/>	Individuel blød klassisk øreprop med ventilation, til klassisk slange
Afsnit, der skal læses	side
Indledning	3
Oversigt og afkrydsningsfelter	4-5
Individuelle ørepropper	18-29
Fejlfinding	37-38
Advarsler	39
Vedligeholdelse	40-41

Høreapparatmodel: _____




Earwire/slange-størrelse:





Venstre _____ Højre _____

INDIVIDUELLE EARTIPS

Den individuelle eartip anvendes med en **RIC**-earwire eller en **élan slange/tyndslange**, afhængigt af høreapparatmodel. I en RIC-løsning er højttaleren placeret i enden af earwiren inden i eartippen.

I en élan slange/tyndslange-løsning er højttaleren placeret inde i høreapparathuset. Under "Oversigt og afkrydsningsfelter" kan du se den løsning, du har.
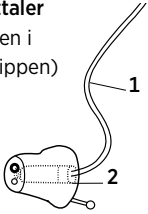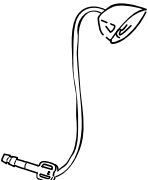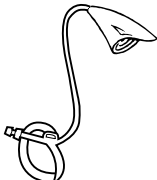
<p>RIC 1. Earwire 2. Højttaler (inden i eartippen)</p> 	<p>élan slange/ tyndslange <i>m- & FA-modeller</i></p> 	<p>élan slange/ tyndslange 9-modeller</p> 
---	---	---

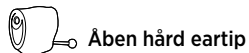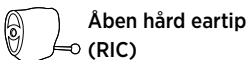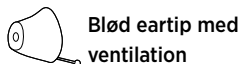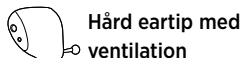

Højre/venstre-markering


Earwurer/slanger findes i forskellige længder til henholdsvis højre og venstre øre. Størrelsen er trykt på earwuren/slangen. Rødt tryk viser, at eartippen er til højre øre, og blå tryk viser, at eartippen er til venstre øre.

På individuelle eartips er der også angivet, om eartippen er til højre eller venstre øre. Hvordan det ser ud, afhænger af den specifikke eartip-type, men det er de samme farver, der anvendes (rød = højre og blå = venstre).

Placering af høreapparat og eartip

Placér eartippen i øregangen, mens du holder fast nederst på earwiren/slangen. Det kan også være en hjælp at trække øret lidt bagud og opad med den anden hånd.

Placér høreapparatet bag øret, således at høreapparat og earwire/slange hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet.

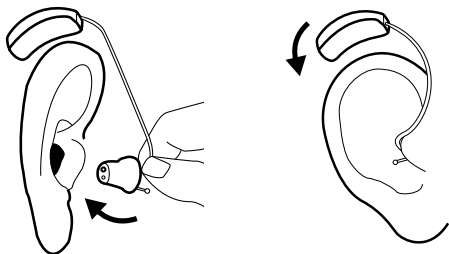


élan slangen/tyndslangen til 9-modellen har et integreret anker. Ankeret anvendes som hjælp til at holde eartippen på plads. Se side 34 for vejledning om tilklipning af ankeret.

Udtagning af høreapparat og eartip

Fjern høreapparatet fra bag øret.

Træk forsigtigt den individuelle eartip ud af øregangen ved hjælp af udtrækssnoren.

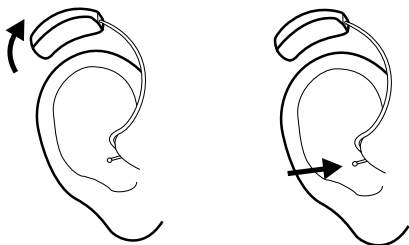


FORSIGTIG

Det er vigtigt, at du ikke trækker i earwiren/slangen, når du skal tage høreapparatet af, men at du bruger udtrækssnoren.

Rengøring

Renseværktøj*.

1. Klud
2. Børste
3. Rensenål
4. Rensetråd

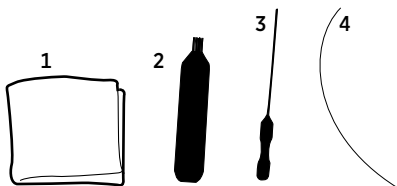

Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra rensesværktøj.

** Udvalget afhænger af earset-type*

Individuel eartip med højttaler & RIC-earwire


(På side 13-15 kan du se, hvordan man rengør en individuel eartip & élan slange/tyndslange).

Det er vigtigt, at **earsettet** altid er rent og uden ørevoks, fugt og lignende.



ADVARSEL

Brug **aldrig** sprit eller andre former for rengøringsmidler til at rense earsettet, da det derved kan blive misfarvet.

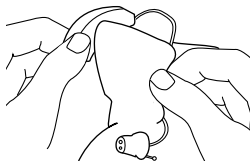

Rengør **earwiren** med kluden efter brug.



ADVARSEL

Brug **aldrig** vand eller rengøringsmidler til at rengøre earwiren, da den derved kan beskadiges.


Højttaleren må **aldrig** komme i kontakt med vand eller rengøringsmidler, da den derved kan beskadiges.




FORSIGTIG!!

Forsøg **aldrig** selv at trække earwiren af den individuelle eartip, da dette kan afbryde forbindelsen mellem earwire og eartip.

Hvis der er kommet snavs eller ørevoks ind i **eartippen med højttaler**, fjernes eventuel synlig ørevoks fra området omkring lydudgangen med den lille børste eller klud. Forsøg ikke at rengøre voksfilteret.

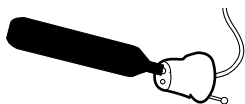

Er lydudgangen stadig blokeret, skal voksfilteret skiftes (se side 30-33).

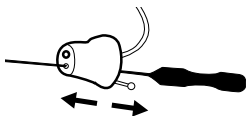

Hvis din individuelle hårde eartip er forsynet med en ventilationskanal, skal du bruge rensenålen til at rense ventilationskanalen.

Den individuelle bløde eartip kan være forsynet med en udvendig ventilation. Rens ventilationen med den lille børste.



FORSIGTIG!!

Brug voksfilter til eartips med indsat højttaler. Se side 30-33.


Individuel eartip & élan slange/tyndslange

Det er vigtigt, at **earsettet** altid er rent og uden ørevoks, fugt og lignende.




ADVARSEL

Brug **aldrig** sprit eller andre former for rengøringsmidler til at rense earsettet, da det derved kan blive misfarvet.

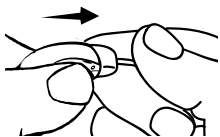


m- og FA-modeller

Tag fat om høreapparatet med tommel- og pegefinger. Tag fat om slangen med den anden hånd og træk lige fra hinanden som angivet af pilen. Som alternativ findes et lille værktøj, der kan bruges til at fjerne slangen. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker flere oplysninger.

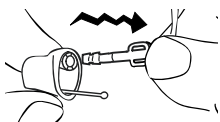


Træk forsigtigt den individuelle eartip af slangen ved at lirke lidt med studsens.

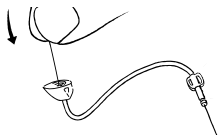

Før rensetråden igennem slangen og træk den ud i den anden ende.




Hvis nødvendigt, kan en eartip anvendt sammen med en élan slange/tyndslange skylles grundigt i lunkent vand, **når den er adskilt fra resten af earsettet.** Lad tørre natten over.

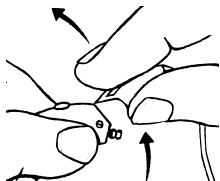


9-modeller

Earsettet løftes af med en skrå, bagudgående bevægelse, som vist på tegningen.

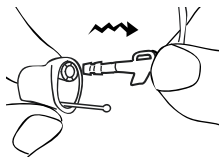

Træk forsigtigt den individuelle eartip af slangen ved at lirke lidt med studsens.

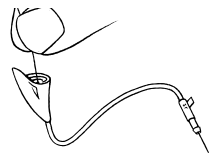

Før rensetråden igennem slangen og træk den ud i den anden ende.



Hvis nødvendigt, kan en eartip anvendt sammen med en élan slange/tyndslange skylles grundigt i lunkent vand, **når den er adskilt fra resten af earsettet.** Lad tørre natten over.

Udskiftning af earset-dele

RIC-earwire

Udskiftning af earwire kræver særligt værktøj og erfaring. Kontakt høreklubben, når earwiren skal skiftes.



ADVARSEL

Forsøg ikke selv at skifte earwire, da forbindelsen til højttaler eller høreapparat derved kan afbrydes.

Kontakt ligeledes høreklubben, hvis eartippen ikke længere passer i øret.


élan slange/tyndslange

Slangen skal udskiftes efter behov. Tal med høreklubben om, hvor ofte slangen skal udskiftes.


Kontakt høreklubben, hvis du har brug for nye slanger, eller hvis din eartip ikke længere passer til øret.

Påsætning af ny/ren eartip på élan/tyndslange-earset


På side 34 kan du se, hvordan ankeret skal tilklippes.

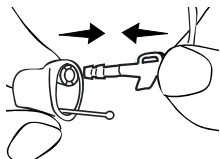

Hold den individuelle eartip mellem to fingre med udtrækssnoeren nedad. Hold slangen med den anden hånd, som vist. Tryk forsigtigt slangen på plads i den individuelle eartip.

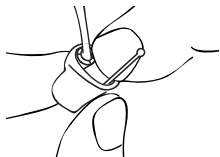

Brug neglen til at trykke slangen helt ind, så den sidder godt fast.

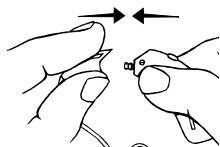


Klik earsettet fast øverst på høreapparatet, som vist.

INDIVIDUELLE ØREPROPPER


Den individuelle øreprop anvendes sammen med en **RITE**-earwire eller sammen med en **klassisk** slange, afhængigt af høreapparatmodel. I en RITE-løsning er høreapparatets højttaler placeret nederst på earwiren inde i øreproppen.

Den klassiske slange er forbundet til en krog på høreapparatet, hvorimod højttaleren er placeret inde i høreapparatet. Under "Oversigt og afkrydsningsfelter" kan du se den løsning, du har.

1. Individuel hård øreprop med højttaler
2. Earwire

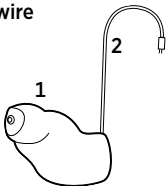


1. Individuel blød øreprop med højttaler
2. Earwire

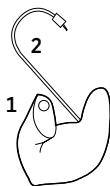

1. Klassisk øreprop
2. Klassisk slange
3. Krog



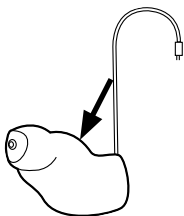

Højre/venstre-markering

Den individuelle hårde øreprop er påtrykt "Widex". Rød farve angiver, at øreproppen er til højre øre, og blå farve angiver, at øreproppen er til venstre øre.

I den individuelle bløde øreprop angiver en rød eller blå voksfilterbøsning, at øreproppen er til højre henholdsvis venstre øre.




ADVARSEL

Med en individuel øreprop med højttaler er dette høreapparat i stand til at producere et lydtryksniveau på mere end 132 dB SPL. Der kan være risiko for at beskadige din resterende hørelse.


Placering af høreapparat og øreprop

Individuel øreprop med højttaler

Hold øreproppen med tommel- og pegefinger og skub den langsomt ind i øregangen, indtil du møder modstand. Slip øreproppen og skub den forsigtigt ind på plads med spidsen af pegefingeren. Øreproppen skal nu sidde behageligt.

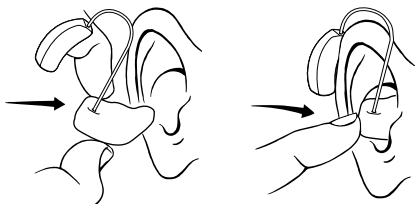


For at anbringe øreproppen korrekt kan det være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. Placér høreapparatet bag øret, således at earwiren hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet.

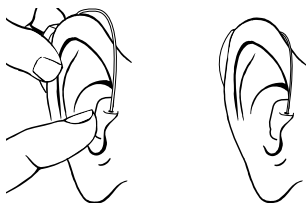


Klassisk øreprop

Placér øreproppen i øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. For at anbringe øreproppen korrekt kan det være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad.

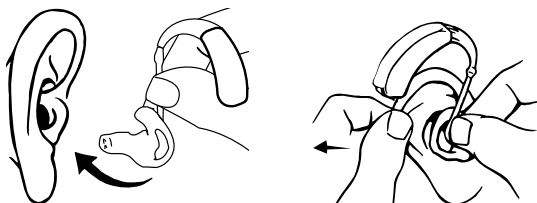


Placér høreapparatet bag øret, således at slangen hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet.

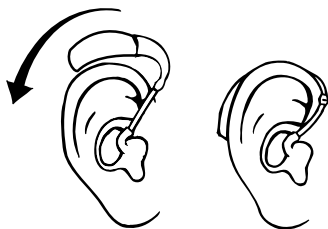

Aftagning af høreapparat og øreprop



Individuel øreprop med højttaler
Fjern høreapparatet fra bag øret.

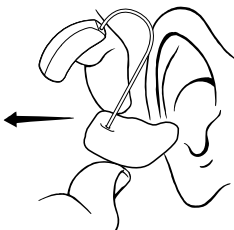


Tag fat om øreproppen med tommel- og pegefinger og træk forsigtigt.



ADVARSEL


Træk ikke i earwiren for at fjerne den individuelle bløde øreprop med højttaler, da højttaleren derved kan beskadiges.

Du kan evt. vrikke øreproppen blidt fra side til side. Det kan også være en hjælp at trække øret lidt bagud og opad med den anden hånd.

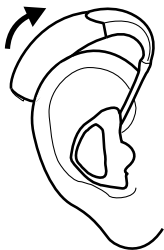

Klassisk øreprop

Fjern høreapparatet fra bag øret.

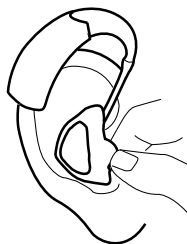


Træk derefter forsigtigt øreproppen ud af øregangen, mens du holder fast nederst på slangen.

Du kan evt. vrikke øreproppen blidt fra side til side. Det kan også være en hjælp at trække øret lidt bagud og opad med den anden hånd.

Rengøring

Renseværktøj*.

1. Blød klud
2. Børste
3. Rensenål

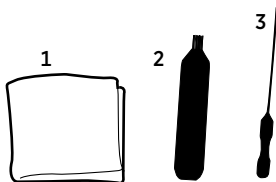

Kontakt høreklubben, hvis du har brug for ekstra rens-
værktøj.

** Udvalget afhænger af earset-type*

Individuel øreprop med højttaler & RITE-earwire

(På side 27-28 kan du se, hvordan man renser en individuel øreprop & klassisk slange).

Sørg for, at **earsettet** altid er rent og uden ørevoks eller fugt.



ADVARSEL

Brug **aldrig** sprit eller andre former for rengøringsmidler til at rense earsettet, da det derved kan blive misfarvet.

Rengør **earwiren** med kluden efter brug.




ADVARSEL

Brug **aldrig** vand eller rengøringsmidler til at rengøre earwiren, da den derved kan beskadiges.



FORSIGTIG!!


Forsøg **aldrig** selv at trække earwiren af den individuelle øreprop, da dette kan afbryde forbindelsen mellem earwire og øreprop.

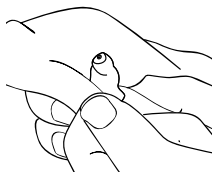

Rengør **øreproppen** med den bløde klud efter brug for at holde den tør og fri for ørevoks og snavs. Forsøg ikke at rengøre voksfilteret.

Det er vigtigt, at **lydudgangen** ikke er blokeret af ørevoks. Hvis den er blokeret, skal du skifte voksfilter (se side 30-33).

Rengør med børsten, hvis din øreprop er forsynet med en **udvendig ventilation**.

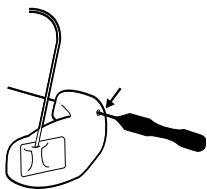

Rengør med rensenålen, hvis din øreprop er forsynet med en **indvendig ventilation**.



ADVARSEL

Den individuelle øreprop med højttaler må **aldrig** komme i kontakt med vand eller rengøringsmidler, da den derved kan beskadiges.

Individuel øreprop & klassisk slange


Sørg for, at **earsettet** altid er rent og uden ørevoks eller fugt.



ADVARSEL

Brug **aldrig** sprit eller andre former for rengøringsmidler til at rense earsettet, da det derved kan blive misfarvet.




Hvis **slangen** til earsettet bliver slap, stiv, gul eller revner, skal den udskiftes. Kontakt høreklinikken og få vejledning.

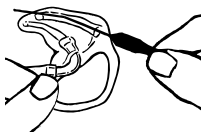

Hvis øreproppen er forsynet med ventilation, skal du rengøre **ventilationen** med rensenålen.

Tør øreproppen af med en klud efter brug.

Tag slange med øreprop af høreapparatets krog mindst én gang om ugen og skyl slange og øreprop grundigt i lunkent vand. Lad tørre natten over.

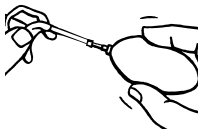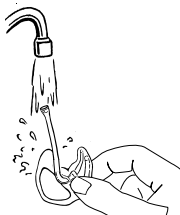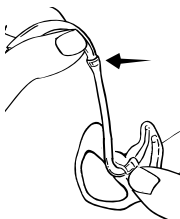

Hvis der stadigvæk er fugt i øreprop eller slange, kan du bruge en blæsebold eller lignende til at blæse den sidste rest af fugtighed væk, **inden** slange og øreprop sættes fast på høreapparatets krog.

Udskiftning af earset-dele

Individuel øreprop med højttaler

Udskiftning af earwire kræver særligt værktøj og erfaring. Vi anbefaler derfor, at du taler med høreklubben, når earwiren skal skiftes.



ADVARSEL

Forsøg ikke selv at skifte earwire, da forbindelsen til højttaler eller høreapparat derved kan afbrydes.

Kontakt også tilpasseren, hvis den individuelle hårde øreprop ikke længere passer i øret.

Klassisk øreprop

Hvis slangen til earsettet bliver slap, stiv, gul eller revner, skal den udskiftes. Kontakt høreklubben og få vejledning.

Kontakt høreklubben, hvis du har brug for nye slanger, eller hvis øreproppen ikke længere passer i øret.


VOKSFILTER

Der anvendes et voksfilter til RIC- og RITE-løsninger, hvor højttaleren sidder i eartippen/øreproppen.

Voksfilteret hjælper med at beskytte høreapparatet mod ørevoks. Brug altid NanoCare voksfiltre til dit høreapparat, hvis du har en RIC-løsning, og CeruSTOP XL voksfiltre, hvis du har en RITE-løsning, da garantien til dit høreapparat ellers vil være ugyldig.

Illustrationen viser et NanoCare voksfilter. Voksfiltersystemet består af følgende dele:

1. Styrepind
2. Udtrækskrog
3. Voksfilter

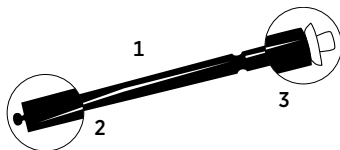

FORSIGTIG

Voksfilteret er til engangsbrug og kan kasseres efter brug. Forsøg **ikke** at rengøre eller genbruge et voksfilter. Dette vil kunne beskadige dit høreapparat og/eller forårsage, at voksfilteret løsner sig inden i dit øre.

Udskiftning af voksfilter





FORSIGTIG

Forsøg **IKKE** selv at fjerne den individuelle eartip/øreprop fra earwiren/ højttaleren.

Fremgangsmåde:




Illustrationerne viser en individuel eartip, men fremgangsmåden er den samme for individuelle ørepropper og deres voksfilter.

1. Sæt styrepindens udtrækskrog i det brugte voksfilter, som er placeret i lydudgangen.
2. Træk voksfilteret lige ud.

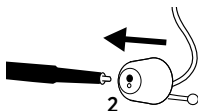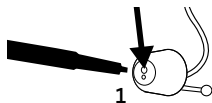

Vend derefter styrepinden om, så det brugte voksfilter vender væk fra højttaleren, og det nye voksfilter er klar til at blive sat i.

3. Sæt styrepinden i åbningen til lydudgangen og tryk forsigtigt voksfilteret på højttaleren.
4. Træk styrepinden lige ud. Det nye voksfilter glider automatisk af styrepinden. Tryk RIC-eartippen forsigtigt mod en flad overflade for at sikre, at voksfanget bliver på plads. Hvis du har en RITE-øreprop, skal du sørge for, at voksfilteret sidder godt fast inde i lydkanalen.

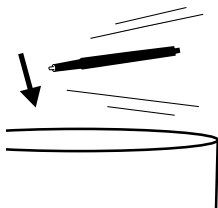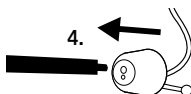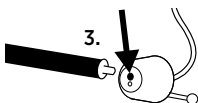

Kassér styrepinden med det brugte voksfilter.

Det er meget individuelt, hvor ofte voksfilteret skal skiftes.

Hvis du har spørgsmål angående brugen af voksfilter, skal du henvende dig til høreklinikken.




ADVARSEL

Hvis voksfilteret ikke sidder ordentligt fast, skal du fjerne det og sætte et nyt i. Hvis voksfilteret løsner sig fra eartippen/øreprop-
pen, mens den sidder i øregangen, skal du kontakte din læge.
Forsøg ikke selv at fjerne voksfilteret fra øregangen.


INTEGRERET ANKER

Individuelle eartips

Med denne individuelle earset-løsning skal der kun benyttes 2 mm af ankeret.

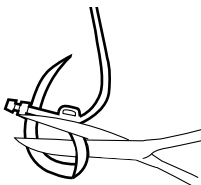

Afklip ankeret, så der er ca. 2 mm tilbage. Dette er vigtigt, da det ekstra stykke sikrer, at den individuelle eartip kan placeres korrekt.

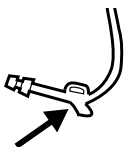

Slangen skal se således ud, når ankeret er klippet af.

FEJLFINDING

Eartips og ørepropper med earwire

På de næste sider finder du nogle gode råd til, hvad du skal gøre, hvis dit høreapparat ikke virker eller ikke fungerer korrekt. Hvis problemet fortsætter, kontakt høre-klinikken. De gode råd henviser kun til earsettet. Se også brugsanvisningen til dit høreapparat.

Høreapparatet er helt tavst

Voksfilteret er tilstoppet

Skift voksfilter

Earwiren er knækket

Kontakt høre-klinikken

Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok

Voksfilteret er tilstoppet

Skift voksfilter

Høreapparatet hylter vedvarende

Øreproppen/eartippen er ikke anbragt korrekt i øregangen

Tag øreproppen/eartippen ud og sæt den i øret igen. Hvis problemet stadig er til stede, kontakt høreklubben.

Øreproppen/eartippen sidder for løst

Kontakt høreklubben

Højtaleren sidder ikke ordentligt fast i eartippen

Kontakt høreklubben

Øreproppen er ubehagelig at have i øret

Det ydre øre eller øregangen er øm

Kontakt høreklubben.

FEJLFINDING

Eartips og ørepropper med slange

På de næste sider finder du nogle gode råd til, hvad du skal gøre, hvis dit høreapparat ikke virker eller ikke fungerer korrekt. Hvis problemet fortsætter, kontakt høre-klinikken. De gode råd henviser kun til earsettet. Se også brugsanvisningen til dit høreapparat.

Høreapparatet er helt tavst, eller lydstyrken er ikke kraftig nok

Lyddudgangen er blokeret

Øreprop: Rens den tilstoppede lydkanal

Individuel eartip: *Rens eartippen*

Slange: *Skyl eller udskift slangen*

Høreapparatet hyler vedvarende

Slangen er gul, stiv eller revnet

Skift slangen

Øreproppen/eartippen er ikke anbragt korrekt i øregangen

Tag øreproppen/eartippen ud og sæt den i øret igen. Hvis problemet stadig er til stede, kontakt høre-klinikken.

Øreproppen/eartippen sidder for løst

Kontakt høreklubben

*Øreprop: Slangen ryger meget nemt af øreproppen
eller af krogen på høreapparatet*

Skift slangen

Øreprop: Der er en revne i krogen

Kontakt høreklubben

ADVARSLER



ADVARSEL

- Høreapparatet er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregang.
- Bemærk, at du altid ved brug af høreapparat skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at høreapparat og earset fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for høreapparat og earset, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse både høreapparat og earset efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer de forskellige høreapparatdele. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer.
- Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af høreapparatet.

VEDLIGEHOELDELSE

Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid:



FORSIGTIG

- Sluk for høreapparatet, når det ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage.
- Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares i æsken på et tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i det.
- Høreapparatet må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at tørre høreapparatet grundigt af, hvis det har været udsat for meget sved som efter intens fysisk aktivitet, f.eks. sport.
- Undgå at tabe høreapparatet - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder høreapparatet ind over en blød overflade.
- Tag høreapparatet af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer.










Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være potentielt farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet, hvis elektronikaffald (WEEE) ikke håndteres korrekt.








Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.

Høreapparater, tilbehør og batterier skal bortskaffes på særlige affaldsstationer for elektronikaffald eller returneres til din høreklinik, som sørger for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte folkesundheden og miljøet.

SYMBOLER

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr

symbol	Titel/beskrivelse
	Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.
	Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret.
	Udløbsdato Produktet må ikke anvendes efter denne dato.
	Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch)
	Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer)
	Serienummer Produktets serienummer*
	Produktet skal beskyttes mod sollys Produktet skal beskyttes mod lyskilder og/eller produktet skal beskyttes mod varmekilder

symbol	Titel/beskrivelse
	Produktet skal holdes tørt Produktet skal beskyttes mod fugt og/eller produktet skal beskyttes mod regn
	Minimumtemperatur Den laveste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Maksimumtemperatur Den højeste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Temperaturforhold De højeste og laveste temperaturer, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for.
	Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.
	Caution/Warning Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug.
	WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

symbol	Titel/beskrivelse
	CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.
	Bemærk Produktet klassificeres i henhold til R&TTE direktiv 1999/5/EF som Klasse 2 udstyr med visse anvendelsesbegrænsninger i nogle af EU- og EØS-landene.
	C-Tick mærke Produktet overholder de gældende regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand.
	Interference Elektromagnetisk interference kan forekomme i nærheden af produktet.

*Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet **SN**



WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngge, Denmark
www.widex.com



Manualnummer:
9 514 0250 010 #02



MIX
From responsible
sources
FSC® C068122