



WIDEX SOUND ASSIST

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



GØR DET NEMMERE AT HØRE DET, SOM BETYDER NOGET FOR DIG

Widex Sound Assist er en “schweizerkniv” for din høreapparater, designet til at forbedre kommunikationen.

Enheden kan bruges som bordmikrofon til møder eller selskaber, som partnernmikrofon ved én-til-én-samtaler, til direkte streaming fra enhver Bluetooth®-enhed og til håndfri telefonopkald. Derudover kan Sound Assist også bruges som fjernbetjening til at betjene høreapparaterne, og den tilbyder telespole-funktion til høreapparater, som ikke har telespole indbygget i sig.

Fungerer med de nyeste Widex Bluetooth-høreapparater

Sound Assist fungerer med alle Widex Moment™ og Widex Magnify™ Bluetooth-høreapparater, og via høreapparaternes app er det nemt at justere fx lydstyrke.

Se mere på www.widex.com/da-dk/sound-assist/

SOUND ASSIST KAN HJÆLPE I MANGE SITUATIONER

- **Partnermikrofon**
Én-til-én-samtaler med familie og venner lyder klart uanset, hvor du er.
- **Bordmikrofon**
Hør klart under vigtige møder, middage og gruppesamtaler.
- **Håndfri telefonopkald**
Fantastisk lyd på farten.
- **Streaming med Bluetooth**
Lyt til musik, film eller tv gennem dine høreapparater.
- **Fjernbetjening af dine høreapparater**
Nem kontrol af din lyd.
- **Telespolelyd**
Telespoleforbindelse, selvom dine høreapparater ikke har indbygget telespole.



TEKNISK DATA

- Batterilevetid: 10 timer (blandet brug)
- Fuld opladning: 3 timer
- Li-ion batteri med mikro-USB opladning

RÆKKEVIDDE

- Bluetooth-streaming: 10-15 m fra Bluetooth-enhed til Sound Assist
- Partnermikrofon: 20 cm fra taler til Sound Assist
- Bordmikrofon: 1,5 m fra taler til Sound Assist



LÆR DIN SOUND ASSIST AT KENDE

Widex Sound Assist gør din dagligdag med høreapparater lettere. Det kan være som bordmikrofon, til telefonopkald og samtaler. Sound Assist kan sågar hjælpe dig med at styre volumen i dine høreapparater. Den kommer også med en telespolefunktion, så du kan streame lyd direkte i dine apparater.



PAR SOUND ASSIST MED DINE HØREAPPARATER

PARRING TIL DINE HØREAPPARATER:

Widex Sound Assist skal parres med din høreapparater, før du parrer den med andre enheder som f.eks. smartphone eller PC.

- Sørg for, at Widex Sound Assist er slukket, og genstart dine høreapparater. Høreapparaterne er i parringstilstand i 3 minutter efter genstart.
- På din Widex Sound Assist skal du trykke på lydstyrke op-knappen (3) og tænd/sluk/tilstand-knappen (6) og holde begge nede i 3 sekunder, indtil lyset (1) bliver blå.
- Hold begge enheder inden for 1 meter af hinanden.
- Parringssekvensen starter automatisk, og lyset (1) blinker kortvarigt grønt, når parringen er gennemført.

Widex Sound Assist kan kun parres med ét sæt høreapparater. For at parre et nyt sæt høreapparater, skal du udføre de samme trin, og den nye parring vil overskrive den eksisterende.

PARRING TIL BLUETOOTH-ENHED:

- På din Widex Sound Assist skal du trykke på lydstyrke op-knappen (3) og tænd/sluk/tilstand-knappen (6) og holde begge nede i 3 sekunder, indtil lyset (1) bliver blå.
- Hold begge enheder inden for 1 meter af hinanden.
- Parringssekvensen starter automatisk, og lyset (1) blinker kortvarigt grønt, når parringen er gennemført.

Widex Sound Assist kan parres med op til 8 Bluetooth enheder og være aktivt forbundet til 1 Bluetooth-enhed.

HURTIG GUIDE

Tænd/sluk Widex Sound Assist

Tryk og hold tænd/sluk/tilstand-knappen (6) inde i 2 sekunder.

Skift af tilstand

- Sikr dig, at enheden er tændt
- Tryk på tænd/sluk/tilstand-knappen (6) for at skifte mellem tilstande.
- Når lyset er tændt, vil enheden vise den valgte tilstand.



Den nuværende tilstand vises af de tre lys-indikatorer (6).

Justering af streaminglydstyrke

Tryk kort på lydstyrke op-knappen (3) eller lydstyrke ned-knappen (4) for at justere lydniveauet.

Brug af Widex Sound Assist

Brug den integrerede metalklips (8) eller den medfølgende halssløjfe.

Lås knapper for at forhindre utilsigtet brug

- Tryk på lydstyrke op-knappen (3) og programknappen (5) samtidigt for at låse og låse op for knapperne.
- Lysindikatoreren (1) blinker hvidt to gange for at indikere, at knapperne er blevet låst eller låst op.

Opladning

Brug det medfølgende mikro-USB-kabel til at oplade din Widex Sound Assist. En fuld opladning kræver 3 timers opladning.

SAMTALEMİKROFON

Partnermikrofon

- Når en enkelt taler bærer Sound Assist streames vedkommendes stemme automatisk til høreapparaterne.

Bordmikrofon

- Tryk kort på tænd/sluk/tilstand-knappen (6) for at vælge bordmikrofontilstand (mikrofonikon) (7).
- Når mikrofonens lysindikator (7) er grøn, er bordmikrofonen aktiv.
- Bedste resultat opnås, når Widex Sound Assist placeres på en flad overflade.

Hvis du vil fokusere på en bestemt person, kan du låse lytteretningen og manuelt pege på personen, du ønsker at fokusere på.

- Tryk og hold trykknappen (2) nede, indtil den øverste indikator (1) lyser konstant grønt.
- Ret Widex Sound Assist mod personen i fokus.
- Tryk igen på trykknappen (2) og hold den nede for at låse op for lytteretningen.

Sluk for mikrofon

Under streaming kan du slukke for høreapparatets mikrofoner, så du lukker omgivende støj ude.

- Tryk og hold lydstyrke ned-knappen (4) nede i min 3 sekunder for at slå høreapparatets mikrofoner fra.
- Tryk og hold lydstyrke op-knappen (3) nede for at slå lyden til. høreapparatmikrofoner.

BLUETOOTH STREAMING

- Tryk kort på tænd/sluk/tilstand-knappen (6) for at vælge Bluetooth-tilstanden (Bluetooth-ikon) (7).
- Når Bluetooth-lysindikatoren (7) er grøn, er Bluetooth-tilstand aktiv.

Håndfri telefonopkald

Acceptér eller afvis dine telefonopkald ved hjælp af Widex Sound Assist, når du streamer opkald direkte fra enhver smartphone til dine høreapparater.

INDGÅENDE OPKALD

Svar	Tryk kort på trykknappen (2) for at acceptere opkaldet.
-------------	---------------------------------------------------------

Afslut	Tryk kort på trykknappen (2).
---------------	-------------------------------

Afvis	Tryk og hold trykknappen (2) kortvarigt i 2 sekunder.
--------------	-------------------------------------------------------

UDGÅENDE OPKALD

Ring op	Start opkaldet på den tilsluttede telefon eller lav en anmodning via telefonens stemmeassistent. Tal ind i Widex Sound Assists mikrofon.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brug af stemmeassistent

- Sørg for, at Widex Sound Assist er tilsluttet en Bluetooth-enhed med stemmeassistent aktiveret.
- Tryk og hold trykknappen (2) nede i 2 sekunder og lav din stemmekommando.

Lydstreaming

Stream lyd fra enhver Bluetooth-enhed til dine høreapparater. Vælg Widex Sound Assist fra Bluetooth-menuen på din enhed eller sæt begge enheder i parringstilstand.

Afspil/pause	Tryk kort på trykknappen (2).
---------------------	-------------------------------

Næste nummer	Tryk to gange på trykknappen (2).
---------------------	-----------------------------------

Afvis	Tryk på trykknappen (2) tre gange.
--------------	------------------------------------

Fjernbetjening

Når den ikke bruges til streaming, kan Sound Assist bruges som fjernbetjening til dine høreapparater ved at skifte program og lydstyrkeniveau.

For at aktivere fjernbetjening skal du først vælge Bluetooth-tilstand.

Skift program

Tryk kort på programtasten (5) for at skifte program på dit høreapparat.

Hvis dit høreapparat er programmeret med Zen+ program, kan du få adgang til dette ved et langt tryk på programknappen (5). Korte tryk på programknappen (5) giver dig derefter mulighed for at vælge mellem alle tilgængelige Zen-stile.

Justering af lyden

Tryk kortvarigt på volumen op-knappen (3) for at hæve lydstyrken, og tryk på lydstyrke ned-knappen (4) kortvarigt for at sænke lydstyrken.



TELEPOLE-STREAMING

Widex Sound Assist i Telespole-tilstand vil streame lyd fra enhver telespole i nærheden.

- Tryk kort på tænd/sluk/tilstand-knappen (6) for at vælge T-ikonet.
- Når T-lysendikatoren (7) er grøn, vil telespolen være aktiv.
- Tryk på trykknappen (2) kortvarigt for at afspille eller stoppe Telespole-streaming.

The logo for WIDEX, featuring the word "WIDEX" in a bold, sans-serif font. The letter "W" is enclosed within a rounded rectangular shape.

SOUND LIKE NO OTHER



Widex is a registered trademark of WIDEX A/S.
Printed by Rosendahls a/s. 2022-11.
90061-1-W-DK-1122 Widex Moment Sheer Sound Assist M65

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and Google Play logo are trademarks
of Google Inc.

Subject to change with no further notice.

A button with a white Apple logo on the left and the text "Download on the App Store" in white on a dark background.A button with the Google Play logo (a colorful triangle) on the left and the text "GET IT ON Google Play" in white on a dark background.