

## OPLADNING AF WIDEX TRANSPORTABEL OPLADER

Det interne batteri på den transportable oplader kan oplades ved hjælp af et USB-C-kabel til strømforsyning eller en Qi-pad oplader til trådløs opladning.



Widex SmartRIC høreapparater kan altid oplades, hvis opladeren er tilsluttet strømforsyningen eller placeret på en Qi-pad oplader. Dog skal det interne batteri på opladeren oplades for at bruge opladeren på farten.

### Lysindikator

Der er tre LED lysindikatorer i bunden af opladeren, der viser strøm- og batteristatus.

#### Opladeren er ikke tilsluttet strømforsyningen:

● ● ●	12 sek	+3 fulde høreapparat opladninger
● ● ○	12 sek	Minimum 2 fulde høreapparats opladninger
● ○ ○	12 sek	Minimum 1 fuld høreapparat slet o opladning
☀	12 sek	Mindre end 1 høreapparats opladning tilbage

#### Opladeren er tilsluttet strømforsyningen (USB-C/Qi-pad):

● ● ●	Intern batteri fuldt opladet
● ● ●	Intern batteri oplades; < 3 fulde høreapparats opladninger
● ● ○	Intern batteri oplades; < 2 fulde høreapparats opladninger
● ○ ○	Intern batteri oplades; < 1 fuld høreapparato opladning

#### Andre lysindikationer, der kan forekomme:

● ● ●	Aftagende grøn	Inden for 10 sekunder efter et langt tryk på knappen – opladeren slukker.
● ● ●	Aftagende orange	Høj temperatur, opladning er sat på pause (Qi-pad opladning).
● ● ●	Lysende grøn	Batteriet er fuldt opladet, opladningen er stoppet (Qi-pad opladning)
● ● ●	Blinkende rød	Fejl under Qi-pad opladning, spænding uden for rækkevidde.
● ● ●	Blinkende rød 12 sek	Intern batteritemperatur i oplader case er for høj eller for lav, opladningen er stoppet.

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER

WWW.WIDEXPRO.COM

**WIDEX**

## WIDEX SMARTRIC™

### REFERENCE GUIDE

Velkommen til nye vinkler af naturlig hørelse med det nye Widex SmartRIC™ – et høreapparat med smart design, der yderligere understøtter brugeren audiologisk.



Denne hurtige referenceguide giver dig et overblik over de vigtigste oplysninger om Widex SmartRIC høreapparater.

#### RECEIVERS OG EARWARE

Widex SmartRIC-høreapparatet er kompatibelt med **V.2 M- og P-modtagere**.

Det kan bruges med følgende instant ear-tips:



Åben



Åben Rund



Tulip



Rund



Sleeve Vented



Dobbelt



Sleeve Power

**Hvad med custom ear-tips?**  
Hvert øre (kanal) er unikt, og det påvirker størrelsen af en tilpasset øreprop. Det er vigtigt, at du tjekker størrelsen i forhold til den tilgængelige plads i opladeren.

#### TILBEHØR

Widex SmartRIC er også kompatibel med vores omfattende sortiment af tilbehør.

**Widex Sound Assist**  
Bluetooth streaming, fjernbetjening, bordmikrofon, telespole med mere



**Widex SoundConnect**  
Lydstreaming fra pc'er og bærbare computere



**Widex TV Play**  
Lydstreaming fra fjernsyn



**Widex RC-DEX**  
Fjernbetjening – lydstyrke, programændringer



## APPS

Flere Widex-apps er også kompatible med Widex SmartRIC. Disse inkluderer:



**WIDEX MOMENT™**  
Kontrol af lydstyrke og ændring af programmer; tilpas lyden med Min Lyd



**WIDEX REMOTE CARE™**  
Udfør fjernjusteringer og tilpasninger af høreapparat



**WIDEX TONELINK™**  
Grundlæggende fjernbetjeningsfunktioner; til brugeren der vil have det simpelt

## LED-LYSINDIKATOR

Widex SmartRIC leveres med en smart LED-lysindikator for at vise parrings-, batteri- og strømstatus.

Lysindikatorer	Status
Fem langsomme grønne blink 	Høreapparatet tændes.
Seks grønne blink 	Høreapparatet er parret med en Bluetooth-enhed.
Kontinuerlige grønne blink* 	Høreapparatet er tændt, batteri > 20%.
Kontinuerlige røde blink* 	Høreapparatet er tændt, batteri < 20%.

\* Yderligere mulighed, der kan aktiveres.

## FEATURES

Widex SmartRIC fås i prispunkterne 440, 330, 220 og 110.

KEY FEATURES	440	330	220	110
Performance	Fremragende	Høj	Mellem	Basis
Behandlings- og finjusteringskanaler	15	12	10	6
Widex PureSound™ med ZeroDelay™ teknologi	•	•	•	•
TruAcoustics™ med Personal Gain Integrator	•	•	•	•

CONNECTIVITY	440	330	220	110
2.4 GHz kontrol (Android og iOS)	•	•	•	•
2.4 GHz audio streaming (iOS og ASHA)	•	•	•	•
WidexLink til DEX tilbehør†	•	•	•	•

APPS FOR iOS & ANDROID	440	330	220	110
MOMENT App med SoundSense Learn	•	•	•	
MOMENT App	•	•	•	•
TONELINK App	•	•	•	•
COM-DEX App	•	•	•	•
Widex Remote Care App	•	•	•	•

  

FEATURES	440	330	220	110
Adaptation Manager	•	•	•	•
Fluid Sound Analyzer (Automatisk lydklassificering)	11	7	4	3
Programmer	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
High-frequency boost	•			
Speech Enhancer RT	RT/IE	IE		
HD Locator	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Preference kontrol	•	•	•	•
LED-lysindikator	•	•	•	•
Soft-level støjreduktion	•	•	•	•
Støjreduktion	•	•	•	•
Zen/SoundRelax	•	•	•	•
Audibility Extender	•	•	•	•

†Inkl. Widex Sound Assist, TV-PLAY, RC-DEX, TV-DEX, COM-DEX, FM+ DEX.

# WIDEX SMARTRIC™

## TRANSPORTABEL OPLADER GUIDE

Widex SmartRIC™ er et genopladeligt høreapparat, der bruger en slank og stilfuld transportabel oplader til opladning på farten. Denne transportable oplader giver brugeren mere end en uges frihed med en enestående batterilevetid.



Dette afsnit giver dig et overblik over de vigtigste oplysninger om den transportable oplader WPP401, der følger med de nye Widex SmartRIC høreapparater.

## OVERSIGT

Her er et hurtigt indblik af de forskellige komponenter i den transportable Widex oplader.



## OPLADNING AF WIDEX SMARTRIC™ HØREAPPARATER



Fra 0% batteristatus vil en fuld opladning af høreapparatet tage cirka **4 timer**.



Hvis batteristatus er < 40%, **aktiveres hurtig opladning**, og en **30-minutters opladning** vil give op til **8 timers brug af høreapparatet**.



### Lysindikator

Der er en LED lysindikator for hvert høreapparat på forsiden af opladeren. Her kan du se hvad de forskellige lysindikationer betyder:

**Hvis opladeren ikke er tilsluttet strømforsyningen:**

- 12 sek Høreapparatet er fuldt opladet.
- 12 sek Høreapparatet oplades.

Hvis opladeren er tilsluttet strømforsyningen via en USB-C-kabel eller oplades på en Qi-pad oplader, vil lysindikatorerne forblive oplyste.

### Andre lysindikationer, der kan forekomme

- Aftagende grøn Inden for 10 sekunder efter et langt tryk på knappen – opladeren slukker.
- Blinkende orange Høreapparatets temperatur er for høj (Qi-pad opladning); opladning vil fortsætte når høreapparatets temperatur er faldet.
- Blinkende rød Høj temperatur på høreapparatet (normal opladning); opladning fortsætter, når temperaturen falder.

**i** Hvert høreapparat oplades uafhængigt, dvs. hvis det ene høreapparat er fuldt opladet, mens det andet ikke er, vil kun det høreapparat med lavt batteri oplades. Dog vil det høreapparat, der allerede er fuldt opladt forblive slukket med fyldt batteri.